

BRUKSANVISNING

Wima-produktene er beregnet til forebygging og begrensn-
ning av trykk / liggesår på utsatte områder som sete, hæl,
ankel og albue.

**Produktene kan ikke anvendes direkte på åpne sår
uten at det legges en sårbandasje først.**

- **Borrelåsene må ikke strammes slik at blodsirkula-
sjonen hindres.**
- **Produktene bør vaskes jevnlig, for å beholde
maksimal trykkavlastningseffekt.**
- **Borrelåsene bør lukkes under vasking for å unngå
at låseevnen reduseres.**
- **Ved at fyllmaterialet slites avtar trykkavlastnings-
effekten, vær derfor nøye med inspeksjon.**

VEDLIKEHOLD:

Wimaproduktene er laget i 100% bomullstoff med kanaler fylt
med ekspandert polystyren granulat.

Fyllmaterialet tåler vasketemperatur opp til 85°C. Overstiger
derimot vasketemperaturen 85°C, vil fyllmaterialet krympe og
trykkavlastningseffekten bli sterkt redusert.

Vi anbefaler derfor at vaskeanvisningen på 60°C følges.

Tlf. 71 51 42 84
Fax 71 51 40 73
P.b. 28, 6538 Averøy
www.wima.no

Wima[®] produkter