

# Talande fotoalbum - BRUKSANVISNING

## Att sätta i nya batterier:

Du behöver 2 st 1,5V LR03/AAA batterier. Vi rekommenderar att man använder alkaliska batterier.

Notera:

Använd endast nya batterier av specificerad storlek och typ. Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier.

*Låt aldrig barn leka med batterier.*

## Spela in ett ljud:

Du kan spela in ett meddelande på maximalt 10 sekunder på varje sida.

1. Tryck ner och håll nertryckt knappen märkt "Record" samt uppspelningsknappen för önskad sida samtidigt. Den röda lysdioden indikerar när inspelningen börjar.
2. Tala tydligt 15-20 cm från mikrofonen märkt "Mic". När du är klar släpper du upp knapparna igen.

Notera:

Fotoalbumet slutar automatiskt att spela in efter 10 sekunder. Du kan spela in hur många gånger som helst. Ett nytt meddelande ERSÄTTER alltid det gamla för aktuell sida.

## Spela upp ljud:

Varje sida i fotoalbumet har en knapp med symbolen till höger. Tryck på denna knapp för att spela upp ljudet för vald sida.



Uppspelningsknapp

