

2005-05-15

Bruksanvisning Svan Balance

Bruksanvisningens art nr:10914

Svan Balance Montering och Bruksanvisning

Svan Balance är ett hjälpmedel för dem som behöver extra stöd vid förflyttning till och från toaletten samt vid sittande på toaletten. Svan Balance är ett modulsystem som består av många olika komponenter som kan kombineras på olika sätt.

Svan Balance kan kombineras med flera av Svan Cares produkter Svan Bidette, Svan Hålförminskare, Svan Ryggkudde, mm.

Allmän information.

Max brukarvikt Armstöd, stödhandtag 130 kg

Max brukarvikt Fotpall 60kg

Svan Balance får endast monteras på toaletter som är väl förankrade i golv eller vägg.

Lämna aldrig en person utan uppsikt som använder Svan Balance

Skulle det uppstå problem med Svan Balance kontakta då Arbetsterapeuten eller Svan Care för support.

Svan Balance är provad och godkänd av Hjälpmedelsinstitutet. Svan Balance är CE märkt.

Svan Care påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än angivet i denna bruksanvisning.

Före användning

Kontrollera att Svan Balance sitter ordentligt fast i toaletten och att den är monterad rätt.

Montering

se nästa sida

Rengöring

Tvål och vatten, tvättsprit.

Rekonditionering

Plocka isär hela produkten.

Sitsen tvättas rent med tvättmedel, sköljs med vatten och torkas. Desinfektera.

Övriga delar rengörs på samma sätt eller vagndiskdesinfektor eller liknande utrustning används.

Delar byts ut vid behov.


Miljö och källsortering

Sits, handtag fotpall skickas till förbränning eller återvinning

Metalldelar skrotas

För mer information se www.svancare.se eller kontakta Svan Care

Användning

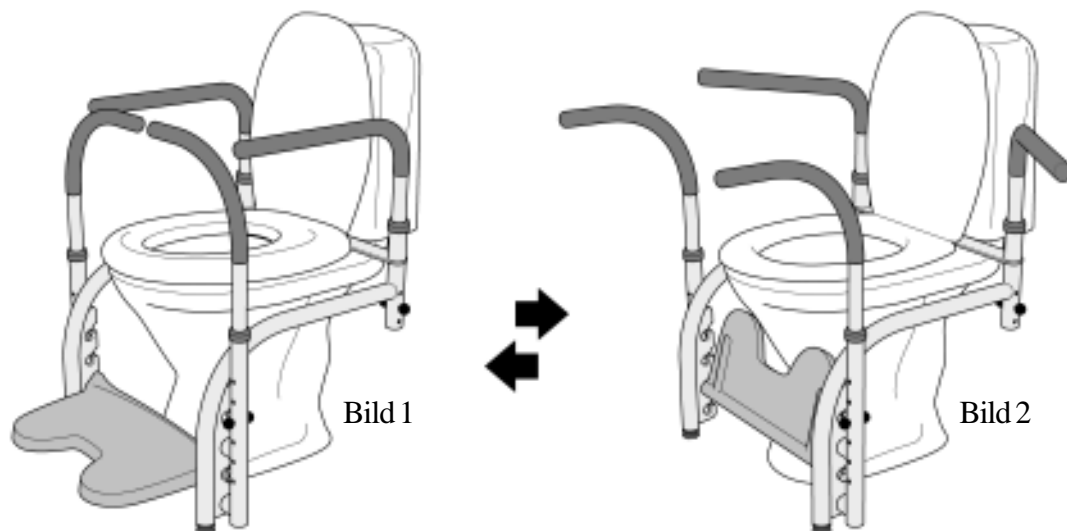



Montering

2 Montera fast den medföljande toalettsitsen så att denna håller fast benställningen.

4 Placera armstöden på dess plats. Justera höjden på armstöden till någon av de 3 lägena.

1 Placera benställningen på/över toaletten

3 Om stödhandtag medföljer monteras dessa på någon av de lediga krokarna, samma krok fotpallen sitter på. Dra åt bultarna med den medföljande nyckeln.

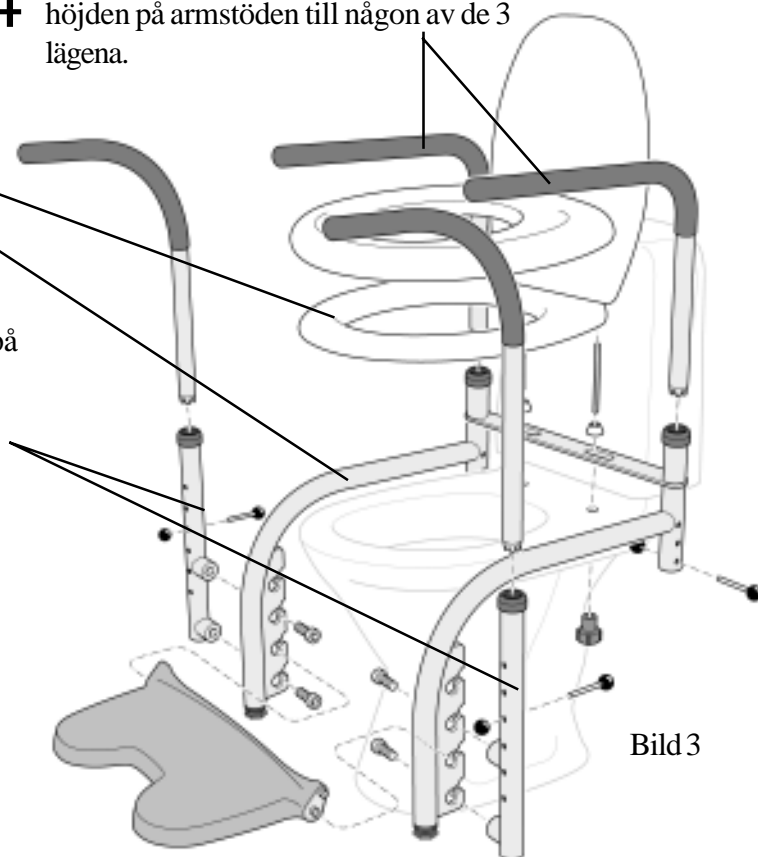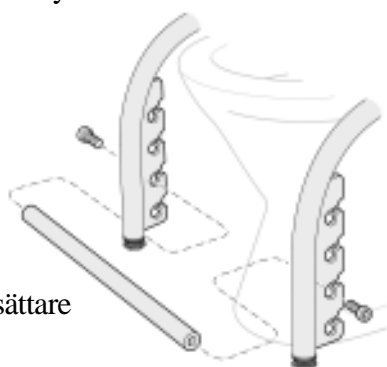

5 Kroka fast fotpallen på lämplig höjd. Om fotpallersättare skall användas monteras den i översta läget. Dra fast den med den medföljande nyckeln

