



medemagruppen



Bruksanvisning Neptune

INNHold

Innledning	2
Mål og nyttig informasjon	3
Informasjon om trekk og hvordan trekket fjernes	3
Betjening av låsespaker	4
Komponenter i setesystemet	4
Bruk av spak – bruke fjærbelastede låsepinner	5
Her finner du etiketten med serienummeret	5
Bruke bremsene (inneunderstell)	5
Viktige sikkerhetsråd	6
Viktige sikkerhetsråd (ekstrautstyr)	7
Viktig – feste Neptune-hoftebeltet	7
Viktig – justere brystselen	8
Viktig – sikkerhet ved bruk av hoftebeltet	9
Justere setedybden	10
Justere ryggvinkelen	10
Justere rygghøyden	11
Justere sacrumstøtten	11
Feste bord	12
Justere armlenene	12
Justere sidestøttene	13
Justere hodestøtten	13
Justere hoftebeltet	14
Justere abduksjonsklossen	14
Justere benstøtten, fotplaten og fotfikseringen	15
Rengjøring og vedlikehold	16
Generelt vedlikehold	16
Service utført av godkjent reparatør	17
Garanti	18
Servicelogg	18
Inspeksjon og godkjenning av utstyr for resirkulering	19

Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om setesystemet Neptune, hvordan du bruker systemet på en sikker måte og får mest mulig ut av det. Les all informasjonen i denne bruksanvisningen før du bruker stolen, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse. Påse at alle som bruker stolen, er kjent med innholdet i bruksanvisningen og vet hvordan de skal bruke utstyret på en sikker måte.

Bruksanvisningen viser fagfolk hvordan setesystemet stilles inn og justeres, men den inneholder også informasjon om hvordan setesystemet skal brukes, vedlikeholdes, kontrolleres og monteres av alle som bruker systemet.

Utstyret skal alltid leveres av kvalifiserte fagfolk som har justert og testet utstyret og kontrollert at det er i overensstemmelse med eventuelle krav og forskrifter .

Setesystemet skal bare justeres av kvalifiserte fagfolk og personer som har fått tilstrekkelig opplæring. Hvis du vil ha mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss. All kontaktinformasjon står oppført på baksiden av bruksanvisningen.

Mål og nyttig informasjon

NEPTUNE (mm)	STR. 1		STR. 2	
	Min	Maks	Min	Maks
Setedybde	200	325	325	450
Sete til øverst på rygg	325	450	425	575
Bredde ved hofter	165	325	265	425
Bredde ved bryst	150	270	225	345
Sete til fotplate	130	290	260	420
Seteenhetens vekt	10 kg		13 kg	

UNDERSTELL	Sete til gulv		Tilt
	Min.	Maks.	
Kompakt understell	240 mm	540 mm	-15°/25°

Informasjon om trekk og hvordan trekket fjernes

Alle trekk er utstyrt med trykknapper eller glidelåser, slik at du kan ta dem av eller skifte dem ut etter behov.

Betjening av låsespaker

Effektiv betjening av låsespaker (når de er montert)


Disse spakene må aldri fjernes helt, da det vil hindre deg i å gjøre justeringer i fremtiden.

- **Slik bruker du dem:** Vri spaken med klokken for å stramme og mot klokken for å løsne.
- **Slik bruker du spaken når det oppstår en blokkering:** Dra håndtaket på spaken utover, mot deg (A). Nå er spaken ute av funksjon.
- Hold spaken ute mens du stiller håndtaket på spaken i en ny posisjon utenom blokkeringen.
- Slipp håndtaket, slik at spaken fungerer igjen (B), og fortsett å stramme eller løsne på vanlig måte.
- Gjenta denne fremgangsmåten når du ikke får gjøre justeringer på grunn av en blokkering.



Komponenter i setesystemet

- A. Sidestøtter
- B. Hofteputer
- C. Fotstøtte
- D. Svinghjul (kompakt understell)
- E. Kompakt understell
- F. Hull til feste av brett
- G. Sacrumstøtte
- H. Armlene

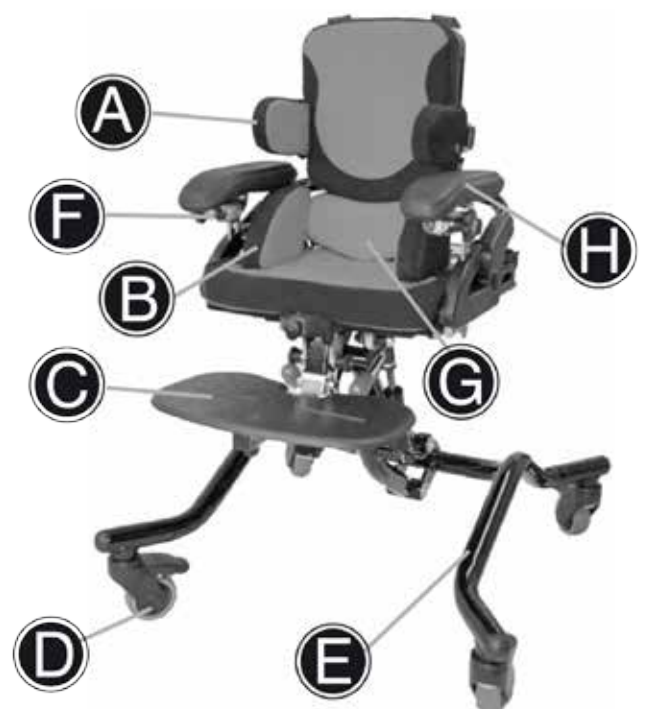

Bruk av spak – bruke fjærbelastede låsepinner


Bruke de fjærbelastede låsepinnene (bare låsevarianten)

- Hvis du vil sette låsepinnene i åpen posisjon, strekker du dem så langt ut som mulig og vrir dem en halv omdreining mot klokken (B). Dette setter dem i en åpen posisjon (C).

- Du lukker ved å vri låsepinnene en halv omdreining med klokken. Da klikker de på plass i låst posisjon (A).



LÅST

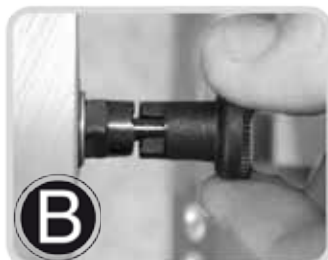

VRI




ÅPEN

Her finner du etiketten med serienummeret

Serienummer

Serienummeret er plassert under seteputen på baksiden av setet. (Dra seteputen opp ved å løsne trykknappene på hver side.)

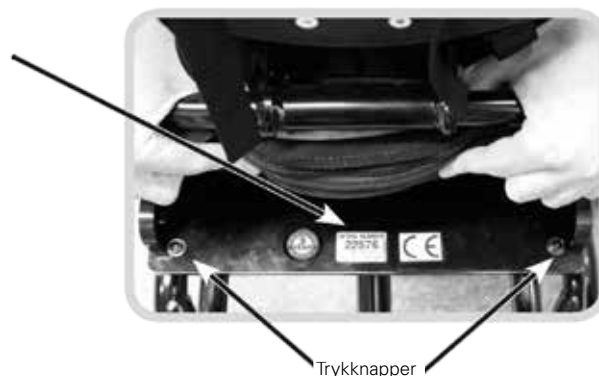

Trykknapper


Bruke bremsene (inneunderstell)

Bruke bremsene

Trykk ned spaken (A) med foten. Sørg for at stolen står trygt ved å trykke ned alle bremsene som er montert på hjulene på understellet.

Ta av bremsene

Når du skal ta av bremsene, slår du spaken (A) opp med tuppen av foten. Når alle bremsene er av, er stolen fri til å bevege seg i alle retninger.

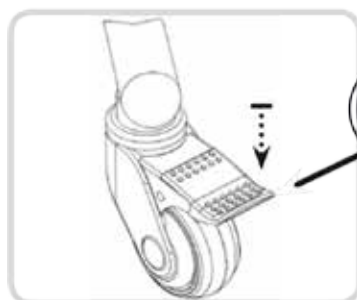

Ta alltid på bremsene når stolen skal stå i ro.

Viktige sikkerhetsråd



JCM streber etter å produsere produkter som holder aller høyeste standard. Alle produktene våre oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og miljøkravene definert i EUs direktiver. Feil bruk av produktene kan imidlertid utsette brukerne for risiko, og derfor anbefaler JCM på det sterkeste at følgende informasjon følges strengt til enhver tid.

Gjennom hele bruksanvisningen er viktig informasjon markert med følgende symbol:

- Sørg for at alle justeringsmekanismer er godt festet før bruk. Hvis rattskruene med stor sannsynlighet vil bli løstnet gjentatte ganger, kan JCM levere unbrakoskruer i stedet. Vi anbefaler dette sterkt hvis de som er i nærheten av brukeren, representerer en risiko.
- Når du har fullført eventuelle justeringer, må du PÅSE at alle muttere, skruer, knotter, rattskruer og andre feste anordninger er godt festet, og at de regelmessig kontrolleres som en del av vedlikeholdet av stolen. Du må aldri justere eller stramme bevegelige deler for mye.
- Alle støttestropper og -seler skal være på plass og tilpasset brukeren før seteenheten tas i bruk (se side 8 og 9).
- Når Neptune-stolen er festet på et inneunderstell, skal den alltid være plassert på et jevnt, flatt gulv. Neptune-stolen kan flyttes mellom forskjellige arbeidsområder. Av sikkerhetshensyn skal produktet ALLTID tilbakestilles til en nøytral posisjon og senkes før det flyttes (senk høyden, still setet i vater, påse at ryggen er oppreist osv.). Når stolen er flyttet, og når den er i bruk, skal den stå i en statisk posisjon med bremsene på. Inneunderstell som det kompakte understellet er utformet til innendørs bruk, men kan tas ut en kort periode hvis stolen flyttes fra et innendørsområde til et annet.
- Tunge gjenstander på bordet vil påvirke stabiliteten.
- Hvis barnets hud er rød etter at vedkommende har vært ute av setesystemet i ca. 10 minutter, må du umiddelbart ta kontakt med fagfolkene som leverte utstyret. Dette kan være et tegn på at setet utøver et overdrevent trykk på barnet. Dette kan oppstå den første tiden et nytt sete tas i bruk, og da kan det være behov for flere justeringer. Det kan også oppstå når barnet ikke har vært tilfredsstillende plassert, når hun/han har vokst, eller når det foreligger et underliggende medisinsk problem. I slike tilfeller kan det være nødvendig med en kontroll.
- Hold alle produkter unna kraftige varmekilder, sigaretter og åpne flammer.
- Hvis du mistenker at det kan være en feil i systemet, må du slutte å bruke det med en gang og umiddelbart kontakte organisasjonen som leverte systemet.
- Utstyret vil være merket med viktig informasjon. Disse etikettene må ALDRI FJERNES, tildekkes, endres eller gjøres uleselige.

Viktige sikkerhetsråd (ekstrautstyr)



Multijusterbar hodestøtte

Vingene på hodestøttene er som standard innstilt på 45 grader. Vingene må IKKE føres for tett inntil hodet. Påse at hodestøtten er montert slik at barnet ikke kan kaste hodet rundt vingene og sette seg fast.

Flexi-støtter og sidestøtter

Påse at stroppene ikke presser mot eventuelle ernæringssonder barnet måtte være tilkoblet.

Abduksjonskloss

Abduksjonsklossen er utformet for å trekke brukernes knær fra hverandre slik at hoftestillingen blir god. Abduksjonsklossen må IKKE brukes som et redskap til å feste barnet til setet. Fjern abduksjonsklossen når barnet plasseres i og tas ut av setet.

Fotfiksering og stropper

Dette utstyret bør bare festes når brukeren går med sko eller støvler.


Bord

Bordet må IKKE brukes som et redskap til å feste barnet til stolen. Påse alltid at hoftebeltet og andre belter som følger med, brukes. Kontroller at bordklipsene er festet på begge sider av bordet. Hvis bordet er skadet, må du kontrollere at dette ikke vil utgjøre noen fare for barnet. La det aldri stå varme gjenstander på bordet mens barnet er uten tilsyn.

Viktig – feste Neptune-hoftebeltet



Neptune er som standard utstyrt med spenner som kan brukes til enten 2- eller 4-punkts hoftebelter. De primære festeanordningene (A) er plassert på begge sider bak på stolen. De sekundære festeanordningene (B) er plassert på begge sider under stolen foran.

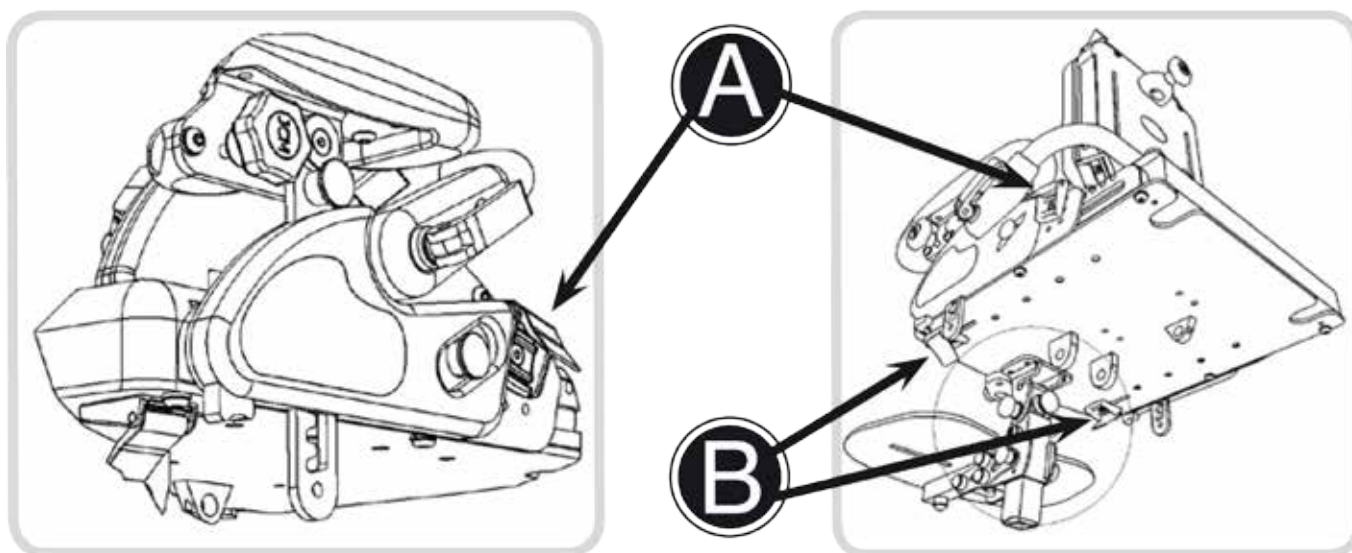

Viktig – justere brystselen



Utvis **STOR FORSIKTIGHET** når du fester brystselen, og overhold alltid følgende:

- Stroppene på selen må aldri kunne bevege seg nær eller på noen måte blokkere eller stramme mot barnets hals.
- Stroppene må aldri strammes for hardt.
- Brystbælingsstroppen på brystselen skal alltid justeres før bruk for å sikre at den ikke ligger høyere enn midten av barnets bryst.
- Ved bruk av sele skal et hoftebelte alltid benyttes for å sikre at barnet ikke kan skli ned på brystbælingsstroppen.
- Kontroller alltid at beltene gir barnet både komfort og støtte. Hvis barnets klær justeres (hvis f.eks. en genser tas av), bør stroppene justeres tilsvarende.



Feste selen til stolen

Stroppene øverst på selen skal festes til rammen på seteryggen. Neptune har et festepunkt øverst på begge sider av seteryggen der du kan feste stropper og seler.

Stroppene nederst på selen skal festes til spennene under rammen på seteryggen, eller til en spenne som er plassert et annet sted og gjør det mulig å dra den nedre stroppen i rett retning.



Feste beltene

- Tre stoffbeltet gjennom spennen på stroppen.
- Beltene bør dras så langt gjennom til at de gir barnet god støtte samtidig som det har det komfortabelt.
- Når dette er oppnådd, kan spennen kneppes igjen slik at stroppen festes på plass.



Sikkerhetsforanstaltningene over skal følges ved bruk av alle former for seler/stropper som støtter overkroppen, eller Flexi-støtter med stropper.



Hvis det er noen som helst sjanse for at barnet kan få stroppene rundt halsen, må **SELENE FJERNES UMIDDELBART.**



Hvis hoftebeltene festes feil, kan brukeren utsettes for alvorlig fare. Ved bruk av hoftebelter anbefaler vi at du alltid overholder følgende:

Feste hoftebeltet

Hoftebeltets festevinkel har direkte innvirkning på bekkenet .

Faktorer å ta hensyn til:

- Hvis hoftebeltet er festet til setelisten i en 60° festevinkel, plasseres beltet foran og lavere enn fremre hofte-spiss (ASIS). Dette reduserer tendensen brukere med bakre bekkenhelling har til å gli under beltet.
- Festes de primære stroppene med en større feste vinkel, fremmes en bakre bekkenhelling, noe som er til hjelp for brukere med fremre bekkenhelling.
- De sekundære stroppene på et 4-punkts hoftebelte festes til setefoten mellom 45° og 90° for å holde den primære polstrede stroppen på plass, og for å hindre at beltet glir inn i magen eller vrir seg.
- Det kan være tilfeller der det er nødvendig å velge en annen festevinkel, for eksempel for å ta hensyn til sår i bekkenområdet, ustabile hofteledd eller magesonder.

Stramme beltet

Stram beltets justeringsstropper når du fester det og under daglig bruk for å sikre korrekt plassering av

puten. Når det gjelder polstrede hoftebelter, skal putene være i berøring med barnet når de er korrekt strammet. Det er viktig at omsorgsgiver får opplæring i korrekt justering av hoftebeltet.


Størrelsesjustering

Mål hoftebredden for å finne ut hvilken beltestørrelse som kreves. Vi foreslår at du måler hoftebredden fra trochanter til trochanter. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du måle fra fremre hofte-spiss til fremre hofte-spiss og legge til et par centimeter . Når beltestørrelsen er korrekt, dekkles alle fremskytende ben.

- Kontroller alltid at barnets bekken er symmetrisk og godt plassert mot seteryggen.
- Påse alltid at hoftebeltet og brystselen holder barnet godt festet og er komfortabelt for barnet. Kontroller at de sitter godt. En enkel tommelfingerringel er å legge to fingre mellom beltet og barnets kropp.
- La aldri et barn sitte i en stol uten tilsyn uten at hoftebeltet er festet.
- Ved bruk av sele skal det alltid benyttes et hoftebelte.
- Når vinkelen mellom setet og seteryggen endres, må brystselen og hoftebeltet alltid justeres tilsvarende for å sikre at alle sikkerhetsanbefalingene blir fulgt.

Plassering av selen og hoftebeltet

Denne skjematisk fremstillingen viser den anbefalte plasseringen av brystselen og hoftebeltet:

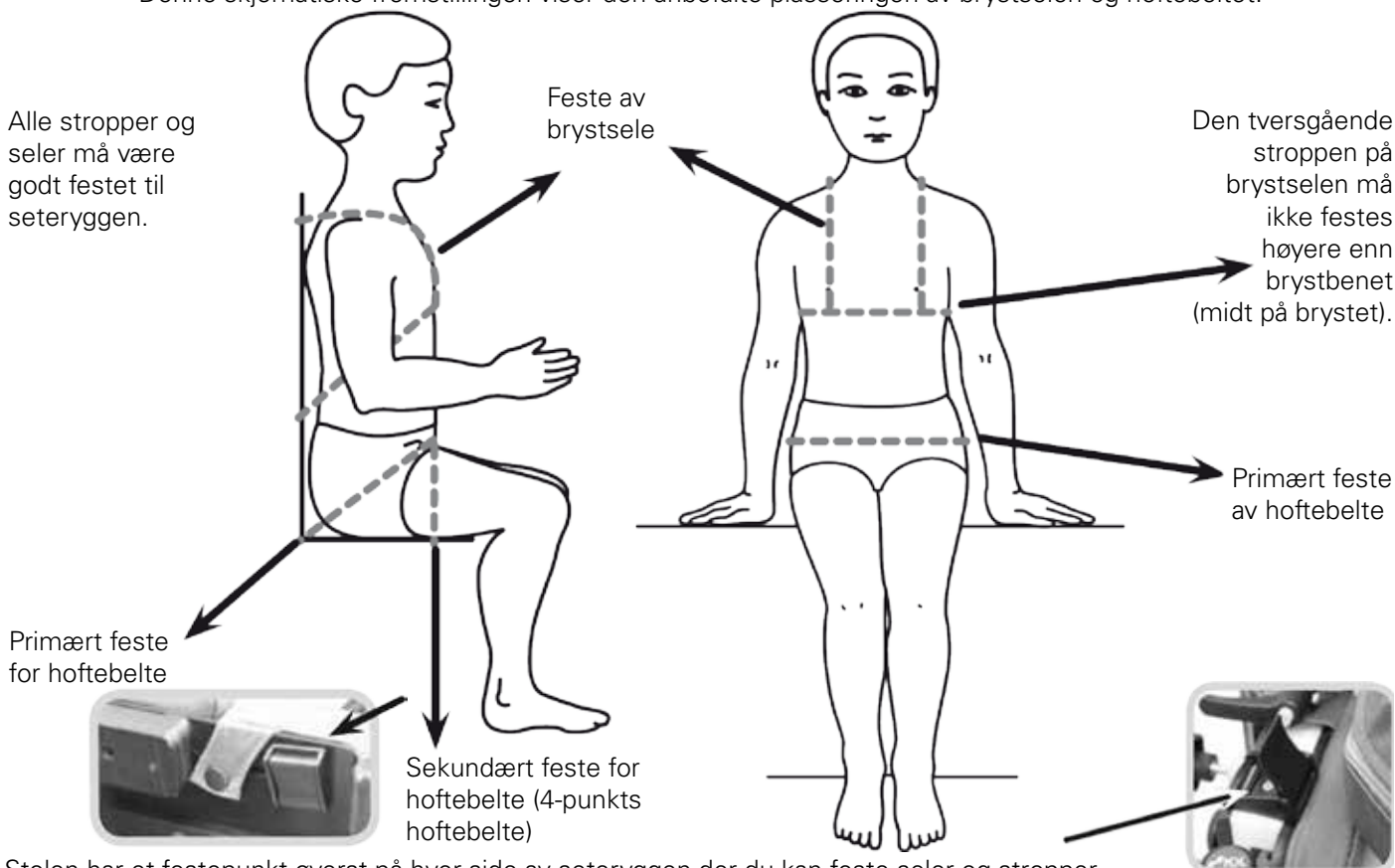

Stolen har et festepunkt øverst på hver side av seteryggen der du kan feste seler og stropper.


Justere setedybden

- Trekk ut de fjærbelastede låsepinnene (A) på begge sider av setet.
- Skyv setet inn eller ut for å endre lengden.
- Slipp låsepinnene, og fortsett å skyve til rammen låses på plass.

Tips!

Hvis du vil øke setedybden, er det best å stå bak stolen med bremsene på, og dra rammen på seteryggen mot deg.


Hvis du vil redusere dybden på setet, gjør du det samme mens du står foran stolen.

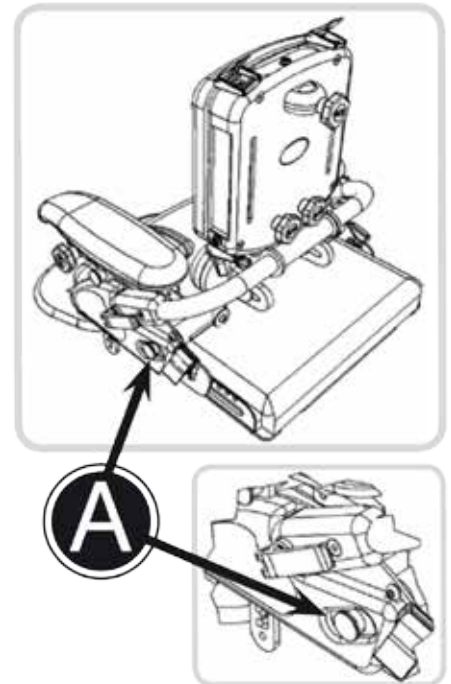

Når du har justert setelengden, må du alltid påse at disse punktene er godt festet og kontrollert som en del av vedlikeholdet av stolen.

Justere ryggvinkelen


- Løsne spakene (A) på begge sider av stolen, og vipp ryggen bakover til ønsket posisjon ved å dra opp eller skyve ned stangen (B).
- (Ryggen klikker på plass mens du endrer vinkelen.)
- Når ønsket vinkel er nådd, strammer du til spakene slik at ryggen festes på plass.

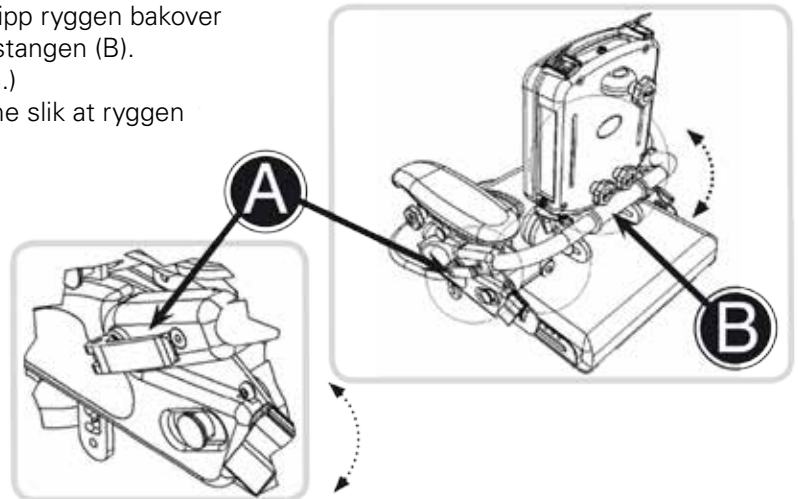

Påse alltid at ryggen er festet, og at spakene er strammet til før stolen tas i bruk.

Justere rygghøyden

- Løsne de to rattskruene (A) på ryggens plastpanel en halv omdreining*.
- Skyv plastpanelet opp eller ned til ønsket høyde.
- Stram til de to rattskruene slik at de festes på plass.

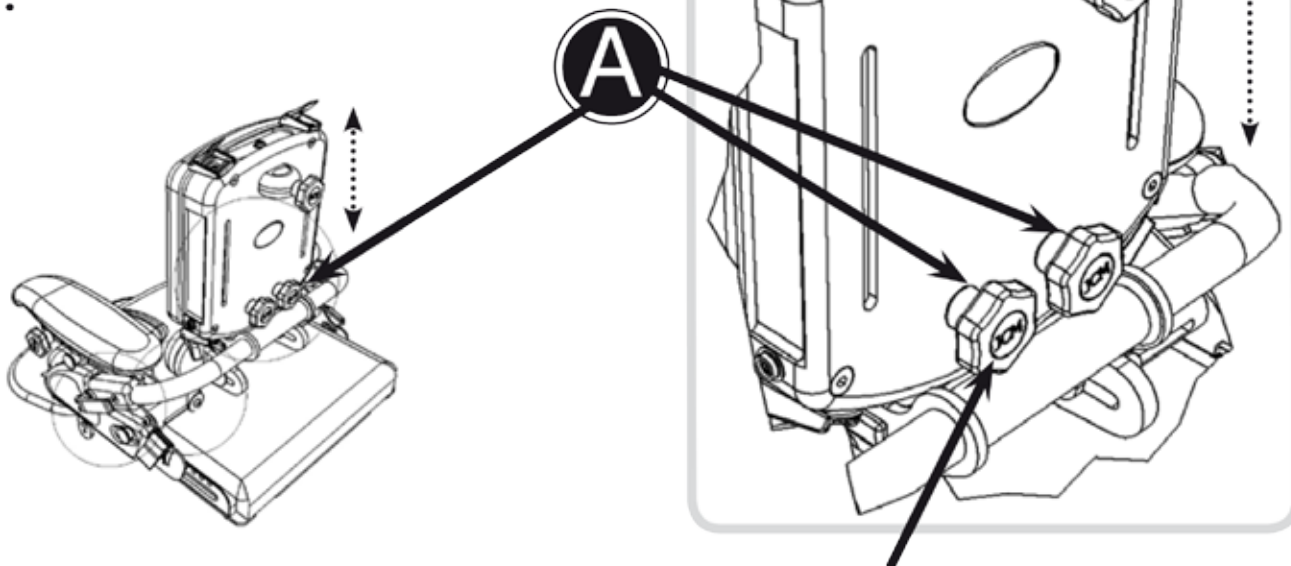


* Kan erstattes med skruer som krever en 4 mm unbrakonøkkel (følger med).

Justere sacrumstøtte


Putehøyde

- Dra den polstrede puten bort fra rammen.
- Løsne unbrakoskruene (A) en halv omdreining med den medfølgende unbrakonøkkelen (4 mm).
- Beveg sacrumstøtte opp eller ned i justeringssporet.
- Når sacrumstøtte står i ønsket høyde, strammer du til skruene (A) igjen.

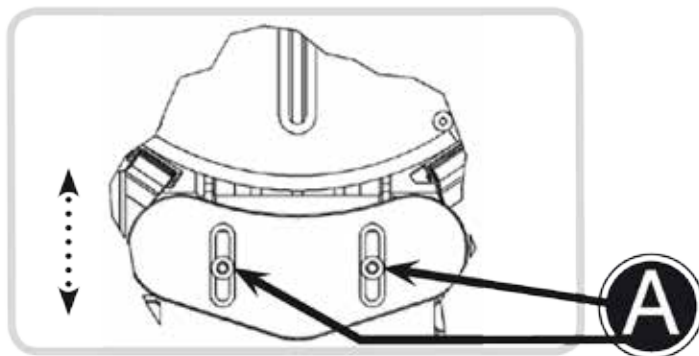

Rotere putevinkelen / forover og bakover

- Løsne unbrakoskruene (B) på hver side av stolen, og vipp puten varsomt opp eller ned og flytt den forover eller bakover for å stille inn sacrumstøtte i ønsket posisjon.
- Når puten står i ønsket posisjon, strammer du til unbrakoskruene igjen.

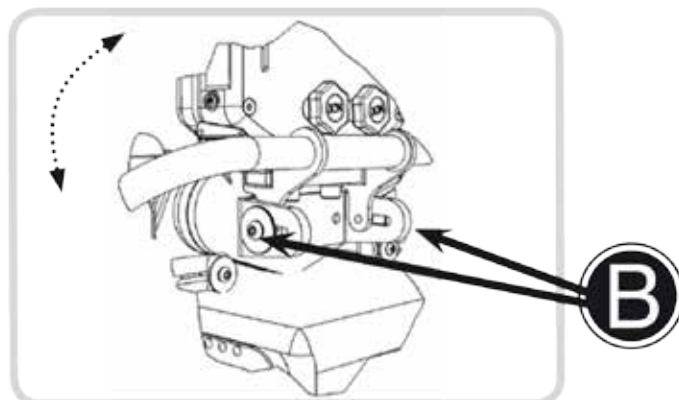


Justere armlenene

Justere høyden på armene

(A) viser hvilken knapp som brukes til å justere høyden på armene og følgelig også høyden på brettet.


- Trykk og hold nede knapp (A), og hev eller senk armen. Slipp knappen for å låse armen på plass.

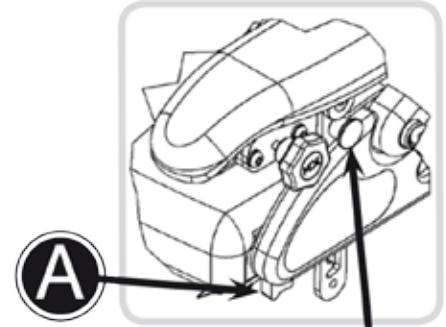

Justere armvinkelen

Armene på Neptune-stolen kan stilles inn i flere ulike vinkler, og det er mulig å holde brettet plant uavhengig av stolens vinkel.

- Dra den fjærbelastede låsepinnen (B) utover, bort fra armen.
- Hold låsepinnen åpen, og vipp armen opp eller ned til ønsket vinkel.
- Når du har nådd ønsket vinkel, låser du armen på plass ved å slippe låsepinnen. Kontroller at den er festet på plass igjen.



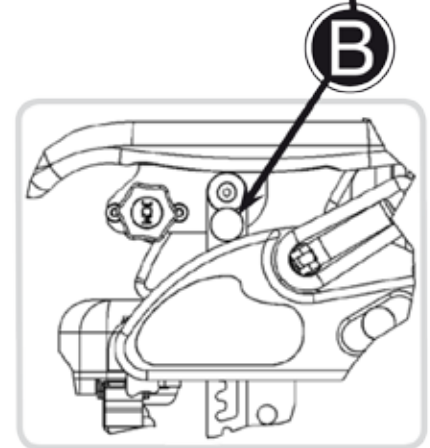


Låsepinnen (B) skal kunne trekkes ut uten motstand. Hvis du kjenner noe motstand, passer du på at arm-lenet ikke utsettes for belastning.

Tips! Bruk setehellingen til å finjustere sittestillingen

Feste bordet

- Kontroller først at begge armene på stolen er i samme høyde.
- Still armene på bordet på linje med hullene på stolarmene.
- Skyv begge armene på bordet gjennom de relevante hullene til ønsket posisjon nås.
- Fest bordet på begge sider med rattskruene på siden av stolarmene. (Ikke stram for hardt.)

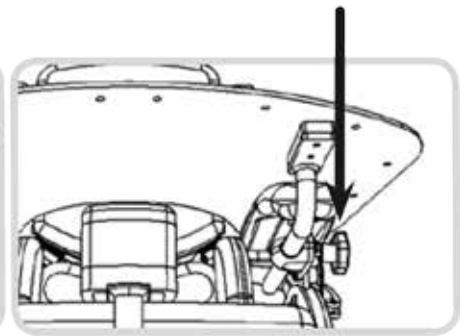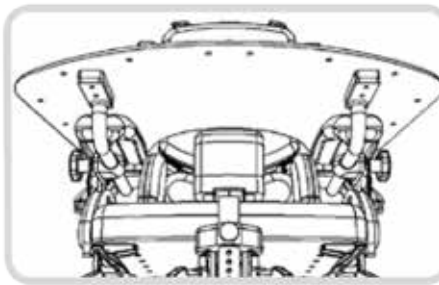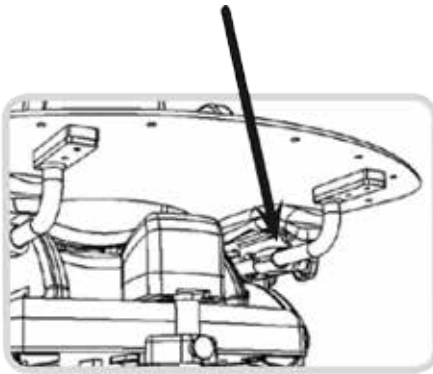


Påse alltid at armene er festet på plass, og at bordet er festet før barnet etterlates uten tilsyn. La det aldri ligge noe varmt på bordet når barnet er uten tilsyn.

Justere sidestøtten

Justere høyden og bredden på støttene

- Løsne begge skruene (A) en halv omdreining med den medfølgende unbrakonøkkelen (4 mm).
- Skyv putene opp eller ned langs sporet på seteryggen (B) for å justere høyden, og utover for å stille inn bredden og/eller vinkelen.
- Stram til skruene igjen for å feste støttene.

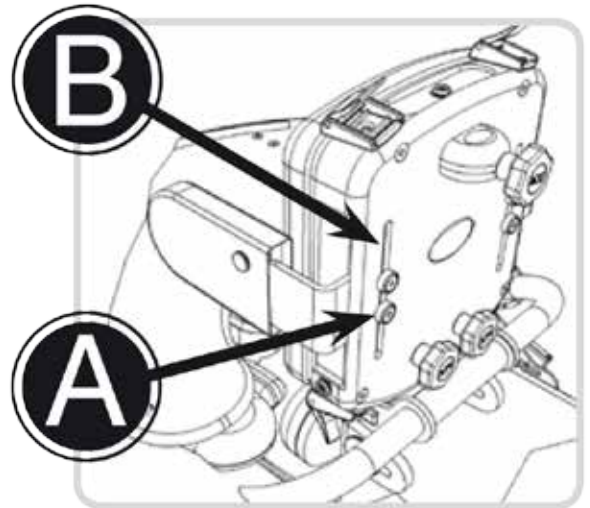

Kontroller at støttene ikke kommer for høyt opp under barnets armer eller er for stramme rundt brystområdet ved å la fingrene gli langs innsiden av støttene. Kontroller også at støttene ikke presser mot eventuelle ernæringssonder.


Justere hodestøtten

Justere vingevinkelen

Justeringspunktet (A) lar deg bevege vingen slik at den gir mer støtte til hodet.

- Åpne glidelåsen på baksiden, og løsne unbrakoskruene (A) med den medfølgende unbrakonøkkelen (4 mm).
- Juster sidene på hodestøtten til ønsket posisjon.
- Når ønsket vinkel er oppnådd, strammer du til skruene igjen.

Gjør dette for hver sidevinge på hodestøtten.

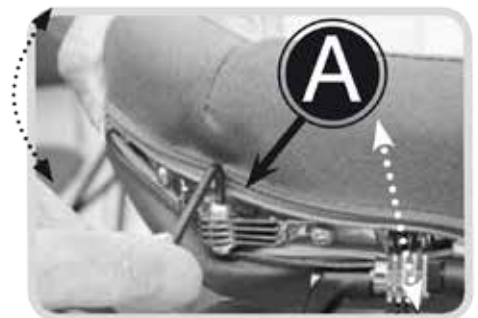

Justere vinkelen på hodestøtten

- Justeringspunktene (B) lar deg justere vinkelen på hodestøtten for å støtte hode og nakke.
- Spakene (B) bør betjenes samtidig for å oppnå ønsket hodestøttevinkel. Løsne spakene ved å vri dem mot klokken.
- Når de er løse, kan hodestøttevinkelen justeres manuelt til den passer barnet.
- Stram til spakene igjen. Justere høyden på hodestøtten



Justering av høyden på hodestøtten

- Løsne rattskruen (C).
- Skyv hodestøtten opp eller ned i braketten på baksiden av stolryggen.
- Stram til rattskruen igjen.




Kontroller alltid at hodestøtten er festet, og at vingene ikke er for stramme rundt hodet. Hodestøttevingene er som standard innstilt på 45 grader i forhold til ryggen.

Justere hoftebeltet

Justere bredden på hofteputen

- Løsne unbrakoskruen (A) en halv omdreining med den medfølgende unbrakonøkkelen (4 mm). Skyv deretter hofteputen langs hofteputestangen (B) for å stille inn ønsket bredde.
- Stram til unbrakoskruen (A) igjen for å feste puten på plass.

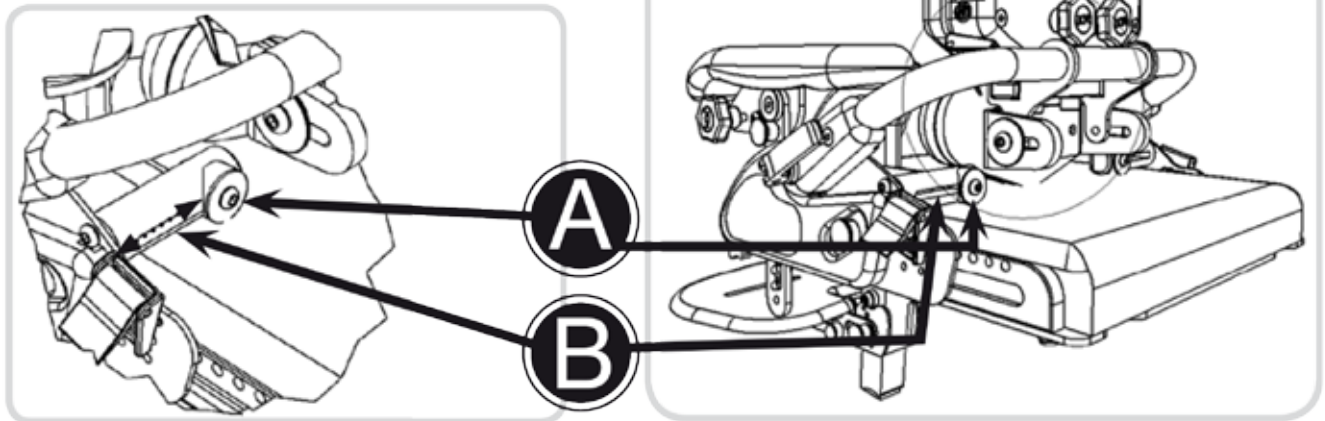


Justere abduksjonsklossen

Høyde

Merk:

Disse anvisningene kan du også bruke hvis du vil fjerne abduksjonsklossen.

- Dra og hold ute den fjærbelastede låsepinnen (A) samtidig som du beveger abduksjonsklossen opp eller ned til ønsket høyde.
- Slipp låsepinnen (A) mens du setter den inn i et av hullene i (B) i søylen for abduksjonsklossen. Påse alltid at låsepinnene er festet på plass før bruk. (Abduksjonsklossen kan også fjernes på denne måten.)

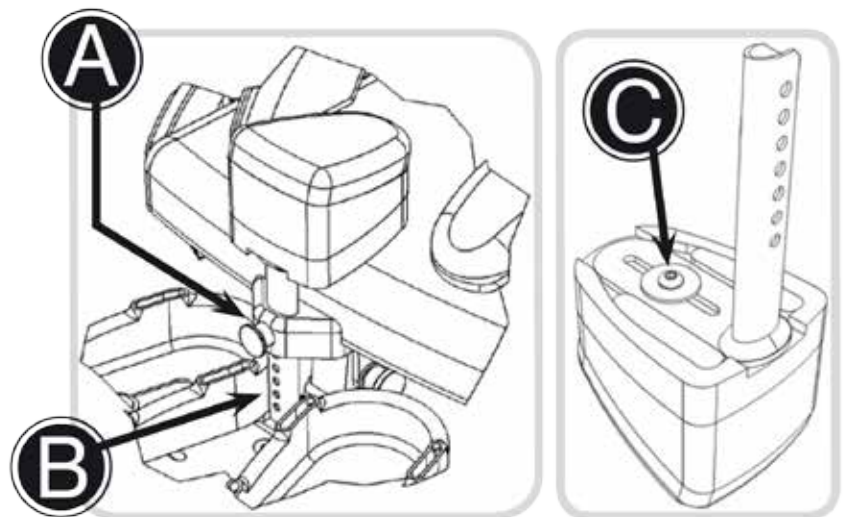

Forover og bakover

- Løsne unbrakoskruen (C), og beveg abduksjonsklossen langs sporet i metallbraketten for klossen.
- Stram til unbrakoskruen (C) igjen.


Tips!

Du kan gjøre større justeringer forover og bakover ved å fjerne skruen (C) helt og deretter demontere klossen fra metallet, rotere metallet 180°, feste klossen på igjen og stramme til skruen (C) igjen.

Justere benstøtten, fotplaten og fotfikseringen

Feste/fjerne benstøtten

- Dra og åpne den fjærbelastede låsepinnen A1 (ved å rotere 90°) (på høyre side av setet mens du ser på stolen).
- Dra og hold låsepinnen A2 (på venstre side av setet mens du se på stolen) åpen, slik at du kan løsne benstøtten fra hovedseteenheten.

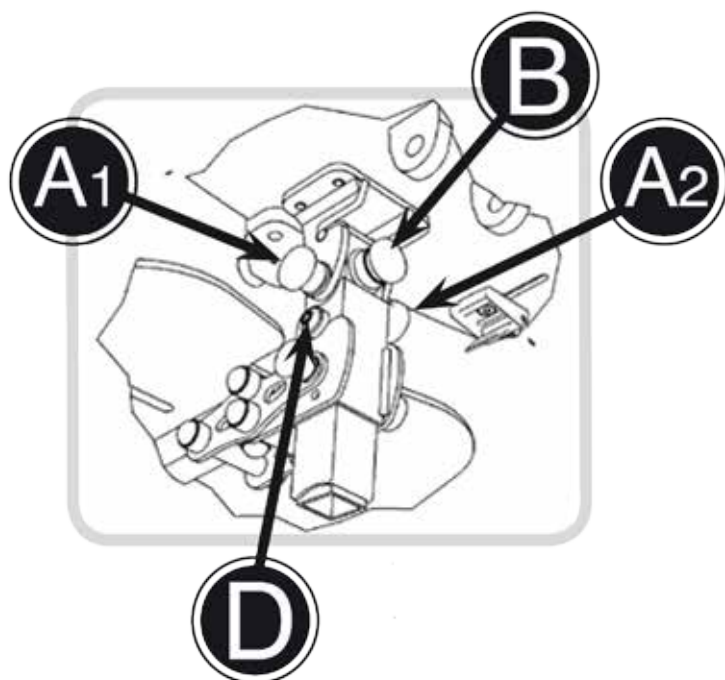


Justere lengden på benstøtten (tre innstillinger)

- Hold låsepinnen (B) på baksiden av benstøttefoten åpen, og slipp den inn i et av de andre hullene på benstøttefoten. Fotplatevinkel / sammenslåing av fotplaten
- Hold ut låsepinnene (C) på hver side av stolen, og slipp låsepinnene inn det aktuelle hullet for å feste fotplaten.
- Fotplaten kan slås opp manuelt for å gi bedre plass ved stående forflyttinger osv.

Justere høyden/lengden på fotplaten

- Løsne skruen (D) en halv omdreining med den medfølgende unbrakonøkkelen (4 mm), slik at du kan skyve fotplaten opp og ned benstøttefoten.
- Merk: Hvis du ønsker kortest mulig lengde, hever du fotplaten og fester den så høyt oppe på benstøttefoten som mulig.

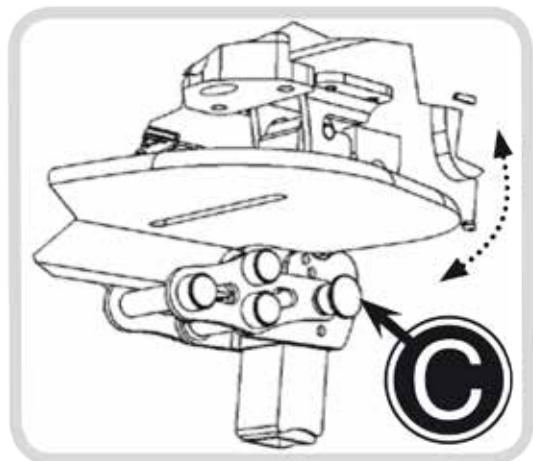


Feste fotfiksering

- Løsne den midtre unbrakoskruen under fotplaten mot klokken.

- Roter fotfikseringen til ønsket posisjon langs sporet (E).
- Fest fotfikseringen ved å stramme til unbrakoskruen under fotplaten igjen.

Fotstropper

Fotstroppene eller ankelstøttene kan festes gjennom sporene i fotfikseringen for å sikre føttene. Tre stroppen gjennom spennen, og lukk spennen. Det finnes også fastspenningsutstyr som gjør det mulig å feste ankelstøttene direkte til fotplaten.

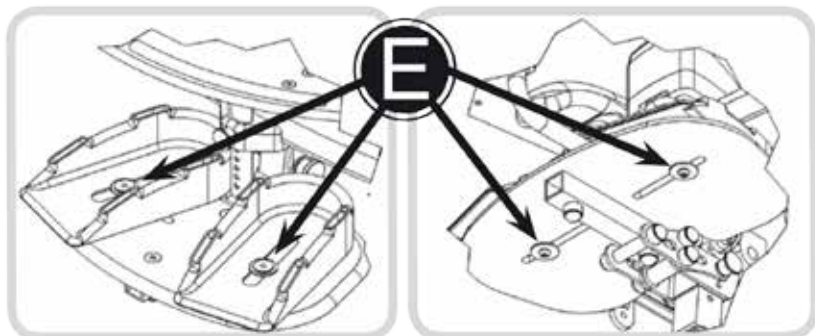

Ikke bruk fotstropper med mindre barnet går med sko.

Rengjøring og vedlikehold

Vi anbefaler følgende punkter for vellykket rengjøring av utstyret. (Det kan oppstå skrukker på overflaten etter at du har fulgt disse prosedyrene.)

Pleie av stofftrekk

Trekkene er avtagbare og vaskes på 40°.

Trekkene vaskes med utsiden ut og lukket igjen.

Metallrammen

- Hvis alt trekket fjernes fra metallrammen, kan rammen rengjøres med varmt vann tilsatt et rengjøringsmiddel, eller den kan damprens. (Etiketter må kanskje erstattes etter damprens.)
- Påse at rammen er ordentlig tørr etter rengjøring.
- Påse alltid at alle bevegelige eller justerbare deler smøres inn på nytt.

Generelt vedlikehold



Generelt vedlikehold bør utføres av kvalifiserte fagfolk som har kunnskap om hvordan utstyret brukes (se side 18 i garantien). Personen som utfører vedlikeholdskontrollen eller utfører service, bør alltid fylle ut servicelogen (side 18) for å sikre at garantien fortsatt er gyldig

Graden av vedlikehold avhengig av ulike faktorer knyttet til bruken av produktet. I tillegg til anbefalingene om funksjonelle justeringer i denne bruksanvisningen må en grundig inspeksjon av følgende punkter gjennomføres med høyst 6 måneders mellomrom: (Punktene nedenfor er felles for hele JCM-sortimentet og gjelder ikke alle produkter.)

Svinghjul	<ul style="list-style-type: none">• Løft understellet, og kontroller hvert hjul for å sikre at det ikke er skadd, løst eller slitt.
Bremser	<ul style="list-style-type: none">• Fjern eventuelt fett eller smuss som har samlet seg på hjulene, og kontroller at bremsene hindrer hjulene i gå rundt.• Kontroller at de er ordentlig festet, og at det ikke er tegn til slitasje.
Skyvehåndtak	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at håndtakene fungerer som de skal.• Kontroller at det ikke er tegn til skade eller slitasje.• Kontroller at grepene på skyvehåndtakene er festet.
Setetilt	<ul style="list-style-type: none">• Løsne hellingslåsen, og kontroller at det er fri bevegelse uten tegn til skade eller slitasje på mekanismen, spaken eller kablene.• Stram til låsen, og påse at den holder seteinkelen.
Justering av understellets høyde	<ul style="list-style-type: none">• La setet være uten last, trykk på spaken, og kontroller at den beveger seg fritt til maks høyde.• Legg til vekt trinnvis opp til maksimum belastning (40, 60, 80 eller 100 kg), og kontroller, i en periode på ca. 10–15 minutter, at det ikke er noe langsom bevegelse (senking) av setet. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre denne testen, bør den statiske posisjonen til setet som et minstekrav overvåkes mens en bruker er plassert i systemet, rett etter vedlikeholdskontrollen.• Med last i setet trykker du spaken ned og kontrollerer at setet beveger seg fritt til laveste posisjon.
Sete-/ryggtrekk	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at festepunktene på sete- og ryggtrekket er stramme.• Se etter slitt trekk. Trekk som er veldig slitt, kan forårsake ubehag, vil være vanskelig å holde hygienisk rent, og kan forårsake hudirritasjon.
Forbindelsesledd	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det ikke er noe tegn til skade eller slitasje.• Kontroller at funksjonen fester seteenheten skikkelig.
Ramme Med riktig vedlikehold bør rammen gi minst 5 års problemfri bruk, men avhengig av bruksforholdene, vil det oppstå slitasje, og en grundig inspeksjon anbefales.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller alle metalleder for å sikre at det ikke er tegn til skade eller slitasje, og vær særlig oppmerksom på justerbare eller bevegelige deler.• Kontroller at det ikke er tegn til feil i skjøter og sveisesømmer.• Kontroller stramheten og sikkerheten ved alle festeanordninger, skruer, muttere, fjærbelastede pinner og andre avtakbare deler.• Se etter tegn til utmatingslitasje, og skift ut deler som viser tegn til slitasje, eller som gjentatte ganger løsner.• FESTEUNKTER (hvor aktuelt) til transport må kontrolleres for å sikre sikkerheten. Kontroller at det ikke er tegn til skade, slitasje eller feil.
Fastspenningsutstyr	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller armputer og hodestøtte, og skift dem ut hvis de er slitte.

Service utført av godkjent reparatør

Hva skal utføres ved en service?

Service omfatter både inspeksjon, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av slitte, feil eller manglende komponenter. Hvis brukeren har vokst eller fått andre behov siden den opprinnelige vurderingen, skal det tas hensyn til dette ved utføring av service.

Hva skjer hvis det oppdages en feil?

Hvis det oppdages feil som kan utgjøre en risiko for brukeren eller operatøren, skal all bruk av utstyret opphøre umiddelbart til produktet er reparert.

Hvem skal utføre service på produktet?

Det understrekes at bare en reparatør eller en person med tilstrekkelig opplæring innenfor medisinsk utstyr av klasse 1 skal utføre dette arbeidet.

Ingen modifikasjoner skal gjennomføres uten forhåndssamtykke av JCM Seating Solutions Ltd. Ikke-godkjente modifikasjoner kan utgjøre en risiko for brukere og ledsagere. Ikke-godkjente modifikasjoner vil dessuten gjøre garantien ugyldig.

Alle nye deler som er påkrevd, skal være originale deler godkjent av JCM Seating Solutions Ltd., tilpasset JCM-spesifikasjonene.

Servicefrekvens

JCM anbefaler at det utføres service på dette produktet jevnlig. Hvor ofte det må utføres inspeksjoner og service, er imidlertid avhengig av hvordan stolen brukes.

Hvis bruken overskrider mengden nevnt over, kan det hende det er nødvendig med service hver 6. uke eller oftere.

Slik bestiller du service

Ta kontakt med nærmeste NAV Hjelpemiddelsentral.

Garanti

De fleste av JCMs produkter dekkes av en 3-årig produsentgaranti.



Hva garantien dekker

Garantien dekker alle aspekter ved produktfeil som skyldes feil utførelse eller produksjon.

Garantiperioden

Garantien løper i 3 år fra produktets forsendelsesdato.

Arbeidet JCM plikter å utføre

Under denne garantien plikter JCM å skifte ut eller reparere defekte produkter kostnadsfritt innenfor garantiperioden.

Hva garantien ikke dekker

- Komponenter som er skadet eller har feil forårsaket av naturlig slitasje, ekstrem bruk, forsømmelse eller feil bruk.

- Utsiktet skade, modifikasjoner eller reparasjoner utført av en tredjepart som ikke er godkjent av JCM, eller av en ikke-medisinsk faglig representant for helsevesenet.

Kundens ansvar

For å sikre at garantien er gyldig, rådes kunden til å overholde og dokumentere retningslinjene i bruksanvisningen som gjelder service, vedlikehold og godkjenning av utstyr for resirkulering.

JCM vil kreve dokumentasjon på service (se nedenfor) ved eventuelle garantikrav eller bestillinger.

Når kunden fremsetter et krav, forbeholder JCM seg retten til å inspisere produktet og all nødvendig dokumentasjon.

Servicelogg

Denne loggen er et viktig register over bruk og vedlikehold av produktet. Den er et viktig verktøy som forutser behovet for ytterligere service og vedlikehold. Den skal fylles ut hver gang en inspeksjon, service eller annen betydelig endring har funnet sted. JCM Seating Solutions Ltd. vil kreve dokumentasjon på service ved eventuelle garantikrav eller bestillinger.

SERIENUMMER

LEVERINGSDATO

BATTERI BRUK INNEN DATO

____/____/____

____/____/____

DATO	SERVICE UTFØRT	ORGANISASJON	TRYKT NAVN OG UNDERSKRIFT

Inspeksjon og godkjenning av utstyr for resirkulering

De fleste produkter fra JCM Seating Solutions Ltd. vurderes individuelt for hver enkelt bruker før de godkjennes for resirkulering. De overleveres på en kontrollert måte for å sikre optimal tilpasning og optimale spesifikasjoner. Kontroller gjennomføres, og eventuelle muntlige instruksjoner videreformidles. Vi anbefaler derfor at følgende overholdes før utstyr godkjennes for resirkulering:

• Rengjøring

Rengjør produktet grundig for å dekontaminere produktet og eliminere sjansen for kryssinfeksjon.

• Vurdering av stoff/skum

Foreta en nøye vurdering av tilstanden til stoffet og skummet i seteproduktet, og skift disse ut delvis eller helt ved behov. Hvis understellet er slitt og setet er i dårlig stand, kan det være nødvendig å få produktet renoveret av produsenten. I svært alvorlige tilfeller, hvis understellet er svært slitt og setet er i dårlig stand, må produktet tas ut av drift og avhendes.

• Sette elektrisk og elektronisk utstyr ut av drift

Hvis produktet er montert med en elektrisk funksjon, må du alltid kontakte JCM eller en godkjent representant for å få informasjon om hvordan det settes ut av drift.

• Utstyrets egnethet

Kontroller at utstyret som leveres, er tilpasset brukerens behov, og ta alder, vekt, funksjonsevne, diagnose og andre viktige faktorer i betraktning. Produktene fra JCM Seating Solutions Ltd. er kanskje ikke egnet for personer med svært utfordrende atferdsmønstre. Påse også at grensene som er angitt for at produktet skal kunne brukes på en sikker måte, ikke overskrides av den nye brukeren. Salgsrepresentanten din kan gi deg råd om utstyrets egnethet.

• Bruksanvisninger og logger

Påse at denne bruksanvisningen og eventuelle andre bruksanvisninger for seteenheten overleveres til den nye brukeren sammen med utstyret, og påse at serviceloggene er oppdatert. Registrering av nye brukere må oppdateres for å opprettholde sporbarhet.

• Stand

Hjul, dekk og bremses må være i god stand, skikkelig justert, og dekkene må ha nok luft.

• Ekstraustyr

Kontroller alt ekstraustyr nøye for skade og potensielle mangler som kan utgjøre en risiko for brukeren.

• Funksjon

Kontroller at alle funksjonene til stolen fungerer korrekt, f.eks. setehelling, høydejustering, justering av ryggvinkel, sammenslåing osv.

• Festeanordninger

Kontroller at alle knapper, rattskruer, muttere, skruer, spaker og fastspenningsutstyr er i god stand og godt festet.

• Modifikasjoner

Eventuelle spesielle modifikasjoner, tilpasninger, endringer eller tilsvarende prosedyrer, herunder tilføyning av ekstraustyr, kan gjøre det påkrevd med en gjennomgang. Hvis de blir funnet uegnede, må korrigerende tiltak (hvis disse vurderes som sikre og gjennomførbare) iverksettes for om mulig å reversere dem.

• Merking

Eventuell merking som gjelder forrige bruker, må fjernes og skiftes ut med merking som gjelder den nye brukeren.

• Justering

Utstyret må justeres etter den nye brukeren, og dette må gjennomføres av kvalifiserte fagfolk. Sammen med andre hensiktsmessige kontroller og tester skal disse justeringene gjennomføres med eiers kjennskap og samtykke.

• Overlevering

Overleveringen av utstyret til den nye brukeren eller ledsageren må omfatte tilstrekkelig opplæring og råd om sikker bruk, særlig når det gjelder transport.

• Pakking

Påse alltid at stolen er korrekt pakket før levering.

• Feste av håndtak

Legg merke til at håndtaket som er påmontert, er avhengig av størrelsen på stolen. Påse derfor at størrelsetiketten på håndtaket er i samsvar med størrelsen på stolen som brukes.



medemagruppen