



brukerveiledning

DS 130
dusjkrakk



Forord

Kjære kunde.

Vi gratulerer med deres nye dusjkrakk.

Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir grunnlag for sikker og riktig bruk.

Veiledningen beskriver montering, bruk, vedlikehold og rengjøring av produktet.

Veiledningen må leses nøye før produktet tas i bruk og skal alltid være tilgjengelig for alle brukere av produktet.

Bruksområde

Duskrakken er beregnet for bruk i dusjen, på badet eller hvor man skulle ønske. Den er kun beregnet til innendørs bruk. Med gode armstøtter / sidebøyler og intimåpning i setet er den svært godt egnet til personer med nedsatt funksjon. Og hjelper til selvstendig og trygg personlig hygiene.

Dusjkrakken består av



1. Armstøtter / sidebøyler
2. Seteplate
3. Høydejusterbare ben

Leveransen inneholder

- 1 stk Dusjkrakk
- 4 stk Høydeinstillelige ben
- 1 stk Brukerveiledning

Sikkerhetsinstruksjoner

- Les brukerveiledningen nøye.
- Kontroller alle komponenter for skade og feil før produktet tas i bruk.
- Kontroller at seteplaten er riktig montert og er forsvarlig festet før det tas i bruk.
- Når man setter eller reiser seg eller når seteplaten vippes opp eller ned vil det kunne være fare for å få klær eller kroppsdeler i klem.
- Vær oppmerksom på at dusjkrakken har små ytre mål og derfor begrenset stabilitet. Unngå derfor å lene deg ut fra krakken slik at fare for tipping kan oppstå.

Tipp fare !

- Dusjkrakk DS 130 er beregnet til personer opp til 130 kg.

Montering



Dusjkrakk DS130 leveres ferdig montert, det er kun bena som skal settes på og høyden innstilles.

Innstill høyde.

For å stille inn høyde på bena trykkes utløserknappen inn. Da kan man justere benet til ønsket høyde, 5 forskjellige posisjoner.



Advarsel:

Påse at alle bena stilles i samme posisjon (hull) og at alle utløserknappen spretter helt ut og låser benet. Hvis ikke vil benet kunne gi etter og krakken kante.

Rengjøring, desinfisering og vedlikehold

Rengjør produktet regelmessig for hand med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel for husholdning. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler med slipe-middel eller blekemidler! Desinfiser med desinfeksjonsspray som for eksempel Descosept AF eller Bacillol AF.

Tekniske data

Bredde	510 mm	Total lengde	520 mm
Høyde	930 – 1010 mm	Høydeinnstilling ben	5-fach / 5 steps
Setedybde	430 mm	Vekt	5,5 kg
Setehøyde	450 – 530 mm	Maks belastning	130 kg
Setebredde	410 mm	Materiale ramme	Pulverlakkert alu.
Setelengde	410 mm	Materiale seteplate	PE-HD

Merkeskilt (eksempel)



1. Produkt navn
2. Artikkel nr.
3. Serienr og prod. Dato (mnd/år)
4. Maks belastning
5. Advarsel, se brukerveiledning

Garanti

2 års garanti fra kjøpsdato.

Det tas forbehold om tekniske endringer, skrivefeil og utelatelser i denne brukerveiledningen.



Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand
Tlf. +47 38 14 48 00 • Fax +47 38 14 48 70
rehab@varodd.no • www.varodd.no