

DUSJSTOL KULAN, REGULERBAR Art. nr.: 142113,142114,142117,142118
DUSJKRAKK KULAN, REGULERBAR

Anvendelse: Dusjstol Kulan er ment å sitte på når du dusjer. Setet er laget av støpt plast som gir en myk isolerende overflate. Høyden er justerbar. Ryggstøtten er valgfri og kan bestilles separat.

Teknisk spesifikasjon

Art nr: 142113 Krakk Vekt: 4,4 kg	Art nr: 142114 Krakk med utsparing Vekt: 4,3 kg	Art nr: 142117 Stol m/rygg Vekt: 4,9 kg	Art nr: 142118 Stol m/rygg og utsp Vekt: 4,9 kg
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Setebredde. 40 cm dybde x 43 cm
 Regulerbar høyde: 46-56 cm
 Bredde mellom armlener: 52 cm
 Høyde på armlene: 17 cm
 Max bredde: 57 cm
 Material: Stål tube, PE (sete), TPE (doppsko)



142113



142114



142117



142118

Sikkerhetsinstrukser:

- Dusjstolen skal ikke brukes på noen annen måte enn tiltenkt bruk.
- Dusjstol er ikke ment å brukes i badekaret.
- Stolen bør plasseres på en flat overflate der fire stolbena er fast på gulvet.
- Stolen må ikke være vinklet opp i en slik stilling at det bare står på to ben når brukeren sitter på den.
- Maksimal brukere vekten beregnes med alle fire bena på gulvet.
- Stolen må ikke flyttes med pasienten sitter på den.
- Doppskoene bør sjekkes regelmessig. Skadet eller slitte doppsko, kan bety et svakere grep og må byttes.
- Før bruk, kontroller at klippet for høyde justeringen er sikkert.
- Når du erstatter klipsene med nye må du kontrollere at brukes riktig størrelse. (Ulike størrelser er tilgjengelig)
- Ved tegn på at høydejusteringen glipper eller at produktet på en eller annen måte er utslitt bør produktet ikke anvendes, før det har blitt kontrollert av service.
- Max brukeren vekt 130 kg.

Symbols: Eksempler på symboler eller i manual.



Maximum bruker vekt.



Kan vaskes med alkalisk såpe pH 5-9.



Visuell kontroll






The product complies with EU Directives 93/42/EEC and 2007/47/EC on medical devices

Produktet følger:
 Risikostyring NS-EN ISO 14971
 Generelle krav NS-EN 12182

Produsent
Swereco Industri AB
 Barnhusgatan 4
 SE-111 23 Stockholm
 SWEDEN
 Salg/service Norge
Swereco Group Norge AS
 Telefon nr.90982530
 www.swerecogroup.no
 info@swerecogroup.no

Montering:

Sett setet på stolens rammen og skyv det ned til det høres klikk. Hvis ryggstøtte skal brukes fjern gummi baller og installere rygg. Hvis det skal brukes en myk rygg ikke fjern gummiballene. For justering av høyden trykk løs klipsen fra benet, juster høyden og trykk klipsene på plass igjen. Sjekk doppskoene før bruk. Skadet / slitte doppsko må byttes mot nye.

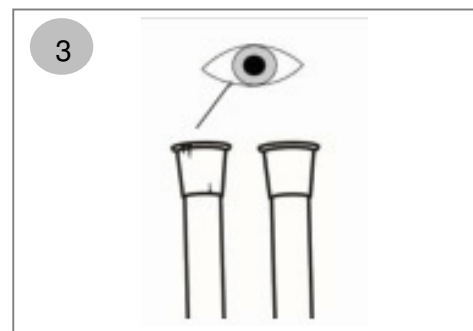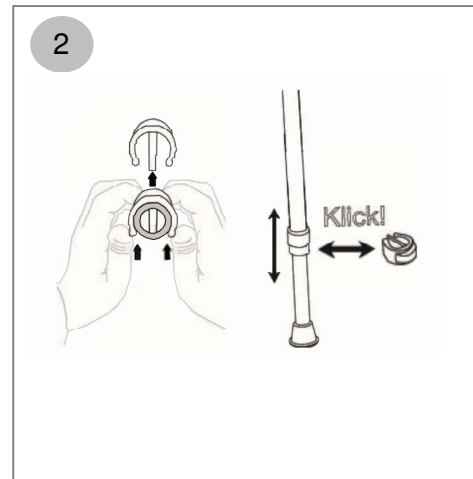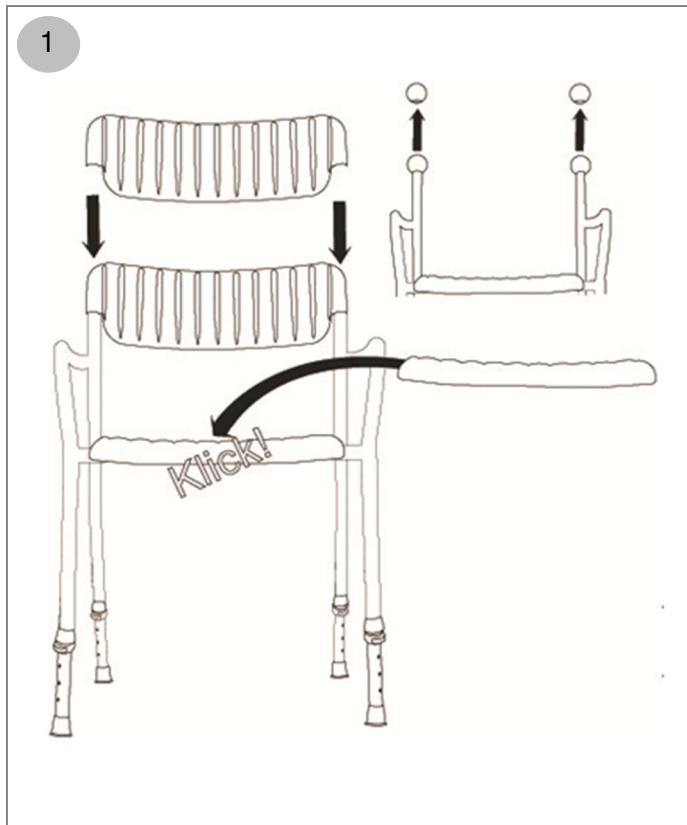

Vaskeanvisning: Rengjøres regelmessig ved behov (min 1G/pr.måned ,med vaskemid. Ph 5-9
Ved bytte av bruker skal produktet desinfiseres eller autoklaveres i max 3 minutter, alternativt tørkes/vaskes av med 70 % isopropanol

Tilbehør:

Art. No. 142120, Ryggstøtte
Art. No. 142125, Myk ryggstøtte
Art. No. 142128, Sete
Art. No. 142129, Sete med utsparing

Reservedeler:

Art. No. 120690, Doppsko 18 mm
Art. No. 14210009, Gummiball 22 mm
Art. No. 14420213, Klips 25 mm
Art. No. 14211320-S Ekstra ben)
Art. Nr. 14211315 Forlengelse ben (med 1 justerbar og 3 vanlige ben)