



Brukerveiledning AquaClean Dusj-WC 8000+

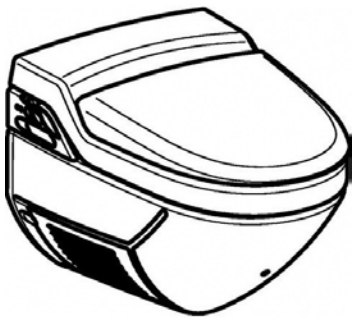

VU-8000+



GS-8000+

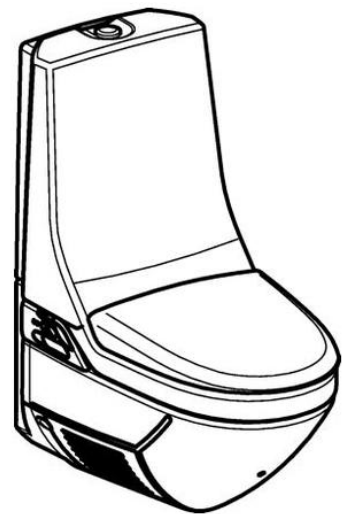

VS-8000+



Innhold

| | |
|--|----|
| Et moderne hygienetoalett | |
| Tilpasses dine ønsker | 4 |
| Moderne intimhygiene | 4 |
| Komfortabel med et enkelt betjeningspanel | 4 |
| Individuelle programmer med praktisk fjernkontroll..... | 4 |
| Har du spørsmål til produktet?..... | 4 |
| Viktige opplysninger | |
| Korrekt bruk | 5 |
| Montering og reparasjon..... | 5 |
| Drift og vedlikehold | 5 |
| Fjernkontrollen | 5 |
| Toalettmodeller | |
| Ulike modeller - samme funksjoner | 6 |
| AquaClean Dusj-WC 8000+ VU | 6 |
| AquaClean Dusj-WC 8000+ GS..... | 6 |
| AquaClean Dusj-WC 8000+ VS | 6 |
| Oversikt over toalettet | |
| Oversikt over betjeningselementer | 7 |
| Oversikt over betjeningspanelet | 7 |
| Sprutvern | 8 |
| Dempemekanisme i toalettsete og toalettlokk..... | 8 |
| Hvordan bruke toalettet | |
| Starte automatisk program | 9 |
| Veiledning steg for steg..... | 9 |
| Benytte det integrerte betjeningspanelet | 9 |
| LED-display på betjeningspanelet | 9 |
| Fjernkontrollens knapper VU-8000+ | 10 |
| Fjernkontrollens knapper GS-8000+ og VS-8000+ | 11 |
| Fjernkontrollens standardfunksjoner..... | 12 |
| Fjernkontrollens spesialfunksjoner..... | 13 |
| Lagre innstillinger | 14 |
| Endre og lagre det automatiske programmet | 14 |
| Tilbakestille til fabrikkinnstillinger | 14 |
| Lagre brukerprofiler | 15 |
| Oppbevaring av fjernkontrollen | 15 |
| Hvordan bruke Lady-dusjen..... | 16 |
| Nedskylling etter toalettbesøket for modellen VU-8000+..... | 16 |
| Nedskylling etter toalettbesøket for modellene GS-8000+ og VS-8000+..... | 16 |
| Barnesikring | 16 |
| Rengjøring og vedlikehold | |
| Rengjøring av toalettet | 17 |
| Rengjøring av porselenet | 17 |
| Rengjøring av forkrommede deler og innkapslinger av plast | 17 |
| Rengjøring av toalettsete og toalettlokk | 18 |
| Rengjøring av dusjarm, tørkearm og dyser..... | 19 |
| Aktivt kullfilter og desinfeksjonsvæske..... | 20 |
| Skifte aktivt kullfilter | 20 |
| Etterfylle desinfeksjonsvæske | 21 |
| Bestille nytt kullfilter og desinfeksjonsvæske | 22 |
| Skifte batterier i fjernkontrollen | 22 |
| Utbedring av feil | |
| Feil under drift..... | 23 |
| Errorkoder | 24 |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Modellen VU-8000+ | 25 |
| Modellene GS-8000+ og VS-8000+ | 25 |
| Miljøvern | |
| Innholdsstoffer | 26 |
| Deponering..... | 26 |
| Garantier og kontaktinformasjon | |
| Garantier | 27 |
| Kontaktinformasjon til kundeservice..... | 27 |

Et moderne hygienetoalett

Tilpasses dine ønsker

Med toalettet AquaClean Dusj-WC 8000+ har du bestemt deg for å investere i moderne kroppshygiene og en enklere hverdag. En slik investering passer like godt for den som ønsker å gi seg selv litt luksus i hverdagen, som for den som har nedsatt evne til å gjennomføre toalettbesøket på "gammeldags vis" og ikke ønsker å be om assistanse.

Moderne intimhygiene

AquaClean Dusj-WC 8000+ rengjør skånsomt analt eller vaginalt område. Sett deg på toalettet som vanlig og benytt dusjen for å gjøre deg ren. Det er ikke nødvendig å bruke papir først. Du kan velge om du vil benytte papir, håndklede eller den integrerte tørkefunksjonen for å bli tørr. For naturlig intimpleie for kvinner har toalettet også en egen lady-dusj.

Komfortabel med et enkelt betjeningspanel

Dersom du ikke ønsker å sette deg inn i tekniske finesser, eller du benytter toalettet for første gang, anbefaler vi deg å benytte det integrerte betjeningspanelet. Toalettet vil da benytte et automatisk program med spyl og tørk. Dette programmet er også ideelt for gjester.

Individuelle programmer med praktisk fjernkontroll

Dersom du ønsker å tilpasse styrken på dusjstrålen, vanntemperatur eller dusjstrålens posisjon benytter du den medfølgende fjernkontrollen. Ved hjelp av denne kan du til enhver tid endre alle toalettets funksjoner etter egne ønsker og behov. Innstillingene kan du lagre direkte på fjernkontrollens brukerprofiltaster. Toalettet benytter den lagrede innstillingen ved at man trykker på den samme tasten som man har lagret innstillingen på.

Har du spørsmål om produktet?

Videre i denne brukerveiledningen er toalettets funksjoner, samt bruk og vedlikehold beskrevet. Dersom du skulle ha spørsmål står vi alltid til din disposisjon. Kontakt oss og vi hjelper deg med programmering eller andre spørsmål du måtte ha om produktet.

Tlf: 23 38 00 00

E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no

Viktige opplysninger

Korrekt bruk

- AquaClean Dusj-WC 8000+ er beregnet til rengjøring av analområdet, og med lady-dusj også for rengjøring av vaginalområdet. All annen bruk regnes som ikke korrekt. Dersom toalettet benyttes til andre formål tapes alle garantier og produktansvarskrav ved eventuelle person- og materiellskader.
- AquaClean Dusj-WC 8000+ er utviklet og produsert med dagens tekniske nivå og testet og godkjent av de anerkjente, europeiske standarder (SEV/EMV/KIWA/VDE/SVGW/LGA/CE).

Montering og reparasjon

- AquaClean Dusj-WC 8000+ kan kun installeres av fagpersoner etter detaljerte monteringsveiledninger som følger med toalettet. Elektrisk tilkobling må være jordet 220/230V, 50Hz.
- Ikke foreta endringer, manipulasjoner, tilleggsinstallasjoner eller reparasjonsforsøk på toalettet på egenhånd.
- Reparasjoner kan kun utføres av autoriserte fagpersoner. Ikke-forskriftsmessige reparasjoner kan føre til ulykker, skader og driftsfeil.
- Endringer eller utskiftning av nettslutningskabelen må bare utføres av fagpersoner.

Drift og vedlikehold

- Betjening og vedlikehold skal kun utføres av pleier og/eller bruker i den grad det er beskrevet i bruksanvisningen. Dersom det bor barn i huset må du forklare dem riktig bruk. Toalettet må ikke benyttes til å klyve eller stå på.
- Ikke bruk aggressive vaskemidler som for eksempel harde børster, skurende svamper eller WC-rens i pulverform til rengjøring av toalettet. Ikke spray hårspray, parfyme og lignende på dusjtoalettet. Les mer om rengjøring fra s. 17.

Fjernkontrollen

- Fjernkontrollen leveres med en separat veggholder. Vennligst oppbevar fjernkontrollen i veggholder eller eget oppbevaringsrom i toalettet.
- Fjernkontrollen er ikke vannrett.
- Ikke legg fjernkontrollen på radiatorer eller andre varmekilder.
- Les mer om fjernkontrollens bruk og knapper fra s. 10.

Toalettmodeller

Ulike modeller - samme funksjoner

Toalettet AquaClean Dusj-WC 8000+ kommer i tre ulike modeller. Hvilken modell du har, avhenger av sistene og avløp på ditt badrom.

AquaClean Dusj-WC 8000+ VU

Vegghengt toalett, med innebygget sistene i veggen


Artikkelnummer: VU-8000+



AquaClean Dusj-WC 8000+ GS

Gulvstående toalett

Artikkelnummer: GS-8000+

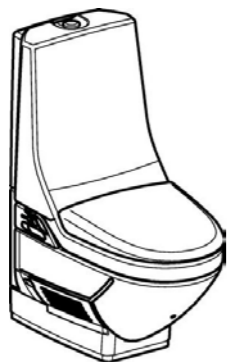

AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

Vegghengt toalett, med synlig sistene utenpå veggen


Artikkelnummer: VS-8000+



Oversikt over toalettet


Oversikt over betjeningselementer

1. Betjeningspanel
2. Hovedbryter
3. Rom for aktivt kullfilter
4. Serviceluke
5. Serienummer
6. Påfyllingsskuff for desinfeksjonsvæske
7. Dusjarm
8. Tørkearm
9. Sensor for brukeridentifikasjon

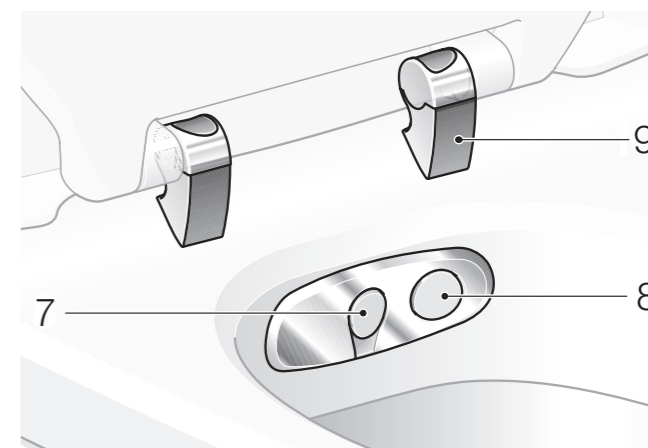

Oversikt betjeningspanel

1. Regulering av dusjstrålens styrke
2. LED-display
3. Luftreiser (av/på)
4. Tørring med varmluft (av/på)
5. Starte og stoppe dusjen
6. Oppbevaringsrom for fjernkontroll

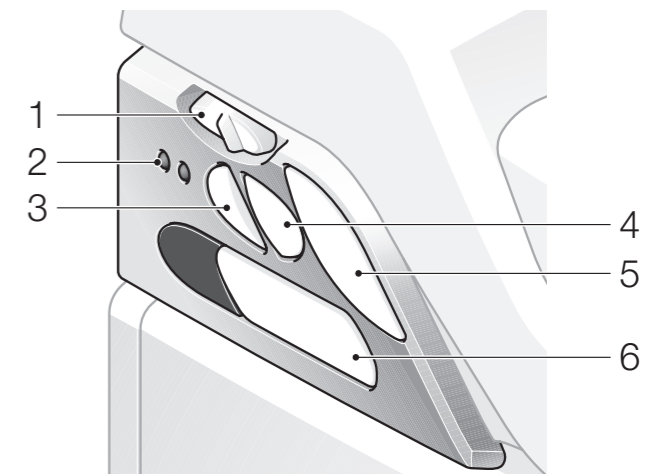


Oversikt over toalettet

Sprutvern

Til toalettet medfølger det et sprutvern. Dette er et gjennomsiktig plastdeksel som kan brukes til å stille inn toalettets funksjoner uten at noen sitter på toalettet. Løft opp sete og lokk og plasser sprutvernet under setet. Sensor for brukeridentifikasjon må dekkes til for at toalettets funksjoner skal fungere.


Ta godt vare på sprutvernet, da det også kan være behov for å benytte det ved en eventuell service av toalettet.

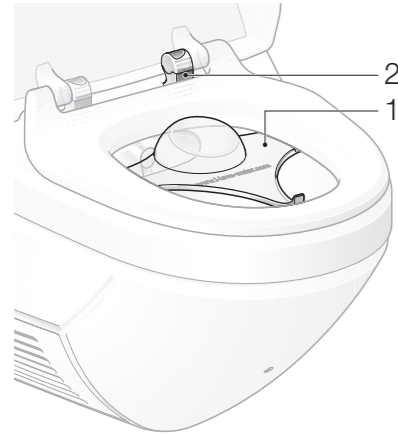

1. Sprutvern
2. Sensor for brukeridentifikasjon

Dempemekanisme i toalettsete og toalettlokk

Dempere fjærer toalettsetet og toalettlokket lydløst og sørger for langsom lukking. Åpningen fungerer på vanlig måte.

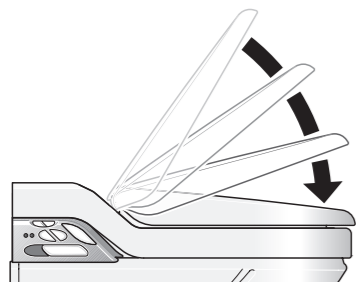

- i** Ikke trykk toalettsetet eller toalettlokket ned for hånd. Dette kan skade demperne.

Hvordan bruke toalettet

Starte automatisk program

Så snart du er ferdig på toalettet trykker du en gang på dusjknappen på toalettets betjeningspanel eller fjernkontrollen. Toalettet vil da spyle med temperert vann i 20 sekunder, og deretter tørke med varmluft i 3 minutter.

Veiledning steg for steg


1. Åpne lokket og sett deg godt til rette.
2. Når du setter deg på toalettet vil luftrensing gjennom et kullfilter starte automatisk. Du vil høre en vifte som starter opp med lav susing.
Forutsetning: Knappen for automatisk luftrensing på betjeningspanelet må være trykket inn.
3. Når du er ferdig starter du spylingen ved å trykke inn dusjknappen på betjeningspanelet eller fjernkontrollen.
3. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Dersom du ønsker å avbryte spylingen tidligere, trykk inn dusjknappen en gang til.
4. Varmluftstørkingen starter automatisk etter spylingen.
Forutsetning: Knappen for varmluftstørker på betjeningspanelet må være trykket inn.
5. Stoppe tørkeluften: Når du reiser deg fra toalettet, stopper tørkeluften automatisk. Eller du kan avbryte tørkingen ved å trykke på dusjknappen en gang til.

Benytte det integrerte betjeningspanelet



Dusjknapp

Trykk på knappen for å starte spylingen. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du på dusjknappen en gang til.

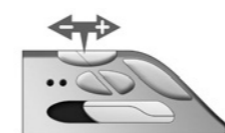


Regulere dusjstrålens styrke

Skyveknappen regulerer dusjstrålens styrke. Skyv mot + for å øke vannmengden, skyv mot - for å minimere vannmengden. Strålestyrken har 7 trinn.



Varmluftstørker

For at tørkeluften skal starte automatisk etter spylingen må denne knappen være trykket inn. Dersom knappen trykkes ut vil ikke tørkefunksjonen starte automatisk.

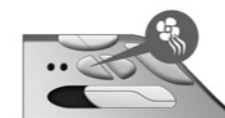

Luftreiser

Luftreiseren starter automatisk når du setter deg på toalettet, og vil rense luften gjennom et aktivt kullfilter. Du vil høre en lav susing fra toalettet når du setter deg. Denne knappen må være trykket inn for at luftreiseren skal starte. Dersom knappen trykkes ut vil funksjonen deaktiveres.

LED-display på betjeningspanelet

Blå LED lyser = Toalettets varmtvannsbereder er slått på eller står i sparemodus.



Blå LED lyser ikke = Toalettets varmtvannsbereder er slått av (spylar kun med kaldt vann).

Rød LED lyser = På tide å skifte kullfilter og/eller etterfylle desinfeksjonsvæske (se side 20-21).

Rød LED blinker = Feilmelding og behov for service (se side 24).

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens knapper VU-8000+

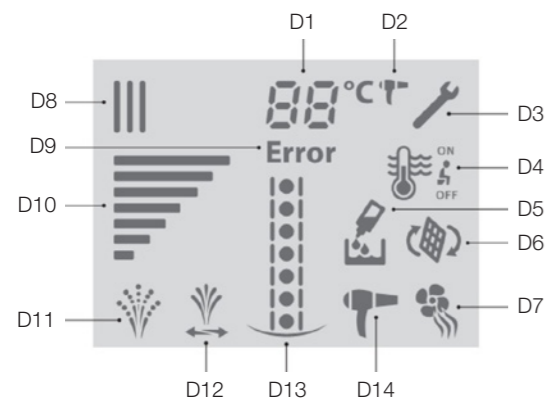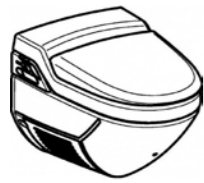

Display



- D1 Temperaturvisning spylevann og varmluftstørker
- D2 Temperatur varmluftstørker aktivert
- D3 Indikerer at serviceknappen er aktiv
- D4 Innstilling varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)
- D5 Indikerer behov for etterfylling av desinfeksjonsvæske
- D6 Indikerer behov for skift av kullfilter
- D7 Luftrensener (av/på)
- D8 Aktivert brukerprofil I-III
- D9 Feilindikering - se errorkoder på side 24
- D10 Dusjstrålens styrke
- D11 Massasjedusj (av/på)
- D12 Bevegelig spylearm (av/på)
- D13 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- D14 Varmluftstørker (av/på)

Knapper

- 1 Dusj (start/stopp)
- 2 Dusjens strålestyrke reduseres
- 3 Dusjens stråkestyrke økes
- 4 Lady-dusj (start/stopp)
- 5 Luftrensener gjennom kullfilter (av/på)
- 6 Varmluftstørker (av/på)
- 7 Brukerprofil I-III (av/på)
- 8 Massasjedusj (av/på)
- 9 Varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)
- 10 Temperatur dusj og varmluftstørker (-lavere +høyere)
- 11 Automatisk bevegelse av spylearm (av/på)
- 12 Dusjarmens posisjon (fram/tilbake)
- 13 Serviceknapp

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens knapper GS-8000+ og VS-8000+

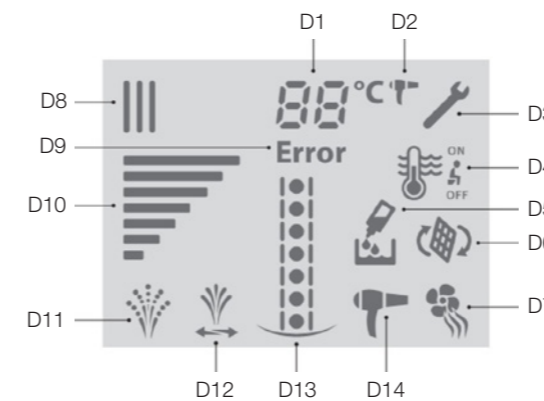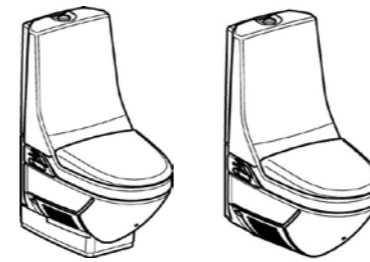

Display

- D1 Temperaturvisning spylevann og varmluftstørker
- D2 Temperatur varmluftstørker aktivert
- D3 Indikerer at serviceknappen er aktiv
- D4 Innstilling varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)
- D5 Indikerer behov for etterfylling av desinfeksjonsvæske
- D6 Indikerer behov for skift av kullfilter
- D7 Luftrensener (av/på)
- D8 Aktivert brukerprofil I-III
- D9 Feilindikering - se errorkoder på side 24
- D10 Dusjstrålens styrke
- D11 Massasjedusj (av/på)
- D12 Bevegelig spylearm (av/på)
- D13 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- D14 Varmluftstørker (av/på)

Knapper

- 1 Dusj (start/stopp)
- 2 Dusjens strålestyrke reduseres
- 3 Dusjens stråkestyrke økes
- 4 Lady-dusj (start/stopp)
- 5 Varmluftstørker (av/på)
- 6 Nedskyllingsknapp
- 7 Brukerprofil I-III (av/på)
- 8 Massasjedusj (av/på)
- 9 Varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)
- 10 Temperatur dusj og varmluftstørker (-lavere +høyere)
- 11 Luftrensener gjennom kullfilter (av/på)
- 12 Automatisk bevegelse av spylearm (av/på)
- 13 Dusjarmens posisjon (fram/tilbake)
- 14 Serviceknapp

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens standardfunksjoner

Standardfunksjonene er de knappene man benytter oftest på fjernkontrollen, og er de knappene som er synlige når dekselet på kontrollen er lukket.

Nedenfor er det gitt en forklaring på standardknappene på fjernkontrollen. Ikonene på displayet vil endres etterhvert som du trykker på de ulike knappene. Fjernkontrollens display slås av automatisk etter 10 minutter. Trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen for å aktivere displayet.



Dusjknapp

Trykk på dusjknappen for å starte spylingen. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du på dusjknappen en gang til.



Regulere dusjstrålens styrke

Ved å trykke på disse knappene justeres trykket på spylevannet. Trykk på + for å øke vannmengden, trykk på - for å minimere vannmengden. Strålestyrken har 7 trinn.



Lady-dusj

Lady-dusjen rengjør varsomt og behagelig. Trykk på denne knappen for å starte lady-dusjen. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du på knappen en gang til.



Nedskylling

Nedskylling av sistene kan gjøres fra håndbetjeningen på modellene GS-8000+ og VS-8000+. Når tasten trykkes inn tømmes hele sisternen.



Varmluftstørker

Trykk på knappen for varmluftstørker for å aktivere eller stoppe tørkingen. Dersom du ikke selv avbryter tørkingen vil den automatisk stoppe å blåse varm luft etter 3 minutter. Tørkingen avsluttes da når du reiser deg fra toalettet.



Luftrensere

Ved å trykke på denne knappen aktiveres eller stoppes luftrensingen gjennom kullfilteret.



Brukerprofiler

Det kan lagres ulike brukerprofiler til forskjellige brukere. Ved å trykke på en av disse knappene aktiverer du den lagrede brukerprofilen. Trykk deretter på dusjknappen for å starte det lagrede programmet. Når toalettet forlates tilbake til fabrikkinnstillinger etter 10 minutter. Fabrikkinnstillingene kan også endres. Les mer om innstilling av brukerprofiler på side 15.

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens spesialfunksjoner

Dersom du drar fjernkontrollens deksel nedover, vil det komme til syne flere knapper som kan benyttes for å justere toalettets funksjoner.

Nedenfor er det gitt en forklaring på spesialknappene på fjernkontrollen. Ikonene på displayet vil endres etterhvert som du trykker på de ulike knappene. Fjernkontrollens display slås av automatisk etter 10 minutter. Trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen for å aktivere displayet.



Massasjedusj

Massasjedusjen er velgjørende og avslappende. Aktiver funksjonen ved å trykke inn denne knappen enten før eller under spylingen. Trykk på knappen en gang til og funksjonen deaktiveres.



Dusjarmens posisjon

Ved å trykke på pilene kan du velge hvor langt frem dusjarmen skal spyle. Dusjarmen kan posisjoneres i 7 trinn fremover eller bakover avhengig av sitteposisjon.



Bevegelig spylearm

Dersom du ønsker at dusjarmen skal spyle over et større område kan du aktivere denne funksjonen. Aktiver funksjonen ved å trykke inn denne knappen enten før eller under spylingen. Spylearmen vil da bevege seg frem og tilbake mens den spyle. Trykk på knappen en gang til og funksjonen deaktiveres.



Varmtvannsbereder

Trykker på du denne knappen vil toalettets varmtvannsbereder slås av, på eller i sparemodus.



vises i display: Varmtvannsbereder er slått på. Toalettet spyle med varmt vann. Temperaturen er forhåndsinnstilt på 37°C.



vises i display: Sparemodus aktivert. Varmtvann varmes opp når du setter deg på toalettet. Oppvarmingstiden vil være 3-4 minutter.




vises i display: Varmtvannsbereder er slått av. Det vil kun spyles med kaldt vann.



Temperatur dusjvann

Dusjvannets temperatur er forhåndsinnstilt til 37°C. Benytt denne knappen for å endre temperatur. Trykk + for å heve temperaturen og - for å senke den. Man kan velge temperatur mellom 10-39°C.

Temperatur varmluft

Benytt samme knapp for å justere temperatur både på dusjvann og varmluft. Men for å justere varmluften må du først trykke på knappen for varmluftstørker  og deretter trykke + for å heve temperaturen og - for å senke den. Ønsket temperatur for varmluft kan justeres mellom 20-45°C.



Service

Ved behov for rengjøring eller utskifting av spylemunnstykke eller tørkearm. Trykk en gang på knappen og spylearmen vil komme ut, uten å spyle. Trykk en gang til på knappen og spylearmen går tilbake og tørkearmen kommer ut, uten å tørke. Trykk på knappen igjen og tørkearmen går tilbake. Denne funksjonen virker ikke når sensoren for brukeridentifikasjon er tildekket. Se mer om rengjøring av dyse og tørkearm på side 19.

Hvordan bruke toalettet

Lagre innstillinger

Alle brukere har forskjellige preferanser. Det er derfor mulig å lagre individuelle innstillinger i toalettet. Toalettet leveres ferdig innstilt med en fabrikkinnstilling. Dette er det automatiske programmet som toalettet kjører dersom man trykker på dusjknappen. Om ønskelig kan dette programmet endres og lagres. Dersom det er flere brukere som benytter samme toalett kan det i tillegg lagres individuelle programmer ved å benytte brukerinnstillingsknappene.

Tips:

Den beste måten å finne dine favorittinnstillinger på er under bruk. Sett deg derfor ned på toalettet og juster funksjonene samtidig som du tester de. Når du finner innstillingene som passer for deg kan du lagre disse.

Endre og lagre det automatiske programmet

Følgende innstillinger kan endres:

- Strålestyrke
- Vanntemperatur
- Dusjarmens posisjon
- Temperatur på varmluft
- Massasjedusj av/på
- Bevegelig spylearm av/på

For å lagre endringene du har gjort trykker du brukerprofil-knappene I og II inn samtidig i minst 3 sekunder.



Resultat:

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. De endrede innstillingene er da lagret. Neste gang du trykker på dusjknappen på fjernkontrollen eller betjeningspanelet vil det automatiske programmet du nettopp lagret benyttes.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Dersom du ønsker å tilbakestille til toalettets fabrikkinnstillinger trykker du serviceknappen og knappen for varmtvannsbereder inn samtidig i minst 3 sekunder.



Resultat:

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. Alle innstillinger er satt tilbake til fabrikkinnstillinger.

Hvordan bruke toalettet

Lagre brukerprofiler

Dersom man er flere brukere som benytter samme toalett kan man lagre individuelle innstillinger for hver bruker. Da slipper man å stille inn toalettet på nytt hver gang.

Følgende innstillinger kan endres:

- Strålestyrke
- Vanntemperatur
- Dusjarmens posisjon
- Luftrens av/på
- Tørring med varmluft av/på
- Temperatur på varmluft
- Massasjedusj av/på
- Bevegelig spylearm av/på

På toalettmodellen VU-8000+ kan man lagre inntil 4 ulike brukerprofiler.



På toalettmodellene GS-8000+ og VS-8000+ kan man lagre inntil 3 ulike brukerprofiler.



For å lagre endringene du har gjort trykker du inn den brukerprofil-knappen du ønsker å lagre dine innstillinger på i minst 3 sekunder.


Resultat:

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. Innstillingene er da lagret på brukerprofil-knappen.

Når du ønsker å starte ditt lagrede program trykker du først på brukerprofil-knappen du har lagret innstillingene på. Deretter trykker du en gang på dusjknappen. Ditt program vil starte.

Oppbevaring av fjernkontrollen


Fjernkontrollen kan oppbevares i rommet for fjernkontrollen eller i en egen veggholder. Rommet til fjernkontrollen finner du under betjeningspanelet. Dytt fjernkontrollen helt inn for oppbevaring. Når du skal ta den ut igjen trykker du kontrollen litt inn, så kommer den automatisk ut.

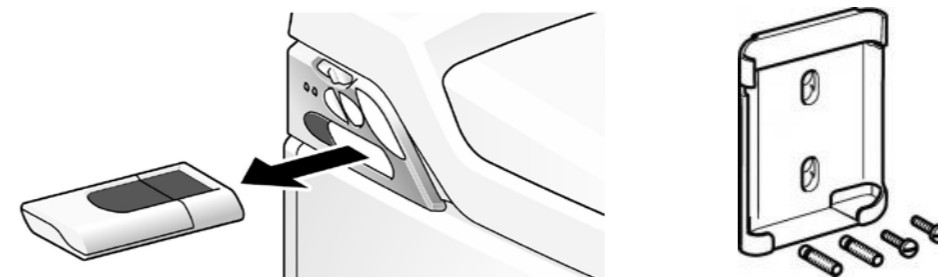

Hvordan bruke toalettet

Hvordan bruke Lady-dusjen

For å benytte Lady-dusjen må du bruke fjernkontrollen. Trykk en gang på Lady-knappen på fjernkontrollen for å starte spylingen.

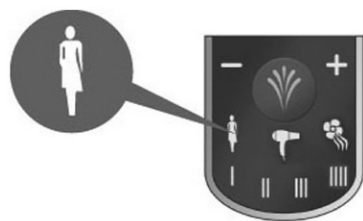

Toalettet vil benytte den fremste delen av spyledysen og spyer varsomt med temperert vann i 20 sekunder. Hvor kraftig og hvor vannstrålen skal være, regulerer du individuelt med fjernkontrollen. Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke en gang til på Lady-knappen. Varmluftstørkeren starter automatisk etter spylingen og vil tørke til du går av toalettet, eller avbryter tørkingen med fjernkontrollen.

Nedskylling etter toalettbesøket for modellen VU-8000+

Nedskyllingen fra sisterne fungerer uavhengig av toalettets vaske- og tørkeprogram. Til modellen VU-8000+ skyller du ned fra betjeningsknappen til den innebygde sisternen.

i Dersom du har toalettstøtter til ditt toalett, er det også mulig å installere betjeningsknapp for nedskylling under støtten. For mer informasjon kontakt Funksjonsutstyr.

Nedskylling etter toalettbesøket for modellene GS-8000+ og VS-8000+

Nedskyllingen fra sisterne fungerer uavhengig av toalettets vaske- og tørkeprogram. Til modellene GS-8000+ og VS-8000+ er det flere muligheter for nedskylling. Du kan enten benytte knappen på sisternen, eller knappen for nedskylling på fjernkontrollen.



i Det er også mulig å stille inn modellene GS-8000+ og VS-8000+ til å automatisk skylle ned når man reiser seg fra toalettet. Dette må gjøres av en autorisert fagperson. For mer informasjon kontakt Funksjonsutstyr.

Barnesikring

Toalettets spyling og tørking kan kun benyttes når sensoren for brukeridentifikasjon er aktivert. Altså når noen sitter på toalettet eller dersom sensoren dekkes til.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av toalettet

Dersom du følger vår veiledning om rengjøring og vedlikehold av toalettet vil du hver dag kunne nyte gleden av toalettets komfort og kvalitet. For regelmessig stell av toalettet holder det vanligvis å vaske med vann, et mildt og hudvennlig vaskemiddel, samt en myk svamp eller klut som ikke lager riper.

i Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Overflate- og materialskader som oppstår på grunn av feil behandling dekkes ikke av garantien. Følg derfor informasjonen i denne brukerveiledningen når du skal rengjøre og vedlikeholde ditt toalett.

Rengjøring av porselenet

Toalettet har unikt porselen som er spesielt smussavisende. Overflaten setter en ny standard med henblikk på rengjøring og hygiene. Rengjør toalettskålen med et mildt rengjøringsmiddel for baderom eller et mildt universalmiddel. Tilsmussing kan også fjernes med en toalettbørste. Benytt toalettets nedskyllingsknapp for å skylle skålen etter rengjøring. Tørk rundt skålen med en myk, fuktig klut eller en svamp som ikke lager riper.

i Du må ikke bruke skuremidler med slipeeffekt eller svamper som lager riper. Bruk heller ikke høykonsentrerte rensmidler for avløp, armaturer og stål. Vi fraråder også bruk av løsemiddel- eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler og husholdningseddik.

Rengjøring av forkrommede deler og innkapslinger av plast


Benytt en myk og fuktet klut for rengjøring. Ved behov kan det benyttes milde, hudvennlige rengjøringsmidler.

i Du må ikke bruke skuremidler med slipeeffekt eller svamper som lager riper. Bruk heller ikke høykonsentrerte rensmidler for avløp, armaturer og stål. Vi fraråder også bruk av løsemiddel- eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler og husholdningseddik.


Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av toalettsete og toalettlokk

1. Klapp opp toalettsetet og lokket, og frigjør de to hengslene ved å trykke ned de sorte knappene (1) samtidig som du skyver dem mot midten (2).

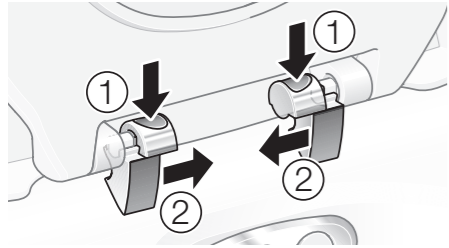


2. Løsne toalettsetet og lokket fra apparatet ved å løfte rett opp.

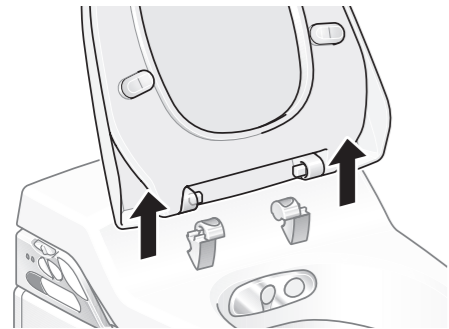

3. Vask toalettsetet og lokket med en myk og fuktet klut. Ved behov kan mild såpe også benyttes. Tørk av med en tørr, myk klut for å unngå at det oppstår vannflekker. Når setet og lokket er løst, er det også mye enklere å vaske rent rundt hengslene på toalettskålen. Tørk rundt hengslene med en myk, fuktig klut eller en svamp som ikke lager riper.


4. Sett toalettsetet og lokket inn i festet igjen etter rengjøring. Skyv de to hengslene utover.

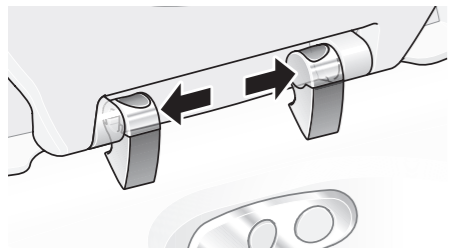

5. Toalettsetet og lokket er dermed låst og kan lukkes.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av dusjarm, tørkearm og dyser

En gang i blant kan det være lurt å rengjøre dusjarm og tørkearm med tilhørende dyser. Dette gjøres ved å benytte serviceknappen  på fjernkontrollen. Følg veiledningen nedenfor steg for steg.

1. Klapp opp toalettsetet og lokket og sørg for at sensoren for brukeridentifikasjon ikke er tildekket.
2. Trykk en gang på serviceknappen på fjernkontrollen. Dusjarmen vil komme ut uten å spyle.



3. Hold dusjarmen fast med en hånd og trekk dusjdysen forsiktig rett ut (dusjdysen er den hvite delen ytterst på dusjarmen)



4. Trykk en gang på serviceknappen. Dusjarmen går tilbake uten dusjdysen og tørkearmen kommer automatisk ut.
5. Drei tørkearmen 90° mot venstre og trekk den ut av føringen.



6. Rengjør godt i dusjarms- og tørkearmsåpningene med en fuktig klut som ikke riper.
7. Rengjør tørkearmen og tørkedysen under rennende vann. Tørkedysen kan om ønskelig tas ut av tørkearmen for ekstra rengjøring (tørkedysen er den hvite delen som sitter ytterst på tørkearmen). Tørk til slutt av tørkearmen med en tørr klut.
8. Sett tørkedysen tilbake i tørkearmen. Skyv deretter den rengjorte tørkearmen inn i føringen igjen og drei den 90° mot høyre til den er festet riktig.
9. Trykk en gang på serviceknappen og tørkearmen går tilbake.
10. Rengjør dusjdysen under rennende vann. Trykk deretter på serviceknappen igjen og dusjarmen kommer ut på ny.
11. Tørk av dusjarmen med en fuktig klut og sett til slutt dusjdysen tilbake på dusjarmen.
12. Trykk på serviceknappen og dusjarmen går tilbake og tørkearmen kommer ut. Trykk en siste gang på serviceknappen og tørkearmen går inn.



Ved behov er det mulig å bytte ut dusj- og tørkedysen. Dette er reservedeler som må bestilles. Kontakt Funksjonsutstyr for mer informasjon.


Rengjøring og vedlikehold


Aktivt kullfilter og desinfeksjonsvæske

Alle toalettmodellene er utstyrt med luftrensing gjennom et aktivt kullfilter, samt en unik desinfisering av dusjarmen etter hver spyling. Disse funksjonene gir maksimal renslighet og god hygiene.

Begge funksjonene trenger ettersyn etter en tid. Toalettet signaliserer med å tenne det røde LED lyset på betjeningspanelet (forutsetter at toalettet er slått på). På fjernkontrollens display vil det da varsles hvilken funksjon som trenger ettersyn. Det vil blinke symboler for om det er kullfilter som må byttes, eller desinfeksjonsvæske som må etterfylles.

Skifte aktivt kullfilter

 Dersom dette symbolet blinker på fjernkontrollens display, er det på tide å skifte det aktive kullfilteret.

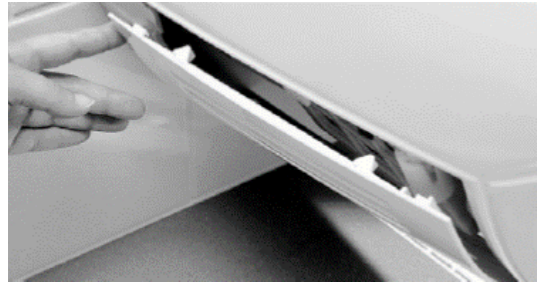

1. Åpne serviceluken. Trykk mot siden og trekk luken nedover.



2. Fell ned skuff for aktivt kullfilter ved å dra den grå tappen nedover.




3. Trekk ut det gamle kullfilteret og sett inn et nytt. Gammelt filter kastes i restavfallet.



4. Lukk skuff for kullfilter og steng serviceluken.

Rengjøring og vedlikehold

Etterfyll desinfeksjonsvæske

 Dersom dette symbolet blinker på fjernkontrollens display, er det på tide å etterfylle desinfeksjonsvæske.



1. Åpne serviceluken. Trykk mot siden og trekk luken nedover.




2. Trekk ut den gule påfyllingsskuffen.



3. Ta av korken på flasken med desinfeksjonsmiddel og hell forsiktig flaskens innhold ned i påfyllingsskuffen uten å klemme på flasken.



4. Skyv påfyllingsskuffen inn igjen og steng serviceluken.

 Toalettet vil etter hver spyling benytte litt desinfeksjonsvæske blandet med vann for å rengjøre dusjarm og dusjdyse. Etter 90 sekunder med rensing skylles det med rent vann, og toalettet er klart til bruk. Denne prosessen skjer automatisk etter hver spyling. Man kan fortsatt benytte toalettets spylefunksjon selv om det er tomt for desinfeksjonsvæske, men da renses det kun med rent vann etter spylingen.

Rengjøring og vedlikehold

Bestille nytt kullfilter og desinfeksjonsvæske

Både kullfilter og desinfeksjonsvæske er spesialprodukter produsert av Geberit for nettopp disse toalettene. Ikke benytt noen annen form for filter eller desinfeksjonsvæske i toalettet.

Nytt kullfilter og/eller desinfeksjonsvæske kan bestilles hos Funksjonsutstyr AS. Ring oss på telefon, send oss en e-post eller kom innom vårt kontor i Oslo.

Telefon: 23 38 00 00

E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no

Kontoradresse: Martin Linges vei 25, 0692 Oslo

Artikkelnummer kullfilter: 250.022

Artikkelnummer desinfeksjonsvæske: 242.545

Skifte batterier i fjernkontrollen

Du trenger 3 stk. batterier av type AAA 1,5 V. Følg deretter veiledningen nedenfor.

1. Åpne dekselet på håndbetjeningen ved å skyve det nedover.
2. Press ned låsen og skyv dekselet så langt ned at batteriene kommer til syne.
3. Bytt alle 3 batteriene når du står ved siden av toalettet. Pass på at batteriene er satt i riktig vei.
4. Når batteriene er satt inn kan dekselet til fjernkontrollen skyves på igjen.



i Det er viktig at du står i nærheten av toalettet når du skifter batteriene, slik at fjernkontrollen kobles sammen med toalettet.

Utbedring av feil

Feil under drift

Dersom du opplever feil på toalettet kan du se på listen nedenfor, og gjennomføre tiltakene som er oppgitt.

| FEIL | ÅRSAK | TILTAK |
|---|--|--|
| Toalettet virker ikke | <ul style="list-style-type: none">• Støpselet er ikke satt inn i stikkkontakten• Hovedbryter avskrudd• Sikring gått/jordbryterfeil• Sensor for brukeridentifikasjon er skitten• Programvarefeil | <ul style="list-style-type: none">• Sett inn støpselet. Hvis stikkkontakten ikke er tilgjengelig må du kontakte Funksjonsutstyr.• Skru på hovedbryter• Sjekk sikringen• Rengjør sensor for brukeridentifikasjon• Slå av hovedbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder |
| Fjernkontrollen virker ikke | <ul style="list-style-type: none">• Batteriene er utladet• Batteriene er ikke satt inn• Batteriene er satt inn feil• Det er ingen forbindelse mellom toalett og fjernkontroll• Fjernkontrollen er defekt | <ul style="list-style-type: none">• Skift batterier• Sett inn batterier• Sett inn batteriene riktig• Hold fjernkontrollen i nærheten av toalettet når du setter inn batteriene• Bytt til ny fjernkontroll |
| Dusjvannet er for kaldt eller for varmt | <ul style="list-style-type: none">• Varmtvannsbereder er slått av• Varmtvannsbereder er satt i sparemodus• Temperaturen på vannet er for lav/høy | <ul style="list-style-type: none">• Sett berederens varmefunksjon på ON med fjernkontrollen• Sett berederens varmefunksjon på ON med fjernkontrollen• Still inn ønsket temperatur med fjernkontrollen, og lagre innstillingen |
| Dusjarmen går ikke tilbake | <ul style="list-style-type: none">• Strømtilførselen er brutt• Toalettet er defekt | <ul style="list-style-type: none">• Gjenoppsett strømtilførselen, dusjarmen går automatisk tilbake• Koble fra strømmen, ring 23 38 00 00 |
| Luftrenser starter ikke | <ul style="list-style-type: none">• Funksjonen er deaktivert• Sensor for brukeridentifikasjon er skitten | <ul style="list-style-type: none">• Skru på funksjonen på betjeningspanelet• Rengjør sensor for brukeridentifikasjon |
| Varmluftstørkeren starter ikke automatisk | <ul style="list-style-type: none">• Funksjonen er deaktivert | <ul style="list-style-type: none">• Skru på funksjonen på betjeningspanelet |
| Tørkeluften er for svak | <ul style="list-style-type: none">• Tørkearmen er montert vridt | <ul style="list-style-type: none">• Monter tørkearmen riktig vei |
| Tørkearmen går ikke helt tilbake | <ul style="list-style-type: none">• Tørkearmen er ikke montert riktig | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at tørkearmen går helt inn i føringen og er riktig montert |
| Toalettsetet faller ned | <ul style="list-style-type: none">• Hengslene er ikke skikkelig lukket• Demper er defekt | <ul style="list-style-type: none">• Lukk hengslene• Skift sete og lokk |
| Dårlig lukt til tross for aktivert luftrenser | <ul style="list-style-type: none">• Kullfilter er oppbrukt | <ul style="list-style-type: none">• Skift kullfilteret |
| Klaprende lyd etter bruk | <ul style="list-style-type: none">• Beholder for desinfeksjonsvæske er tom | <ul style="list-style-type: none">• Etterfyll desinfeksjonsvæske |
| Sildrer vann i toalettskål | <ul style="list-style-type: none">• Sisternen lekker | <ul style="list-style-type: none">• Ring 23 38 00 00 |
| Sildrer vann på gulvet | <ul style="list-style-type: none">• Lekkasje fra toalettet har oppstått | <ul style="list-style-type: none">• Trekk ut støpsel, ring 23 38 00 00 |
| Brudd på sete eller lokk | <ul style="list-style-type: none">• Overbelastning eller feilbelastning | <ul style="list-style-type: none">• Skift sete og lokk |
| Blå LED lampe blinker | <ul style="list-style-type: none">• Oppstartsprogram er startet, varer i 2-9 min | <ul style="list-style-type: none">• Etter 9 min vil lampen lyse konstant blått |
| Rød LED lampe lyser | <ul style="list-style-type: none">• Kullfilter oppbrukt eller beholder for desinfeksjonsvæske tom (se blinkende ikon på fjernkontrollens display) | <ul style="list-style-type: none">• Skift kullfilteret og/eller etterfyll desinfeksjonsvæske |
| Rød LED lampe blinker og [Error] vises på fjernkontrollen | <ul style="list-style-type: none">• En sikkerhetsfunksjon har skrudd av toalettets spyl/tørk-funksjon midlertidig | <ul style="list-style-type: none">• Slå av hovedbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder |

i Hvis toalettet fortsatt ikke virker etter feilretting: Ring 23 38 00 00. Dersom det i displayet på fjernkontrollen står [Error] etterfulgt av et siffer, oppgi dette ved din henvendelse.

Utbedring av feil

Errorkoder

Dersom du opplever feil på toalettet og det vises [Error] i fjernkontrollens display. Det vil samtidig være et tall på displayet som indikerer hva som er feil. Nedenfor ser du listen over de ulike error-kodene som kan oppstå. Dette er kun til informasjon. Ring 23 38 00 00 for å få hjelp til å utbedre feilen.

| KODE | ÅRSAK | FEIL OPPDAGET AV TOALETET | PROSEDYRE | EFFEKT AV FUNKSJON |
|------|---|---|--|--|
| 8 | Tørkemotor ikke montert | Ingen strøm til viftemotor | Sjekk kontakter eller skift motor | Tørkeluft deaktivert |
| 9 | Tørkeluft blokkert | Opphetet viftemotor | Skift tørkemotor | Tørkeluft deaktivert |
| 10 | Defekt sensor i varmtvannsbeholder | Prosesor har alltid 0V input | Varmtvannsbeholder komplett | Kun kaldt vann |
| 11 | Kortslutning i varmtvannsbeholder | Prosesor har alltid 5V input | Varmtvannsbeholder komplett | Kun kaldt vann |
| 12 | Defekt sensor i tørker | Prosesor har alltid 0V input | Temperatursensor komplett | Tørkeluft deaktivert |
| 13 | Kortslutning i tørker | Prosesor har alltid 5V input | Temperatursensor komplett | Tørkeluft deaktivert |
| 14 | Termostat i vannvarmer responderer ikke | Sensor gir ikke signal | Resett termostat | Toalett deaktivert |
| 15 | Sikkerhetstermostat i vannvarmer responderer ikke | Temperatur kan ikke måles av toalettet | Varmtvannsbeholder komplett | Toalett deaktivert |
| 16 | Triac vannvarmer feil | Ingen tilbakemelding fra Triac | Styreprint | Kun kaldt vann |
| 17 | Triac luftvarmer feil | Ingen tilbakemelding fra Triac | Styreprint | Tørkeluft deaktivert |
| 18 | Magnetventil, nivåsensorfeil, eller lekkasje i vannvarmer | Ingen signal etter 40 s. med fulling | Varmtvannsbeholder komplett | Toalett deaktivert |
| 19 | Spylearm kilt fast i ytre posisjon | Ingen signaler mottatt fra endestoppere | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalett deaktivert |
| 20 | Spylearm kiles på vei inn | Ingen signaler mottatt fra endestoppere | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalett deaktivert |
| 21 | Tørkearm kilt fast i ytterste posisjon | Ingen signaler mottatt fra endestoppere | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalett deaktivert |
| 23 | Bryter for spylearm virker ikke | Ingen signaler mottatt fra endestoppere | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalett deaktivert |
| 24 | Bryter for tørkearm virker ikke | Ingen signaler mottatt fra endestoppere | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalett deaktivert |
| 27 | Kabler/kontakter til pumpe gir ikke signal | Målt Volt via pumpe | Sjekk kabel fra pumpe til styreprint | Toalett deaktivert |
| 28 | Feilposisjon av spylearm | Måles automatisk | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalettet forsøker å trekke arm i riktig posisjon. Hvis ikke: toalettet deaktivert |
| 29 | Feilposisjon av tørkearm | Måles automatisk | Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skifte styreprint | Toalettet forsøker å trekke arm i riktig posisjon. Hvis ikke: toalettet deaktivert |

Tekniske spesifikasjoner

Modellen VU-8000+

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nominell spenning | 230 V AC |
| Nettfrekvens | 50 Hz |
| Inngangseffekt | 1000 W |
| Inngangseffekt standby | 5 W |
| Lengde nettleiding | 50 cm |
| Innkapsling | IP x 4 |
| Strømningstrykkområde | 1 - 10 bar |
| Gjennomstrømningsmengde | 1,4 - 5,5 l/min |
| Luftvolumstrøm | 12 m³/h |
| Lufttemperatur innstillingsområde | 20 - 45 °C |
| Lufttemperatur fabrikkinnstilling | 45 °C |
| Luftvolumstrøm avsug | 10 m³/h |
| Volum varmtvannsbereder | 1,8 l |
| Vanntemperatur fabrikkinnstilling | 37 °C |
| Vanntemperatur innstillingsområde | Ledningstemp. -39 °C |
| Vekt | 32 kg |

Modellene GS-8000+ og VS-8000+

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Spylemengde fabrikkinnstilling | 6 og 3 l |
| Nominell spenning | 230 V AC |
| Nettfrekvens | 50 Hz |
| Inngangseffekt | maks 1100 W |
| Inngangseffekt standby | 5 W |
| Lengde nettleiding | 1,7 m |
| Innkapsling | IP x 4 |
| Strømningstrykkområde | 1 - 10 bar |
| Gjennomstrømningsmengde | 1,4 - 5,5 l/min |
| Luftvolumstrøm | 12 m³/h |
| Lufttemperatur innstillingsområde | 20 - 45 °C |
| Lufttemperatur fabrikkinnstilling | 45 °C |
| Luftvolumstrøm avsug | 10 m³/h |
| Volum varmtvannsbereder | 1,8 l |
| Vanntemperatur fabrikkinnstilling | 37 °C |
| Vanntemperatur innstillingsområde | Ledningstemp. -39 °C |
| Vekt | 45 kg |

Miljøvern

Innholdsstoffer

Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EF), også RoHS. Dette betyr at produktet i stor utstrekning er fri for miljøskadelige substanser som for eksempel bly, kvikksølv, kadmium og krom.

Deponering

I henhold til EU-direktivet "Waste Electrical and Electronical Equipment" (2002/96/EF), også kalt WEEE, er produsentene av spesielt elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette forskriftsmessig. Toalettet er ikke underlagt denne standarden.

I egenskap av miljøpioner ønsker Funksjonsutstyr å gi et positivt signal og overfører derfor frivillig disse kravene til også å gjelde alle dusjtoaletter. Alle gamle dusjtoaletter kan returneres gratis til Funksjonsutstyr for forskriftsmessig deponering og resirkulering. Denne ordningen gjelder også for Geberit i Norge, Sveits og alle EU-land. Informasjon om retur oppgis på telefon 23 38 00 00.

Garantier og kontaktinformasjon

Garantier

Funksjonsutstyr garanterer for at toalettet ikke har material- og produksjonsfeil i et tidsrom på 2 år, regnet fra datoen toalettet er montert.

Kravet om garanti kan bare gjøres gjeldende dersom:

1. Produktet er montert av autorisert rørlegger
2. Produktets feil ikke skyldes feil montering, vedlikehold eller bruk
3. Det ikke er utført endringer på produktet
4. Produktet er reparert med originale deler

Dersom det oppstår feil på produktet i garantitiden innrømmer Funksjonsutstyr gratis reparasjon og reservedeler. Dersom reparasjonen skal utføres av andre autoriserte aktører, skal dette avtales med Funksjonsutstyr på forhånd.

Kontaktinformasjon til kundeservice

For spørsmål om garantier, produktveiledning eller andre henvendelser ta kontakt med:

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
N-0692 Oslo

Tlf: 23 38 00 00
Faks: 23 38 00 05
E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no
Web: www.funksjonsutstyr.no



Martin Linges vei 25
N-0692 Oslo

Tlf: 23 38 00 00

Faks: 23 38 00 05

E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no

Web: www.funksjonsutstyr.no

Facebook: www.facebook.com/funksjonsutstyr