

C.1 Laid



BRUKERVEILEDNING

C.1 Laid

Fingervibrator for kvinner og menn

Brukerveiledning C.1Laid - fingervibrator




Kjære bruker av **fingervibratoren C.1**. Vi ønsker at du leser godt i gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet.

I esken

I esken finner du **C.1**, USB-ladekabel og brukermanual.

Om C.1.

C.1 er oppladbar. Den har to vibrasjonshastigheter (nivå 1 og nivå 2) og en pulseringsfunksjon. Utformingen av **C.1** gir vibratoren en rekke muligheter for variasjon i bruk. Nedenfor finner du ulike illustrasjoner om hvordan den kan holdes ved hjelp av en eller flere fingre.

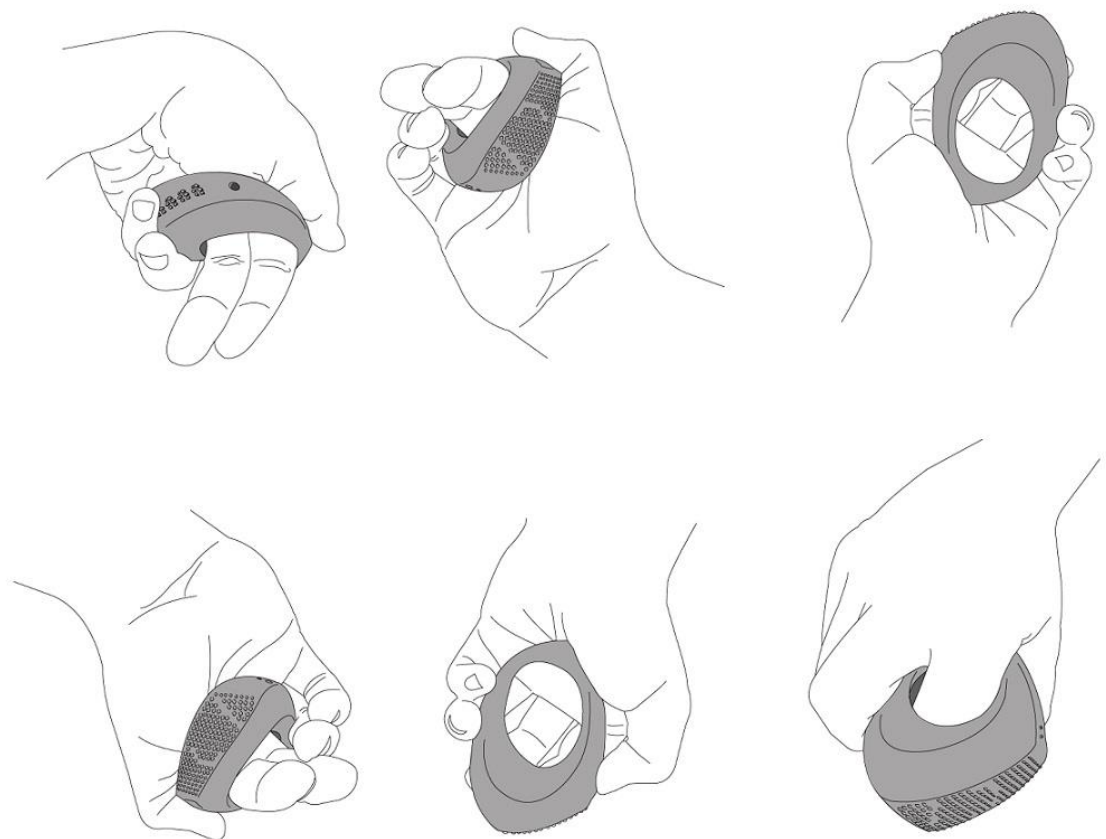

Laid


Bruk av C.1 – Kvinner

C.1, med de ulike holdefunksjonene, ringformen med riller på innsiden og den knudrete overflaten på toppen, er utformet på en slik måte at den skal gi en best mulig punkt- og områdestimulering av kvinnens vulvaområde. Vulva, som omfatter klitoris, kjønnslepper og det følsomme området fra urinrør til skjedeinngang er rikt forsynt med berøringsnerver.

C.1. passer utmerket for kvinner med stramme/vonde bekkenbunnsmuskler fordi vibrasjon fremmer avspenning, den passer for kvinner med nedsatt blodsirkulasjon, og den er ypperlig ved nedsatt seksuell funksjon som lystproblemer eller problemer med å oppnå orgasme.

C.1. benyttes også av kvinner som har hatt ulike operasjoner i underlivet, som har stråleskader etter underlivskreft eller som lider av ulike sykdommer som f.eks diabetes eller MS da den øker blodgjennomstrømmingen, følsomheten og sensitiviteten i vulvaområdet. I tillegg bidrar vibrasjon til å dempe smerte.

Hold vibratoren (se forrige side) på den måten som passer deg og hva du ønsker å oppnå (punktvis vibrering eller stimulering av hele vulvaområdet).

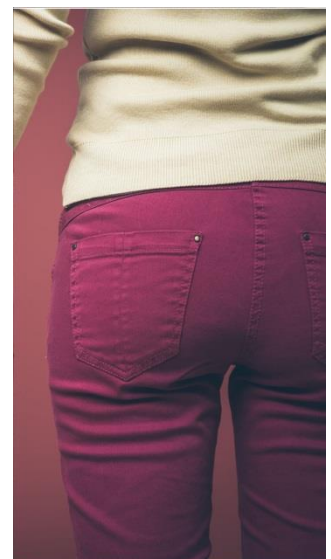

Bruk av C.1 - Menn

C.1. passer også for menn, fordi utformingen passer i forhold til stimulering av de sensitive områdene på penis, i perineum (området fra skrotum (fra pungen)) til analåpningen og i anus. C.1s formål er her å øke blodgjennomstrømming, dempe smerte, øke følsomhet, oppnå raskere ereksjon og evt. sædutløsning.

C.1 benyttes av menn med stramme/vonde bekkenbunnsmuskler fordi vibrasjon fremmer avspenning og demper smerte, den passer for menn med nedsatt blodsirkulasjon, og den kan også brukes ved nedsatt seksuell funksjon som ereksjonsproblemer (gjerne i bruk sammen med andre hjelpemidler, som f.eks penispumpe).

C.1. benyttes også av menn som har gjennomgått operative inngrep i underlivet, bl.a. prostataoperasjon, eller som lider av ulike sykdommer som f.eks diabetes eller MS, eller som har opplevd skader i underlivet. En god blodgjennomstrømming til penis er viktig for denne gruppen for å kunne opprettholde eller gjenopprette ereksjon på sikt med eller uten andre hjelpemidler.



Hold vibratoren (se forrige side) på den måten som passer deg og hva du ønsker å oppnå - punktvis vibrering på penis eller mot anus, eller liggende mot et større område på penis eller i området mot anus.

ENKEL VEILEDNING FOR VELLYKKET BRUK AV C.1

A. SØRG FOR AT DEN ER REN


Tørk av **C.1** med en fuktig klut. Bruk mild såpe og varmt vann. Sørg for at den er helt tørr før du lader den.

B. SØRG FOR AT DEN ER LADET

Lading: Sett pluggen i ladehullet på vibratoren og ladekabelen i enten en USB-adapter eller i en USB-port på en PC.

Et lys vil blinke hvert 0,5 sekund under lading. Når lyset slutter å blinke (står kontinuerlig på) er vibratoren fulladet.

Du kan lade **C.1** uavhengig av hvor mye batterikapasitet som gjenstår. Det er ikke nødvendig å lade ut batteriet. Som en tilleggsfunksjon vil det blinke 5 ganger på rad hvert annet sekund når batteriet må lades (ved 5 % kapasitet.) Den vil også gjøre dette når den er av/i standby-modus.

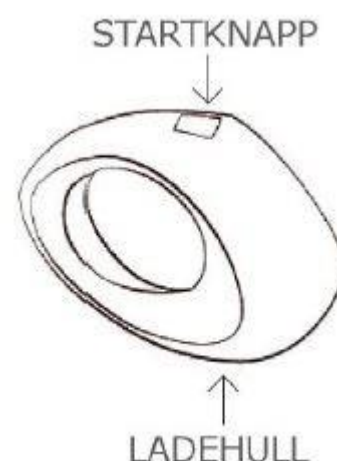

Første gang du lader **C.1**: La den lade til det lyser kontinuerlig. Husk og trekk ut ladekabelen når vibratoren ikke skal lades lengre.

C. SETT I GANG - HVORDAN ANVENDE C.1

Skru av og på: Trykk på knappen og hold den inne i 2 sekunder. Vibratoren starter automatisk på laveste vibrasjonsnivå, nivå 1. For å skru av holder man knappen inne i 2 sekunder.

Veksle mellom hastigheter/pulsering:

Fra nivå 1, trykk på knappen en gang (ikke hold den inne) for å øke vibrasjonshastigheten til nivå 2.

Trykk en gang til for å gå videre til pulseringsfunksjon. Trykk nok en gang for å komme tilbake til nivå 1.

FEILSØKING

I. Lyset blinker ikke under lading.

-vibratoren **C.1** er fulladet

-USB-ledningen er ikke plugget ordentlig inn i **C.1**, USB porten eller adapteren. Sjekk at den er koblet riktig.

-Adapteren er ikke satt i riktig. Sjekk at kontakten er ordentlig plugget i støpselet.

-Om man lader via PC, sjekk at PC har strøm.

II. **C.1** skrur seg ikke på når man holder knappen inne

-batteriet er utladet. Sett det til lading.

III. Lyset rundt knappen begynner å blinke i intervaller.

-indikasjon på lav batterikapasitet og at vibratoren bør lades. Blinkingen stopper når batteriet er helt utladet.

RENGJØRING

Vask **C.1** med mild såpe og vann. La lufttørke eller tørk av med rent håndkle/tørr klut.

AVHENDING AV PRODUKTET

C.1 har et oppladbart lithium batteri. Dette skal ikke kastes som vanlig søppel. Produktet skal derfor returneres som elektronikk avfall på miljøstasjoner.

SPESIFIKASJONER

Materialer: 100 % Body-safe silikon og ABS

Vekt: 70 gram.

Batteri: Lithium-ion

Lading: 120 minutter

Brukstid: Opptil 110 minutter

Standby-tid: 90 dager når fulladet



ANSVARFRASKRIVELSE

Brukere av **C.1** gjør dette på eget ansvar. Quintet AS påtar seg ikke noe ansvar for bruken av **C.1**

FORHÅNDSREGLER

For å unngå risiko for elektrisk støt eller skade, brannskader eller brann:

1. **Ikke** oppbevar **C.1** eller ladekabelen i vann eller annen væske
2. **Ikke** bruk ladekabelen dersom den har havnet under i vann/væske
3. **Ikke** bruk eller skru på **C.1** mens den lader

4. **Ikke** forsøk å lade **C.1** med en annen USB-ladekabel enn den som følger med produktet.
5. **Ikke** bruk en transformator (volt konverterer) i sammenheng med lading
6. **Ikke** tving USB-kontakten inn i USB-porten eller adapteren om den av en eller annen grunn ikke går inn enkelt
7. **Ikke** bruk ladekabelen eller adapteren du benytter om de på noen måte er ødelagt
8. **Ikke** lad **C.1** der den kan falle i vann eller annen væske, for eksempel en vask, badekar eller toalett
9. **Ikke** sett ladekabelen i PC eller annen strømtilførsel om den er våt eller du er våt på hendene
10. **Ikke** rengjør **C.1** mens den lader
11. **Ikke** rengjør ladekabelen når den er koblet til PC eller en strømkontakt via adapter
12. **Alltid** sjekk at **C.1** er helt tørr før du setter den til lading
13. **Alltid** bruk en jordet veggkontakt
14. **Ikke** lad **C.1** utendørs
15. **Ikke** lad eller bruk **C.1** når aerosol sprayprodukter benyttes eller der oksygen blir administrert
16. **Ikke** forsøk å åpne **C.1** eller på annen måte dekonstruere produktet eller dets komponenter. Dette kan føre til skade og vil oppheve garantien på produktet
17. **Ikke** sett til lading hvis **C.1** ikke fungerer normalt
18. **Aldri** bruk **C.1** hvis den har falt i gulvet eller blitt ødelagt
19. **Aldri** bruk ladekabelen om den på noen måte er ødelagt eller har ligget i vann
20. **Ikke** brenn **C.1** eller ladekabelen eller noen av produktets komponenter
21. **Alltid** sørg for å returnere **C.1** og ladekabelen på ordentlig vis (som el-retur)

22. **Ikke** ta batteriet ut av **C.1** eller forsøk å ta batteriet fra hverandre eller la det berøre noe annet
23. Hold **C.1** og ladekabelen unna varme overflater
24. **Ikke** slipp **C.1** i gulvet. Dette kan forårsake skade og garantien kan opphøre
25. **Ikke** legg **C.1** eller ladekabelen i oppvaskmaskin når den er i bruk eller for å rengjøre dem
26. **Ikke** bruk **C.1** under et teppe/dyne eller pute eller annet beskyttende lag. Dette for å unngå overoppheting.
27. **Ikke** la **C.1** bli liggende skrudd på noe sted uten oppsyn
28. Unngå å la **C.1** eller ladekabelen ligge i solen og aldri utsett disse for ekstrem varme
29. **Ikke** bruk **C.1** i saltvann, kun i ferskvann
30. **Ikke** ha **C.1** på mer enn 1 meters dybde under vann

GARANTI

Quintet AS garanterer dette produktet i 1 år (2 år for forbrukere i Norge) fra dato for anskaffelse mot defekter/feil som resultat av produksjonsfeil. Skulle produktet svikte i garantiperioden og så sant produktet ikke har vært brukt på annen måte enn det som er spesifisert eller bruksanvisningen ellers ikke er fulgt, dekkes dette av garantien. Garantien dekker ikke uhell, feilbruk eller forsømmelse av produktet. Garantien opphører ved ethvert forsøk på å åpne eller ta fra hverandre produktet eller dets tilbehør. Garantien dekker ikke normal slitasje ved ordinær bruk.

Skulle det oppstå feil som garantien dekker, er dette Quintets ansvar og Quintet AS vil erstatte produktet med et nytt produkt. Betingelsene for dette er at Quintet kontaktes innenfor

garantiperioden, kjøpsbevis som dokumenterer kjøpsdato må fremlegges og at retur av feilvaren er godkjent av Quintet AS. Skjema for reklamasjon finnes på www.quintet.no. Legg gjerne dette skjemaet i forsendelsen. Porto må betales. Frakt er ikke refunderbart.

KONTAKTINFORMASJON


Vi i Quintet AS hører gjerne fra deg og veileder deg gjerne dersom du har spørsmål angående bruken av **fingervibratoren C1**. Du kan gjerne kontakte oss både på telefon 55981555 eller via E-mail post@quintet.no.

Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og service. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, som betyr at vi har gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav. Dette er et norsk, offentlig sertifikat støttet av Miljøverndepartementet. Våre produkter er CE-godkjente, som betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til sikkerhet og helse og kan markedsføres og brukes innen dette området.



Brukerveiledning C.1Laid - fingervibrator

Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse.

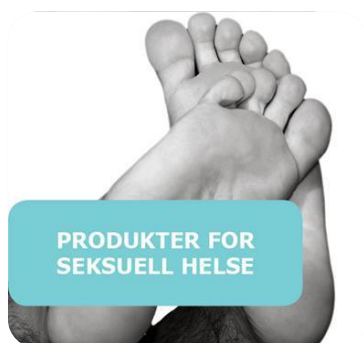

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse • quintet.no • 55 98 15 55 • post@quintet.no

QUINTET