


orca[™]

Norsk bruksanvisning

N INNHOLDSOVERSIKT

Sikkerhet	4
Garanti.....	4
Vedlikehold	4
Orca.....	5
Produkt identifikasjon	6
Mål.....	7
Produsent	7
Tekniske data	7
Forhandler	7

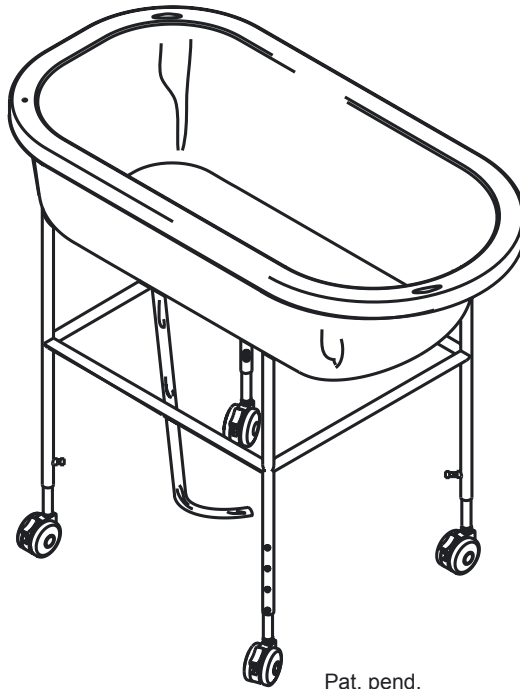

N ORCA BADEKAR


Orca badekar fra R82 er montert på stativ slik at den som steller barnet får passe arbeidshøyde når barnet bades.


Denne bruksanvisningen vil være til god nytte for å få full utnyttelse av produktet.



N SIKKERHET

Orca er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 – Direktiv om medisinsk utstyr.

 Ved ombygging av produktet og ved bruk av uoriginale deler skal CE-merket fjernes fra produktet.

 Etterlat aldri et barn i produktet uten tilsyn av en voksen. Feil bruk av produktet kan medføre alvorlige skader på brukeren. Kontroller jevnlig at alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er forsvarlig utført.

N GARANTI


R82 gir 2 års reklamasjonsrett på produktet.

R82 A/S gir 12 måneders garanti på produktet. Garantien gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt når tilpassingene er utført av R82 eller samarbeidspartnere. R82 kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller brukeren hvis det er brukt uoriginale reservedeler og tilbehør, eller hvis det er utført reparasjoner av andre enn R82 eller samarbeidspartnere.

N VEDLIKEHOLD


De runde og glatte overflatene er lette å rengjøre. Produktet bør rengjøres hver gang det har vært brukt.


 Ikke bruk rengjøringsmidler med klor eller sprit.


 Justeringer og endringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen skal kun utføres av R82 eller samarbeidspartnere.

N ORCA

- A) Orca er montert på høydejusterbar ramme.
- B) Orca har låsbare hjul.
- C) Orca har avløpslange til tømning av badekaret.

 Hjulene skal alltid være låst når barnet bades. Det er viktig at barnet alltid er under oppsyn når det oppholder seg i badekaret. Sjekk alltid badevannstemperaturen før barnet plasseres.

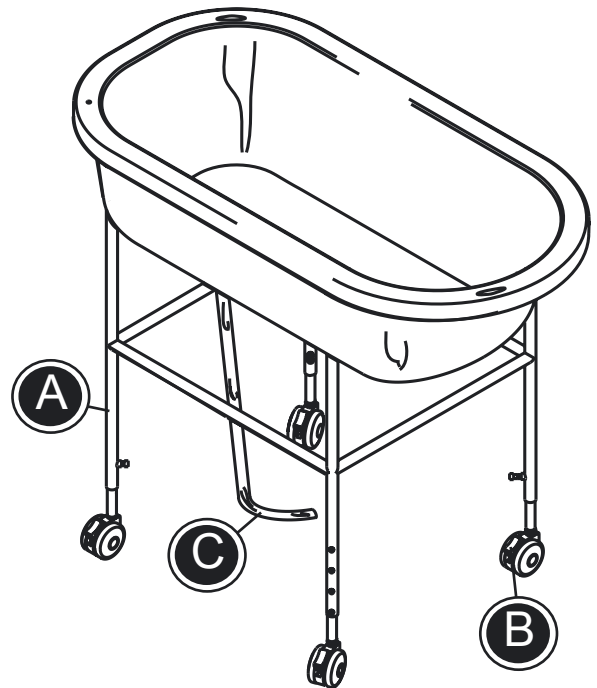

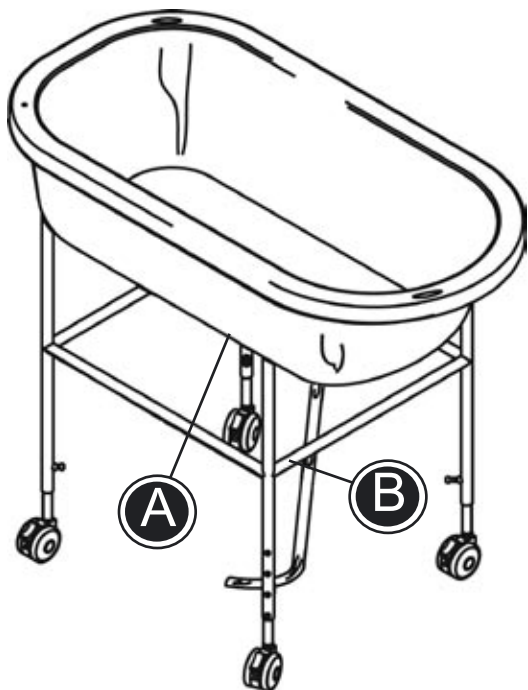

N PRODUKT IDENTIFIKASJON

A) Serienr.

Merket er plassert på rammen under badekaret.

B) Produsent


Merket er plassert til venstre bak på rammen.

A



B



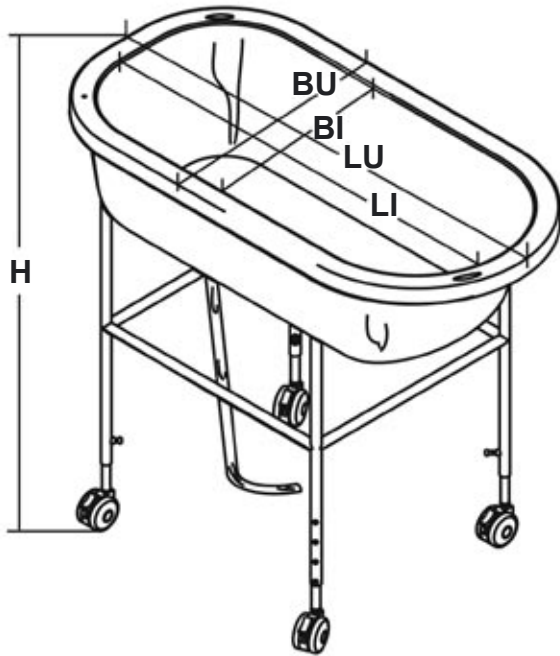

N MÅL

Lengde, utvendig (LU)	115 cm
Lengde, innvendig (LI)	104 cm
Bredde, utvendig (BU)	60 cm
Bredde, innvendig (BI)	48 cm
Høyde over gulv (stillbar) (H)	94-124 cm
Maks belastning	50 kg

N TEKNISKE DATA

Badekar: Glassfiber
Ramme: Stål 37, pulverlakkert

N PRODUSENT

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved

N FORHANDLER



Find din forhandler på www.r82.dk