

BADEBUKSE

Sendingen inneholder..... stk. badebukse i samsvar med ditt målskjema.

Ved av-og påtagning:

Buksen er talkumert på innsiden av neoprenet for å lette påtagningen. Unngå å dra i neoprenet, ta tak i det blå stoffet. Dette forlenger produktets levetid.

Vedlikehold:

Etter bruk i klor- eller saltvann bør badebuksen skylles godt. Buksen kan vaskes ved 40°C uten skyllemiddel. Gjentatt talkumering anbefales.

Brukertips:

Gå ut i vannet til vannet rekker nesten opp til neoprenlinningen i livet. Stikk en finger innenfor kanten på neoprenet og slipp ut overflødig luft. Dette reduserer muligheten for vanninntrengning i buksen.

Ved eventuelle henvendelser til oss angående denne leveranse, vennligst oppgi ordrenummer.