


# QT4 MIC TILBEHØRSGUIDE

## BRUG AF QT4 MIKROFON OG CLIP

Metalplade med nøglebåndshul  
(holder clippen magnetisk til beklædning)

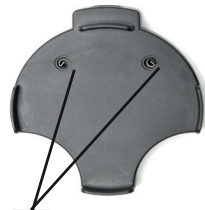


Magnetkontakter på clip



USB-ladestik



Nøglebånd med justerbar  
strop og fastgørelseselement

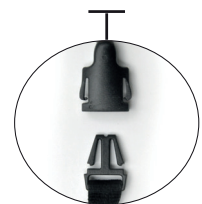

Ladekontakter (forsænkninger)




**MMFB Mikrofon multifunktionsknap:**  
Knappen bruges til at parre og forbinde  
QT4 Mic til Quattro 4L enheden og justere  
følsomhedsniveauet af QT4 Mic.




**Batterikontakt:** Der er en batterikontakt på  
QT4 Mic. Denne kontakt SKAL være i + position  
på Mic 4.0, for at enheden kan fungere. Når  
der skiftes - position, frigøres batteriet fra  
kredsløbet. Denne kontakt skal IKKE sættes i  
- position. Formålet med den er at  
beskytte batteriet under opbevaring.

### 1.

## OPLADNING AF DIN QT4 MIC VED HJÆLP AF CLIPPEN

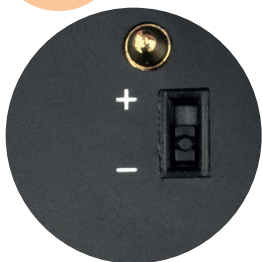

**TRIN 1:** Brug spidsen af en pen til at flytte batterirummet +/- kontakt til + position på QT4 Mic.  
**Sluk IKKE!**

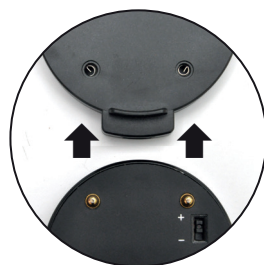

**TRIN 2:** Sørg for, at din QT4 Mic er sikkert placeret i clippen med metaldupperne på mikrofonen på linje med forsænkningerne i clippen.



**TRIN 3:** Sæt USB-kablet i ladestikket på clippen.



**TRIN 4:** Stik den anden ende af USB-kablet i strømadapteren.



**TRIN 5:** Stik strømadapteren i stikkontakten.



**TRIN 6:** Du ser et rødt lys på QT4 Mic, hvilket angiver, at den bliver opladet.



**TRIN 7:** Når opladningen er 100 % færdig, bliver lyset blåt.

## 2.

### SÅDAN BÆRES QT4 MIC CLIPPEN

QT4 Mic clippen kan bæres på mange måder.



**MULIGHED 1:** På tøjet - Fastgør den med metalpladen til beklædningen på den, som taler. For bedste ydelse placeres clippen så tæt på munden som muligt.



**MULIGHED 2:** Brug af nøglebåndet - Fastgør nøglebåndet til hullet i metalpladen. Metalpladen sætter sig magnetisk fast på bagsiden af clippen. Hæng nøglebåndet omkring halsen og skub plastikjusteringen for at tilpasse længden.




**MULIGHED 3:** I bilen - Når du kører bil, kan du fastgøre clippen til sikkerhedssele på den person du snakker med, på samme måde som på tøjet.

## 3.

### PARRING OG TILSLUTNING AF QT4 MIC TIL QUATTRO 4L

QT4 Mic er allerede parret fra fabrikken. Hvis den imidlertid af en eller anden årsag blev fjernet fra parringslisten, er det nemt at genparre den. **TIP:** QT4 Mic skal være inden for 10 m. fra Quattro 4L for at fungere korrekt.

#### PARRING

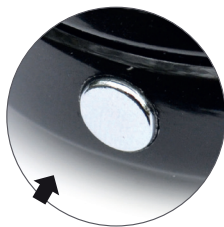

**TRIN 1:** Sørg for, at der er slukket for Quattro 4L, tryk og hold derefter multifunktionsknappen (MMFB) i cirka seks sekunder, indtil LED'en blinker rødt og blåt.



**TRIN 2:** Hurtig parring og forbindelse af QT4 Mic: Tryk og hold MMFB på mikrofonen, til den blinker rødt og blåt.




**TRIN 3:** Quattro 4L siger "Paired" og derefter "Device (nummer) connected".

#### FORBIND OG BRUG



**TRIN 1:** Sæt QT4 Mic i en position, hvor den bedst fanger de(n) stemme(r), du vil høre. På QT4 Mic trykkes der KORTVARIGT på MMFB på mikrofonen, og enheden begynder at forbinde til Quattro 4L.

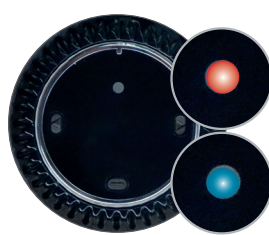

**TRIN 2:** Quattro 4L LED'en blinker rødt og blåt og forbinder automatisk.



**TRIN 3:** Rul gennem de fire niveauer af lydfølsomhed ved at trykke og slippe MMFB, indtil du når det ønskede niveau.



**TRIN 4:** For at afslutte forbindelsen, trykkes og holdes MMFB. Quattro 4L siger "Call Terminated".

## 4.

### PARRING OG TILSLUTNING AF QT4 MIC TIL ANDRE BLUETOOTH AFLYTNINGSSEHEDER

Du kan også bruge din QT4 Mic sammen med andre Bluetooth aflytningsenheder. Se din Bluetooth aflytningsenheds brugervejledning for at finde multifunktionsknappen til parring og identificere dens parringsindikatorer. Når dine enheder er parret, skal du trykke på MMFB på din QT4 Mic for at tilslutte og bruge den, og den vil påbegynde et opkald til aflytningsenheden. Se brugervejledningen til din Bluetooth aflytningsenhed for svar og forbindelsesanvisninger.