

# Calexotics trusevibrator



Calexotics trusevibrator er en kraftig vibrator som plasseres sikkert og diskret i trusen. Vulva, som omfatter klitoris, kjønnslepper og det følsomme området fra urinrøret til kjedeinngangen er rikt forsynt med nerver. Når vibratoren er operativ gir den god stimulering av dette sensitive område.

Vibratoren benyttes av kvinner med nedsatt seksuell funksjon, ved sykdom som MS eller diabetes, etter overgangsalder, stråleterapi eller ulike operative inngrep. Vibratoren hjelper med å øke blodgjennomstrømming som igjen gir bedre følsomhet i områder med nedsatt sensibilitet.

For menn benyttes vibratoren for å øke blodtilstrømming i området rundt penisroten, penis og perineum.

Vibratorsett består av en trusevibrator, en fjernkontroll og en USB lader. Vibratoren lades før bruk i 90 min. Det er viktig at ladeledning settes helt inn i selve vibratoren.

**Lading:** Sett inn ladekabelen i utgangen på vibratoren (du finner denne ved siden av tegnet DC, i den ene enden) og i utgangen på fjernkontrollen (i enden). Ladekabelen er en USB ladekabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapter i stikkontakten. Husk å lade vibratoren når den er tørr. Ladeledning må settes helt inn i vibratoren.



**På/AV:** Slå på vibratoren ved å trykke på ON/OFF knappen i 3 sekunder. Et rødt lys vil synes, og vibratoren vil gi fra seg en liten bevegelse. Du trykker på «XO»-tegnet på fjernkontrollen for å starte vibratoren. Du slår den av på ved å trykke 3 sekunder på «XO»-tegnet på fjernkontrollen. Selve vibratoren kan du også slå av ved å trykke 3 sekunder på ON/OFF knappen.

**Bruk:** Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på vibratoren (se at det røde lyset er på). Legg vibratoren i trusen, over klitorisområdet. Brett eller skyv «vingene» over trusekanten for å holde vibratoren på plass. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren.

**Endre vibrasjonsfrekvens:** Trykk kort på ON/OFF knappen på selve vibratoren eller trykk kort på «XO» på fjernkontrollen. Vibratoren har 12 ulike vibrasjons-innstillinger.

**Etter bruk:** Vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibratoren.

## Spesifikasjoner:

Materialer:	Body-safe silikon og ABS
Størrelse:	9,5 cm x 2,5 cm
Batteri:	USB lader inkludert
Lading:	90 min
Bruktid:	Opptil 80 min
Vanntett:	Ja

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse • [quintet.no](http://quintet.no) • 55 98 15 55 • [post@quintet.no](mailto:post@quintet.no)

# QUINTET