

Ergo MASTER

®

Brugervejledning



Når mobiliteten forringes....

Lav vægt

Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær




The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten



Ergo MASTER

The Original Scandinavian Human Handling System

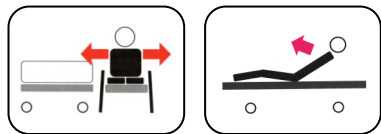

Produktbeskrivelse:

Ergo MASTER bruges til at stemme fra med, når man som bruger skal flytte sig siddende fra seng til stol, højere op i seng, rejse sig op fra siddeunderlag mm.

Ergo MASTER kan med stor fordel anvendes i kombination med Master GLIDE Glidebrætter, som samtidig fungerer som flytte- og glideunderlag.

Ergo MASTER leveres med skridsikker belægning på underside og håndtag.

ADVARSEL

- Anvend aldrig et defekt hjælpemiddel.
- Ved forflytning af personer med indskrænket bevægelighed anvendes produktet kun med hjælper.
- Anvend ikke Ergo MASTER ved for blødt eller ustabil underlag, da dette kan medføre vrid af håndled med alvorlige skader til følge.

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:	Støbt poly-styrene	
Materiale underside:	EPDM naturgummi	
Farve:	Grå med sort gummi Belægning	
Vægt:	300 gr. Pr. stk.	



VASKEANVISNING

Ergo MASTER kan aftørres med klud med diverse rengøringsmidler.

Produktet kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.

Master CARE
Højvænget 1
8330 Beder
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk