



Produkter til badeværelse

2006

pressalit
care




Det velfungerende rum

Hemmeligheden bag Pressalit Care-systemets fleksibilitet er skinnen. På en nem og logisk måde kan badeværelset indrettes til den enkelte bruger, uanset funktionsevne.

Skinnen gør det både lettere for en bruger at klare sig selv og for en hjælper at hjælpe til: lettere at klargøre rummet, lettere at skabe plads, lettere at hjælpe med forflytninger og lettere at kombinere brugen af badeværelsets funktioner. Endelig giver skinnen mulighed for at omdisponere små og dårligt indrettede rum. Produkterne flyttes nemt derhen, hvor der er brug for dem – eller de flyttes væk for at give plads.

Midlet til at nå en så enestående grad af fleksibilitet hedder samarbejde. Og alle forfølger samme mål. Pressalit Cares produkter skabes gennem samarbejde og teamwork. Brugerens og hjælperens erfaring kombineres med Pressalit Cares udviklingskompetencer og studier i menneskets bevægelsesmønstre og pladskrav. Målet er et bedre liv for mennesker med nedsat funktionsevne, et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet og en bedre, mere langsigtet løsning for den ledelse, der skal investere. Vores måde at gå til opgaven på har vi sammenfattet i to ord: keep living.

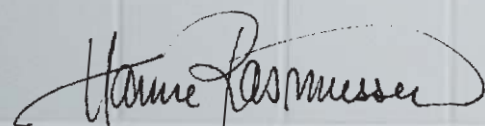

Hanne Rasmussen

Arkitekt og forsker, Pressalit Care





Materialevalg

Pressalit Care har kombineret materialer, farver og design til en karakteristisk enhed. Farver og materialer kan skabe sikkerhed – give orientering og vejledning. Samtidig har Pressalit Cares produkter en række mærkninger som garanti for den kvalitet, der er lagt i forarbejdningen.

Metaller

Skinne, ophæng og konstruktionsdele signalerer styrke og stabilitet.

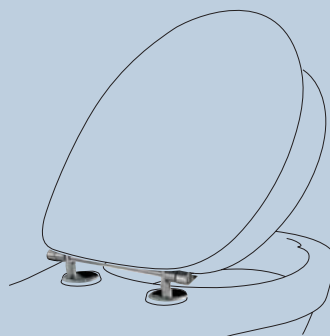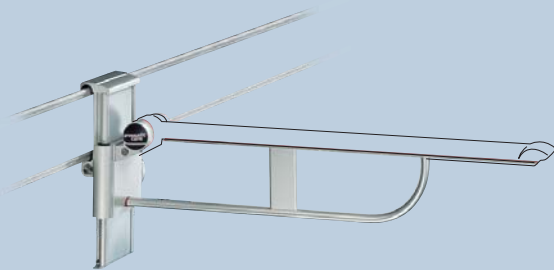

Anodiseret aluminium

Aluminium er både meget forbart og let. Anodiseringen beskytter overfladen og gør den stærk. Anodiseret aluminium giver mulighed for at skabe funktionelle og elegante løsninger.

Rustfrit stål

Det modstandsdygtige rustfrie stål anvendes især til beslag og konstruktionsdele, der udsættes for stor slitage og kraftig belastning.

Rilsan-coatet stål

Rilsanen på Pressalit Care Basic-produkterne er meget modstandsdygtig over for slag, slid og korrosion.

Pulverlakeret aluminium

Håndgreb med polyesterlak har en smuk overflade, der også er slidstærk.



CE-mærkning

Pressalit Cares erklæring om, at produkterne lever op til EU's sikkerhedskrav i bl.a. "Direktiv for medicinske anordninger 93/42/EØF", klasse I.



Pressalit Care A/S, Denmark

ISO 9001

Pressalit Care har siden 1993 været ISO 9001-certificeret inden for kvalitetsstyring.



Pressalit Care A/S, Denmark

ISO 14001

Pressalit Care har siden 1997 været ISO 14001-certificeret inden for miljø.




Garanti: 3 år

Pressalit Care forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- og fabrikationsfejl.

Kunststoffer med varierende egenskaber

Berøringsflader som sæder, ryglæn og støttegreb signalerer blødhed, varme og skridsikkerhed.

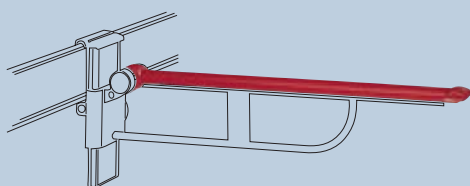


Tokomponent plast

Materialet giver en blød og skridsikker flade på toiletstøtter og armlæn.



Purskum

Anvendes, hvor der ønskes bløde og varme overflader. Polyuretan som celleplast er meget formbart og stabiliseres med fx trækerner. Overfladen farves og beskyttes med en elastisk lak.

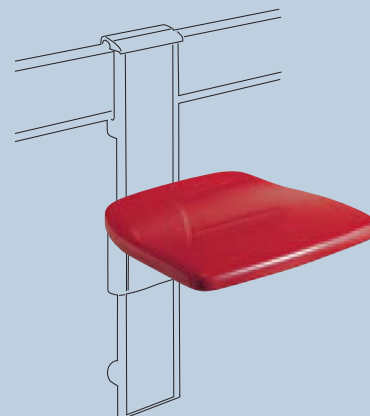

Hærdeplast

Et hårdt og glansfuldt materiale, der kan støbes til en lang række former. Materialet er gennemfarvet og ridsefast.

Polystyren, PS-plast

Frontplader i et hårdt, stift og modstandsdygtigt materiale.

ABS-plast

Håndgrebene i plast er gennemfarvede og derfor modstandsdygtige over for ridser. Materialet er slagfast og føles ikke koldt.

Rengøring: Alle produkter kan rengøres med almindeligt sæbevand - undgå aggressive rengøringsmidler.

Farver

Kan orientere og vejlede en person og skabe kontrast til omgivelserne.



000 Hvid



035 Rød RAL3003



108 Mørkeblå RAL5011




164 Grå



166 Turkis

Indstillingsmuligheder

Pressalit Care er et produkt- og indretningssystem, der giver frihed til at planlægge et badeværelse, så det nøjagtigt matcher de aktuelle behov. Med skinnesystemet kan en indretning ændres og udbygges ved ændrede betingelser. Vælg produkt og system efter bruger-situationen.


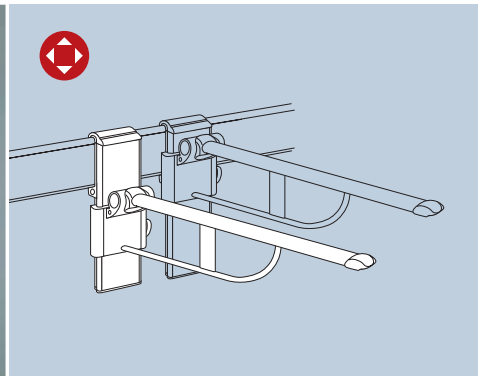


Produkt på vandret og lodret skinne

Produktet kan indstilles vandret langs skinnen og lodret i højden.

Produktet kan

- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor der er vandret skinne
- udskiftes og udbygges

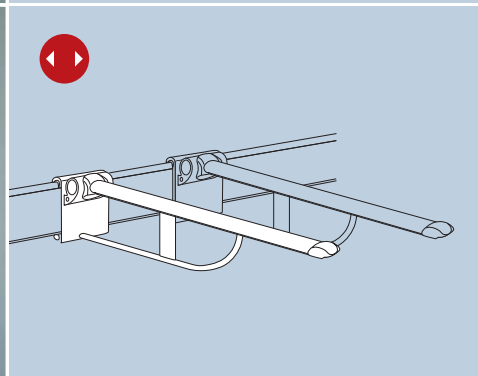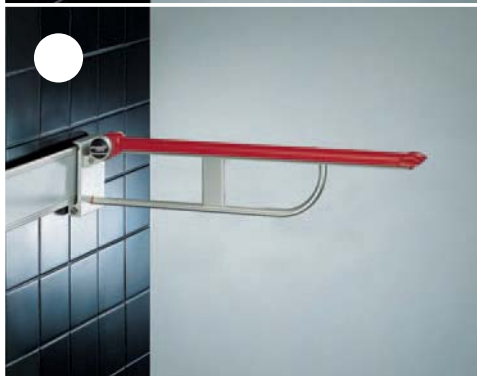


Produkt på vandret skinne

Produktet kan indstilles vandret langs skinnen.

Produktet kan

- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor der er vandret skinne
- udskiftes og udbygges


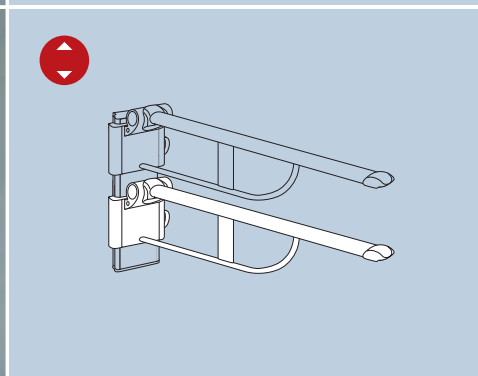


Produkt på lodret skinne

Produktet kan indstilles lodret i højden.

Produktet kan

- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor der er lodret skinne
- udskiftes og udbygges

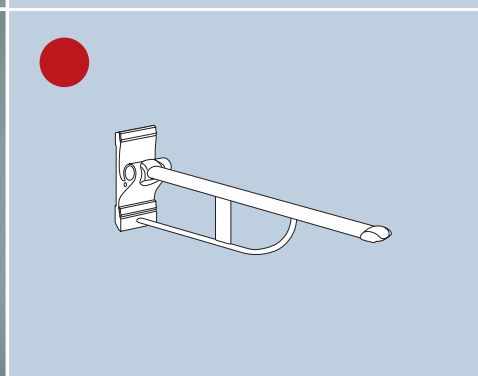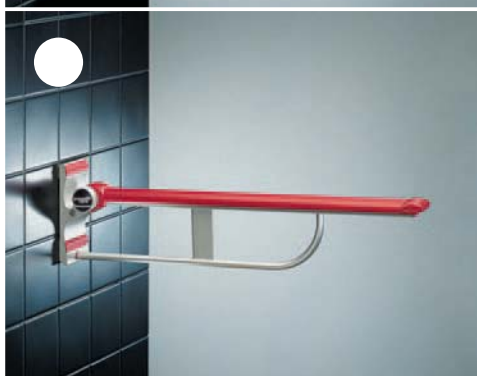

Produkt er fastmonteret

Produktet kan ikke indstilles.

Produktet har ingen tilpasningsmulighed efter montering.

Skønsvist har 80% af alle brugere behov for både lodret og vandret indstilling på grund af deres fysiske situation: Vekslede mellem at være selvhjulpne og ikke-selvhjulpne, ændring fra at være gående til siddende/liggende, at have en fremadskridende sygdom eller at være et barn, som vokser. Hvis man er i tvivl om, hvem der bliver bruger af badeværelset, bør man vælge produkter, der kan indstilles både vandret og lodret.

Vandret/lodret

Vandret og lodret indstilling giver maksimal fleksibilitet og indretningsfrihed. Vandret indstilling for individuelle tilpasninger – afstand mellem produkterne efter personstørrelse. Skaber funktionssammenhæng – toilet/håndvask. Skaber plads til hjælpere og mobilitetshjælpemidler. Lodret indstilling for individuelle højder – stående/siddende – barn/voksen.

Hvor brugeren ikke på forhånd kendes.

Ved skiftende brugere.

Hvor en bruger veksler mellem at være

- selvhjulpne og ikke-selvhjulpne

- gående og siddende/liggende.

Hvor sygdomsforløbet er progredierende, dvs. fremadskridende.

Ved personer i voksenalderen.

Eksempler: Hospitaler, optrænings- og rehabiliteringscentre, plejehjem, ældreboliger, kollektivboliger, hoteller, feriesteder og private hjem.

Vandret

Vandret indstilling for individuelle tilpasninger – afstand mellem produkterne efter personstørrelse. Skaber funktionssammenhæng – toilet/håndvask. Skaber plads til hjælpere og mobilitetshjælpemidler.

Samme situationer og steder som ovenfor, men hvor den/de aktuelle brugere ikke har behov for den lodrette indstilling.

Lodret

Lodret indstilling for individuelle højder – stående/siddende – barn/voksen.

Ved skiftende brugere i samme brugersituation.

Eksempler: Specialiserede hospitaler og institutioner.

Hvor sygdomsforløbet er stabilt.

Typisk i private hjem.

Fastmonteret

Produkterne kan ikke indstilles efter montering og kan derfor ikke individuelt tilpasses brugeren, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Ved den selvhjulpne bruger, hvis sygdomsforløb er stabilt.

Typisk i private hjem.

Hvor der stilles særlige krav til tyveri- og vandalsikring.

Eksempler: Offentlige handicaptoiletter og -badeværelser.

Påsætning og indstilling

Nedenfor er angivet, hvordan produkterne påmonteres og indstilles både vandret og lodret, hvilket varierer en anelse fra produkt til produkt. Skemaet på modsatte side giver et overblik over sortimentet.

Vandret skinne

Påsætning på vandret skinne.



Produktet sættes på skinnen.



Produktet placeres – indstilles vandret.



Fastspænding kan ske med sekskantnøgle, skruetrækker eller snaplås, afhængigt af produkt.

Fastgørelse og regulering på vandret skinne.



Sekskantnøgle/skruetrækker

Gælder hovedparten af produkterne. Vær opmærksom på, at såfremt produktet skal kunne forskydes vandret, spændes skruen meget let.



Snaplås

På enkelte produkter findes en snaplås for hurtig påsætning og aftagning fra skinnen. Låsen forhindrer ikke, at produktet kan forskydes vandret.

Lodret skinne

Påsætning på lodret skinne.



Produktet placeres over toppen af skinnen.



Produktet føres ned over skinnen.



Produktet fastspændes.

Fastgørelse og regulering på lodret skinne.



Låsegreb

Bruges til højderegulering af toiletstøtte på lodret skinne.



Betjeningsgreb

Bruges til højderegulering af ophæng til håndvaske med el eller gas.



Skjult betjeningsgreb

Bruges til højderegulering af fx brusebadestole og klapsæder på lodret skinne med hak.



Vandret/lodret

Vandret

Lodret

Fast

Pressalit Care

Side

Vægskinne				R9901-12 R9900/14/15	10-11
Ophæng til håndvask – el og gas	R4660/70 R4760		R4260/70 R4360		12-13
Ophæng til håndvask – manuelt	R4540		R4140		14-15
Ophæng til håndvask – el			R4920/21/30/31		16-17
Toiletstøtte	R3546/48 RF546/48	R3516/18 RF516/18	R3146/48 R9306/08 RF146/48 RF306/08	R3016/18 RF016/18	18-19
Toiletsæde				Se side	20-21
Forhøjet toiletsæde				Se side	22-23
Ophæng til toilet - el			R8240/41/45/46		24-25
Ophæng til toilet - manuel			R8141/46		24-25
Brusebadestol 410	R7656/58 R7565-68		R7256/58 R7165-68 R9700/01 R9600/01 R7142/43		26-27
Brusebadestol 310	R7550/51		R7150/51 R9705	R6010 R7010	28-29
Klapsæde	R5565		R5145 R9505	R5015	30-31
Bruseplejebriks			R8518/13	R8508/03	32-33
Opbevaring				Se side	34-35
Bøjlesystem				Se side	36-37
Hylde modul og trådkurv				Se side	38-39
Håndgreb og bruseforhængsstang				Se side	40-41
Håndgreb – elementer				Se side	42-43
Håndgreb – ABS				Se side	44-45
Håndliste				Se side	46-47
Håndvask og toiletskål				Se side	48
Frontstøtte og ryglæn				Se side	49
Armatyr				Se side	50
Håndbruser og bruseholder				Se side	51
Pressalit Care Basic toiletstøtte				R1100/01/02	52
Pressalit Care Basic armstøtte				R1170/71	52
Pressalit Care Basic bruseklapsæde				R1600/01/51	53
Fleksible til- og afløbssystemer				Se side	54
Elinstallationer				Se side	55

Vægsskinne

Skinnen er den bærende idé i Pressalit Cares produkter. Den vandrette skinne gør det muligt at forskyde produkterne langs væggen, den lodrette at indstille produkternes højde. Ved at kombinere vandret og lodret skinne opnås maksimal fleksibilitet – til gavn for både brugere og hjælpere. Mange af vores produkter findes også i en fastmonteret udgave.

Vandret vægsskinne

Fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt, fx en håndvask, over hele skinnens længde.

Fremstillet i massivt aluminium.

Frontplade i kunststof medfølger.

Leveres i både standard- og specialmål.

Kan monteres på alle typer vægge.

Afsluttes med endeadfæknings i kunststof.

Produktstopper fås som tilbehør.



Lodret vægsskinne

Fremstillet i massivt aluminium.

Frontplade i kunststof medfølger.

Leveres i både standard- og specialmål.

Kan monteres på alle typer vægge.

Afsluttes med endeadfæknings i kunststof.



Integreret produktstopper hindrer produkterne i at falde af skinnen.

Frontplade

- ① Alle vægsskinner leveres med frontplade i kunststof.

Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring.


Pladen glider nemt på plads i skinnen efter montering.



Montering – vandret skinne

Monteres med 2 monteringsbolte pr. løbende 100 mm. Afstand til hjørner: 100 mm – afstanden sikrer, at frontpladen efter skinnens montering kan glide på plads uden problemer. Den anbefalede afstand fra gulv til øverste bolt er 823 mm.

Bemærk: Bolte til montering medfølger ikke, men skal bestilles særskilt.

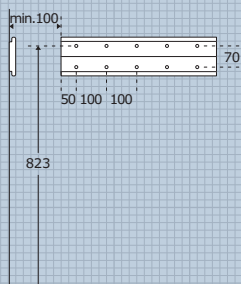


Montering – lodret skinne

De lodrette skinner monteres i forskellige højder – afhængigt af produkt: Højdemål A er afstanden fra gulv til øverste hul. Længde B er skinnens længde.

Se monteringshøjderne på de enkelte produktsider.

Bemærk: Bolte til montering medfølger ikke, men skal bestilles særskilt.

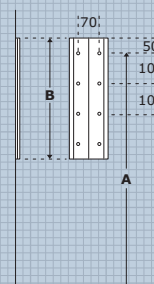

Materialer: Aluminium, kunststof


Maks. belastning: Tåler – afhængigt af væggens beskaffenhed – en vertikal belastning op til 1000 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com

Vandret vægskinne



600 mm	R9901
900 mm	R9902
1200 mm	R9903
1500 mm	R9904
1800 mm	R9905
2100 mm	R9906
2400 mm	R9907
2700 mm	R9908
3000 mm	R9909
3300 mm	R9910
3600 mm	R9911
3900 mm	R9912

Skinnen fås i specialmål op til 6000 mm og lagerføres i intervaller på 300 mm.

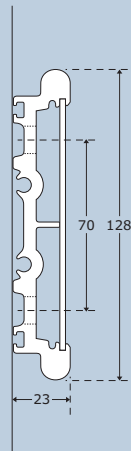
**R9906****Lodret vægskinne**

400 mm, til højdereg. toiletstøtte	R9900
400 mm, hak til højdereg. brusebadestol og klapsæde	R9914
600 mm, hak til højdereg. brusebadestol og klapsæde	R9915


Skinnen fås i specialmål.

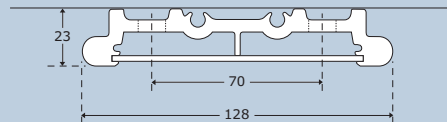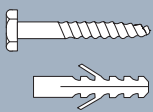**R9900****Tilhørende produkter til vægskinne****LA8801**


Monteringsæt – 6 stk. skruer M10 x 70 med dybel SX12. Max. behov: 20 stk. pr. meter.

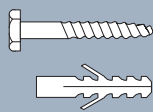LA8802

Monteringsæt – 10 stk. skruer M10 x 70 med dybel SX12. Max. behov: 20 stk. pr. meter.

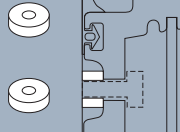LA8817

Tætningskiver – 10 stk. til tætning omkring monteringskruger.

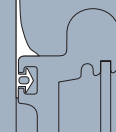LA8830

Tætningsliste – 3000 mm lang til tætning mellem vandret skinne og væg.

RT757

Produktstopper – til vandret skinne.

- Grå standard
- 000** Hvid
- 108** Mørkeblå RAL5011

Ophæng til håndvask el og gas

Håndvask med el- eller gasdrevet ophæng er ideelt til både børn og voksne – og i situationer med mange skiftende brugere. Der kan være tale om hospitaler og plejehjem, men også private hjem, hvor andre end personen med nedsat funktionsevne benytter badeværelset. Den selvhjulpne bruger får desuden optimal mulighed for at kunne klare sig selv – og opleve glæden derved.

El

Håndvasken kan højdereguleres alene ved hjælp af betjeningsgrebet.

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder.

Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan nemt flyttes til venstre side.

Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.

Kan leveres med fjernbetjening i stedet for betjeningsgreb.



Gas

Den indbyggede gascylinder udligner håndvaskens vægt: Den bliver "vægtløs" og kan med minimal anstrengelse reguleres op og ned.

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder.



Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan nemt flyttes til venstre side.

Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.




Betjening

- 1 **El med betjeningsgreb** – løft let op i grebet, og vasken bevæger sig opad. Tryk let ned på grebet og vasken bevæger sig nedad.
- 2 **El med fjernbetjening** – de røde trykknapper indikerer tydeligt "op" og "ned". Fjernbetjeningen leveres med vægbeslag.
- 3 **Gas med betjeningsgreb** – ved et let løft op eller tryk ned frigøres vasken for indstilling. Når en passende højde er fundet, føres grebet tilbage til vandret. Vasken er her efter låst i den nye position.

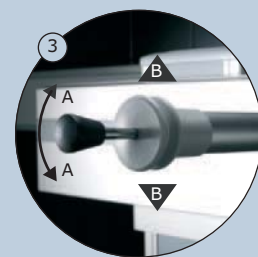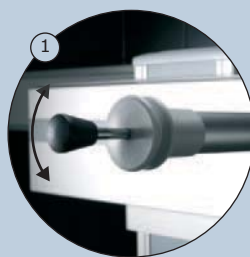


Montering – el

Monteringsæt til massiv mur medfølger. Se side 11.

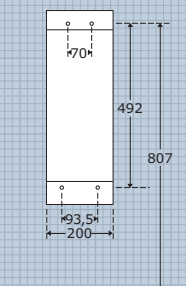


Montering – gas

Monteringsæt til massiv mur medfølger.

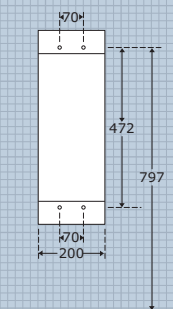

Montering af håndvask – boltophængt

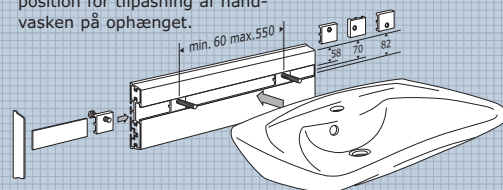


Bolt afstand: Min. 60 – maks. 550 mm. Boltene kan sættes i 1-2-3-position for tilpasning af håndvasken på ophænget.



Materialer: Aluminium, kunststof


Maks. belastning ophæng: 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalicare.com

Til montering på vandret vægskinne300 mm højdereg., m. elmotor, m. betjeningsgreb **R4660** 300 mm højdereg., m. elmotor, m. fjernbetjening **R4670** 300 mm højdereg., m. gascylinder, m. betjeningsgreb **R4760** 




Ved montering i den anbefalede højde (vandret skinne: 823 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 667 til 967 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

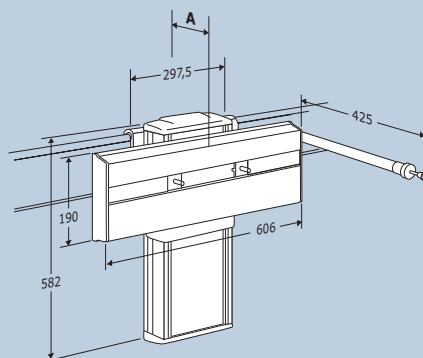R4760 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-20 kg. Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.




A-mål elmotor: 195 mm A-mål gas: 160 mm

For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

**Højderegulerbar**300 mm højdereg., m. elmotor, m. betjeningsgreb **R4260** 300 mm højdereg., m. elmotor, m. fjernbetjening **R4270** 300 mm højdereg., m. gascylinder, m. betjeningsgreb **R4360** 


Ved montering i den anbefalede højde (797 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 667 til 967 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

R4360 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-20 kg. Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

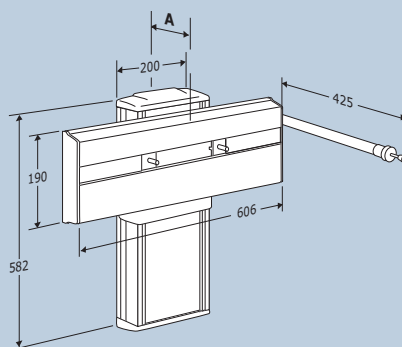


A-mål elmotor: 160 mm A-mål gas: 125 mm


For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

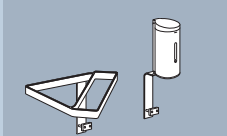**Tilhørende produkter til ophæng til håndvask****RT930****RT935****RT481****RT480****R2050****R2051****RT620****RT621**

Bøjlesystem – trekantbøjle til hylde og boks samt sæbedispenser monteres på selve ophængen og følger håndvasken. Se side 36.

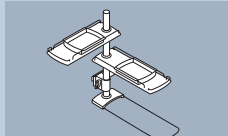

Hyldemodul – monteres på selve ophængen og følger håndvaskens indstilling lodret som vandret. Se side 38.

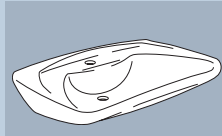

Håndvask
R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.



Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Fleksibelt til- og afløb S. 54
Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54

Ophæng til håndvask manuelt

Håndvask med manuelt ophæng egner sig primært til de situationer, hvor der kun lejlighedsvis er behov for at ændre håndvaskens højde. Til mange og skiftende brugere samt til brugere med både stående og siddende behov anbefales el- eller gasophæng. Manuelt ophæng kan ikke højdereguleres af brugeren selv.





Betjeningsgreb er monteret i højre side.

Passer til alle typer af håndvaske med boltophæng.

Ophængen giver mulighed for en højderegulering på op til 250 mm.


Betjening

- ① **Betjeningsgrebet** holdes løftet. Håndvasken løftes samtidig, og der høres et klik. Håndvasken kan nu indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen falder i hak.
- ② **Skinne med hak**, hvori låsen griber, og produktet bliver fastlåst.

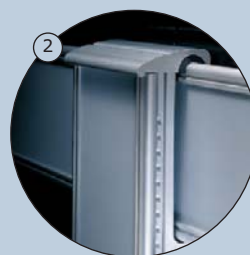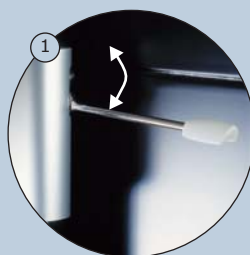


Montering – lodret skinne

Monteringsbolte til væg bestilles særskilt. Se side 11.

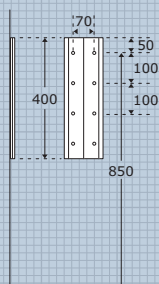

Montering af håndvask – boltophængt

Bolt afstand: Min. 60 – maks. 550 mm.
Boltene kan sættes i 1-2-3-position for tilpasning af håndvasken på ophængen.

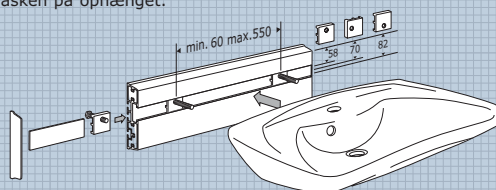


Materialer: Aluminium, kunststof

Maks. belastning ophæng: 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalicare.com

Til montering på vandret vægskinne250 mm højde, m. betjeningsgreb **R4540**


Ved montering i den anbefalede højde (vandret skinne: 823 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 632 til 912 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

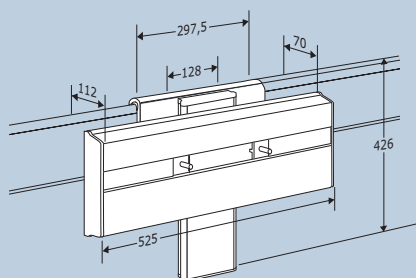


For placering af vandinstallation, se s. 54.

**Højderegulerbar**250 mm højde, m. betjeningsgreb **R4140**


Ved montering i den anbefalede højde (850 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 690 til 970 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

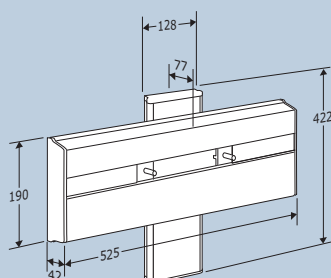


For placering af vandinstallation, se s. 54.

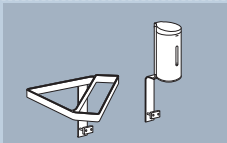**Tilhørende produkter til ophæng til håndvask****RT930****RT935****RT481****RT480****R2050****R2051****RT620****RT621**

Bøjlesystem – trekantbøjle til hylde og boks samt sæbedispenser monteres på selve ophængen og følger håndvasken. Se side 36.

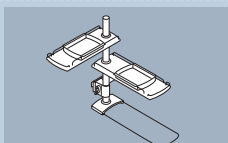

Hylde – monteres på selve ophængen og følger håndvaskens indstilling lodret som vandret. Se side 38.

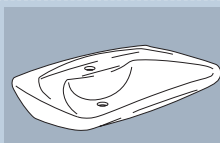

Håndvask
R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.



Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Fleksibelt til- og afløb S. 54
Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54

Ophæng til håndvask el

Håndvask med eldreven højderegulering er ideel til badeværelser, der benyttes af flere brugere – børn som voksne – med individuelle behov. Det kan være på hospital og plejehjem, men også i private hjem.



Håndvasken kan højdereguleres alene ved hjælp af betjeningsgrebet.

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder.



Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan nemt flyttes til venstre side.

Ophængen giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.

Kan leveres med fjernbetjening i stedet for betjeningsgreb. Den diskrete afdækning af til- og afløbssystemet er samtidig rengøringsvenlig.


Betjening

- ① **El med betjeningsgreb** – løft let op i grebet, og vasken bevæger sig opad. Tryk let ned på grebet og vasken bevæger sig nedad.
- ② **El med fjernbetjening** – de røde trykknapper indikerer tydeligt "op" og "ned". Fjernbetjeningen leveres med vægbeslag.
- ③ **Afdækningen** af bundventil og afløbsslange tages let af for vedligeholdelse.

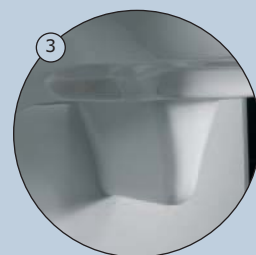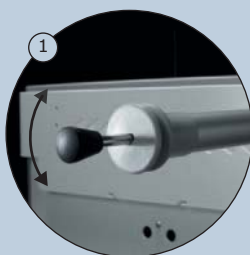


Montering

– monteringskraver til massiv mur medfølger.

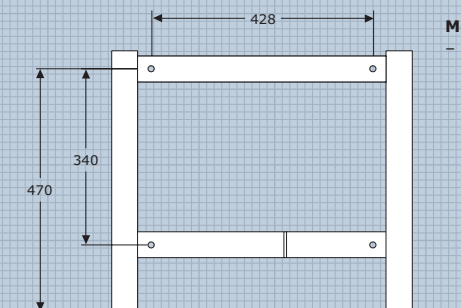

Monteringsplade for håndvask

– boltophængt.

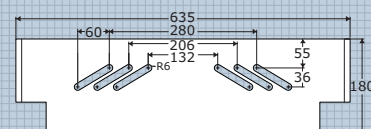


Materialer: Lakeret rustfrit stål, rilsan-coatet stål, polystyren

Maks. belastning ophæng: 100 kg

Ophæng til håndvask – el300 mm højdereg., elmotor, betjeningsgreb **R4930** ↕300 mm højdereg., elmotor, fjernbetjening **R4931** ↕


Ved montering i anbefalet højde (470 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 670 til 970 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

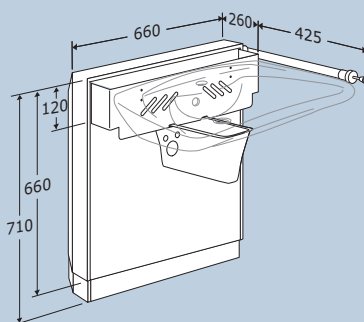


For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

**R4930** ↕**Ophæng til håndvask – el**300 mm højdereg., elmotor, betjeningsgreb **R4920** ↕300 mm højdereg., elmotor, fjernbetjening **R4921** ↕


Ved montering i anbefalet højde (470 mm) vil håndvasken kunne højdereguleres fra 670 til 970 mm – målt fra gulv til håndvaskens overkant.

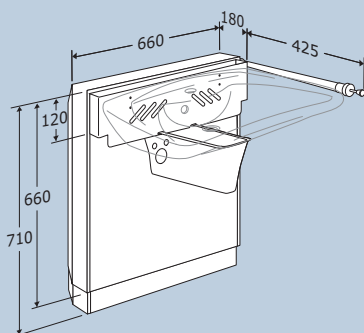


For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

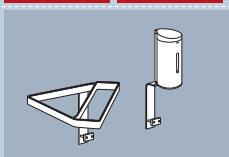**R4920** ↕**Tilhørende produkter til ophæng til håndvask****RT931****RT936****R2050****R2051****RT620****RT621****R20x5**


Bøjlesystem – trekantbøjle til hylde og boks samt sæbedispenser monteres på selve ophænget og følger håndvasken. Se side 36.

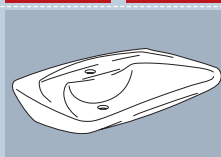**Håndvask**

R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.

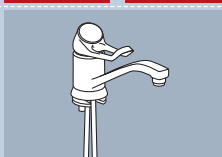**Armaturer**

RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

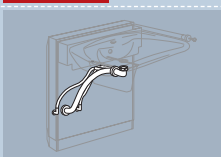**Fleksibelt til- og afløb**

– ophænget kræver et fleksibelt til- og afløbssystem, som følger vaskens lodrette bevægelser. Se side 54.

Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54

Toiletstøtte

En god toiletstøtte er til stor hjælp for brugerne – både når de sætter sig og rejser sig, og mens de sidder. Det samme gælder ved sideværts forflytning fra en kørestol. Såvel udformning som længde og valg af materiale gør Pressalit Cares toiletstøtte særlig egnet som ekstra hjælper.

Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb – både når man står, og når man sætter sig og rejser sig.


Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter.

Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt.

Undersiden i anodiseret aluminium er udformet til montering af forskelligt tilbehør.




Toiletstøtten kan klappes op.

Monteres støtten på lodret skinne, kan den højdereguleres op til 250 mm.

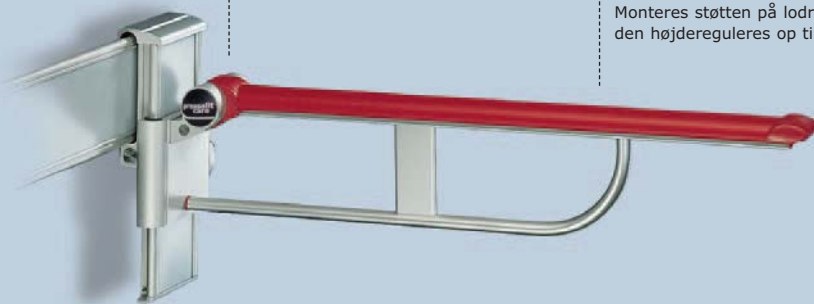


Betjening

- ① **Låsegrebet** – skubbes indad, til det griber fat (1). Herefter drejes grebet nedad (2). Toiletstøtten kan nu indstilles i højden. Når den rigtige højde er fundet, drejes låsegrebet opad (3). Toiletstøtten er nu låst.
- ② **Dæmpningsfjeder** – det er muligt at vælge toiletstøtten i en udgave med indbygget dæmpningsfjeder. Fjederen sikrer, at støtten ikke "falder" ned fra lodret position, og letter opklapning. Den føres i stedet op og ned i glidende bevægelse.
- ③ **Låseknop** – det er muligt at vælge toiletstøtten i 3 specialudgaver med låseknop. Vælg mellem toiletstøtten fastlåst i hhv. lodret og vandret position. Eller både vandret og lodret. Vandret lås sikrer, at støtten ikke løftes med op, når en bruger fx rejser sig. Med lodret lås kan den stående bruger holde fast – fx mænd ved toiletbesøg. Medfølger kun, hvis det angives ved bestilling.
- ④ **Skylleknapper** – til 3 og 6 liters skyl. Enhåndsbetjening ved tryk på lille (grøn) eller stort skyl (blå). Herved fjernbetjenes skyllefunktionen ved hjælp af infrarødt signal.

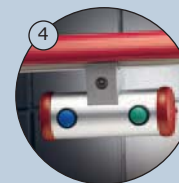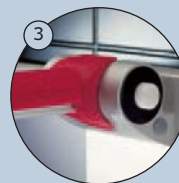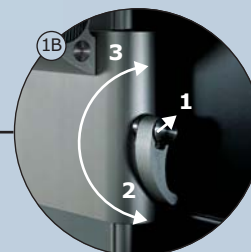


Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg bestilles særskilt. Se side 11.

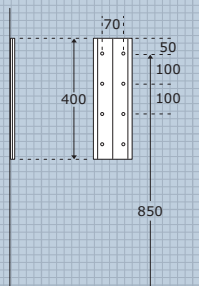

Montering – fast

Monteringssæt til massiv mur medfølger.

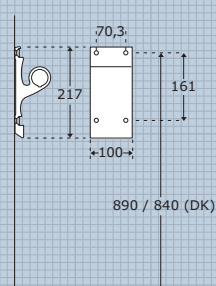


Materialer: Aluminium, kunststof, tokomponent plast

Maks. belastning: 135 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com

Til montering på vandret vægskinne250 mm højdereg., længde 850 mm **R3548xxx** ⬇250 mm højdereg., længde 600 mm **R3546xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, længde 850 mm **RF548xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, længde 600 mm **RF546xxx** ⬇


Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) vil toiletstøtten kunne højdereguleres fra 605 til 855 mm – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

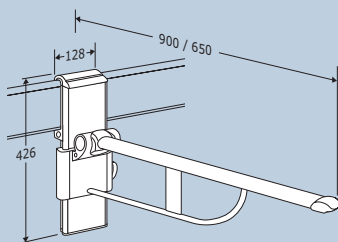

I opklappet stand: 250 mm

R3548035 ⬇**Til montering på vandret vægskinne**Længde 850 mm **R3518xxx** ⬇Længde 600 mm **R3516xxx** ⬇Med fjeder, længde 850 mm **RF518xxx** ⬇Med fjeder, længde 600 mm **RF516xxx** ⬇


Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) vil toiletstøttens højde være 850 mm – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

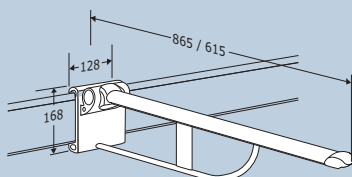

I opklappet stand: 210 mm

R3518035 ⬇**Til montering på lodret vægskinne**250 mm højdereg., længde 850 mm **R3148xxx** ⬇250 mm højdereg., længde 600 mm **R3146xxx** ⬇250 mm højdereg., u. lodret skinne, længde 850 mm **R9308xxx** ⬇250 mm højdereg., u. lodret skinne, længde 600 mm **R9306xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, længde 850 mm **RF148xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, længde 600 mm **RF146xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, u. skinne, længde 850 mm **RF308xxx** ⬇250 mm højdereg., m. fjeder, u. skinne, længde 600 mm **RF306xxx** ⬇


Ved montering i anbefalet højde (850 mm) vil toiletstøtten kunne højdereguleres fra 668 til 918 mm – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

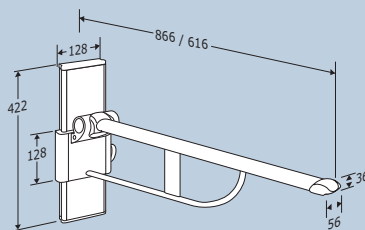



I opklappet stand: 210 mm

R3148035 ⬇**Fastmonteret**Længde 850 mm **R3018xxx** ●Længde 600 mm **R3016xxx** ●Med fjeder, længde 850 mm **RF018xxx** ●Med fjeder, længde 600 mm **RF016xxx** ●


Ved montering i anbefalet højde 890/840 mm (DK) vil toiletstøttens højde være 850/800 mm (DK) – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

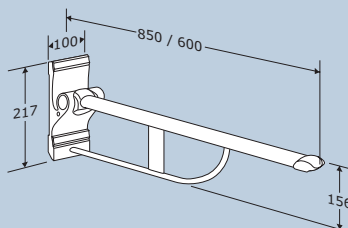


I opklappet stand: 192 mm

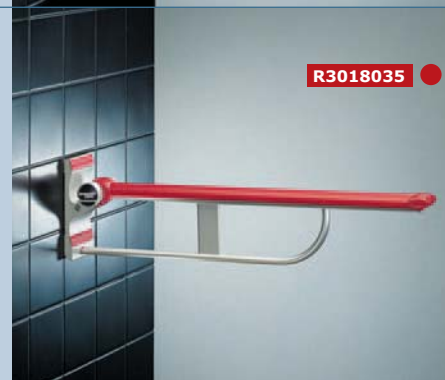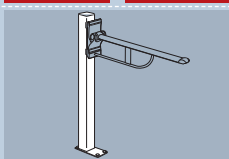R3018035 ●**Tilhørende produkter til toiletstøtte****R9330****R9331****R9320**


Gulvsøjle – anvendes ved fritstående toiletter, eller hvor det ikke er muligt at montere støtten på væg. R9330 til fastmonterede støtter – R9331 til 250 mm højdereg. støtter.

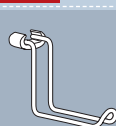

Papirholder – til monteret under toiletstøtten.

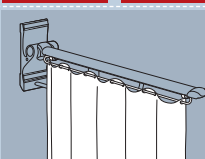R9310000**R9310****R9340xxx**

Bruseforhæng – til 850 mm toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm. Fås mønstret og hvid. R9310000: Hvid R9310: Mønstret

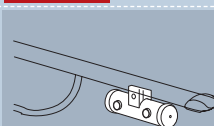

Skylleknapper – fungerer sammen med udvalgte Geberit indbygningscisterner. Kontakt Pressalit Care.

Front- og rygstøtte:
Ryglæn:

S. 49

S. 49

000 Hvid

035 Rød RAL3003

108 Mørkeblå RAL5011

164 Grå

166 Turkis

Toiletsæde

Mennesker er forskelligt bygget. Der er forskel i højde og drøjde – og der er forskel bagtil. Toiletsæder fra Pressalit Care tager hensyn til forskellene. Derfor har vi flere modeller. Alle toiletsædemodeller passer til de fleste almindelige toiletskåle.




Dania – sædet til de fleste.
Et godt og anatomisk velformet sæde.

Funktioner


- ① **Beslag.** For også at øge stabiliteten bagtil anbefales det at montere Dania og Colani med institutionsbeslag med gennemgående stang B84.
- ② **Styrebuffer.** De særlige styrebuffer sikrer, at sædet sidder helt fast i toiletskålen – også ved sideværts belastning, fx forflytninger til og fra kørestol. Kan indstilles til at gribe henholdsvis indvendigt og udvendigt, alt efter skålens form.




Montering – beslag, A-position

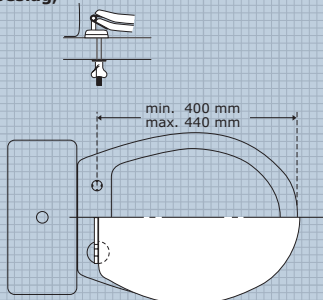

Montering – beslag, B-position

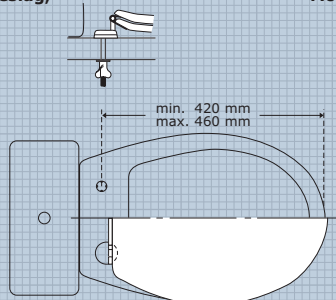

Montering – styrebuffer

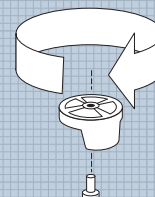



Materialer: Hærdeplast, kunststof, rustfrit stål

Maks. belastning: 250 kg

DaniaDania uden låg, m. beslag **R27xxx**Dania med låg, m. beslag **R37xxx**Dania uden låg, åben front, m. beslag **R28000**Dania med låg, åben front, m. beslag **R38000**


Et anatomisk velformet sæde, som er velegnet for de fleste. Sideværts forflytninger er lette, idet sædet er relativt fladt. Låget er godt at sidde på, og i opslået tilstand giver det god støtte til ryggen. Dania fås også med åben front, hvilket gør det egnet til bidetsæde med let adgang for en håndbruser. Egner sig til hospitaler, idet de fleste bækkener passer ned i skålen, mens hanken placeres i den åbne front.

Leveres med universalbeslag B82/B83.
Kan også leveres med institutionsbeslag B84 eller tyveri- og vandalsikret beslag B85.

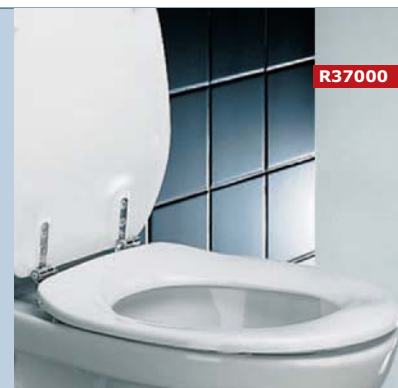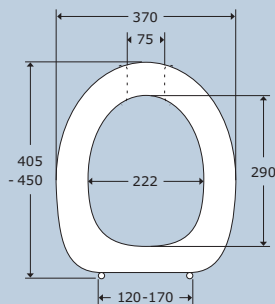**Ergosit**Ergosit uden låg, m. beslag **R29000**Ergosit m. låg og beslag **R30000**



Stor, bred siddeflade og gode støtteflader. Specielt velegnet til "store" voksne med fordøjelsesproblemer. Tarmudtømmningen stimuleres af sædets bølgede overflade, som påvirker og trykker lårmuskler og nerver. Riller bagtil forhindrer klæbning.

Leveres med institutionsbeslag B84.
Kan også leveres med tyveri- og vandalsikret beslag B85.

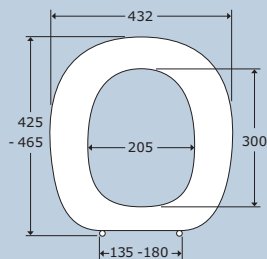
**Colani**Colani uden låg, m. beslag **R26000**Colani m. låg og beslag **R36000**

Den kurvede skålform støtter og stabiliserer bækkenregionen og gør sædet velegnet også til børn (fra 6-års-alderen) med fx muskelsvind. Løftede sidekanter er gode at holde fast i, når kropsbalancen skal stabiliseres. Låget er godt at sidde på, og i opslået tilstand giver det god støtte til ryggen.


Leveres med universalbeslag B82/B83.
Kan også leveres med institutionsbeslag B84 eller tyveri- og vandalsikret beslag B85.

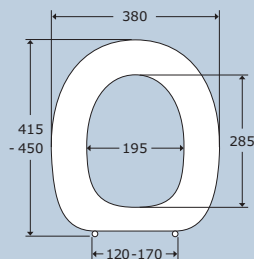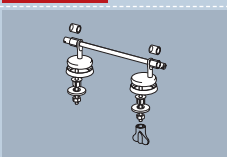**Tilhørende produkter til toiletsæde****B84999**



Institutionsbeslag
– beslag med gennemgående stang. Monteres, hvor der ønskes øget stabilitet bagtil. Anbefales til Dania og Colani. Rustfrit stål.

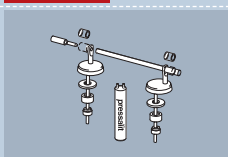B85999

Vandal- og tyverisikret beslag – anbefales til montering på offentlige toiletter. Rustfrit stål.

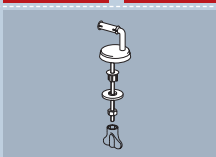B82999

Universalbeslag
– standardbeslag til Dania og Colani. Rustfrit stål.

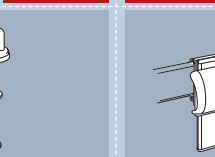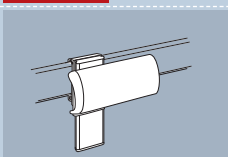B83999**R6533xxx**

Ryglæn – højdereg. til toilet med 700 mm fra væg til front, hvor cisternen er højthængende eller indbygget i væg. Se side 49.

- 000** Hvid
- 035** Rød RAL3003
- 108** Mørkeblå RAL5011

- 013** Bahama beige
- 052** Manhattan
- 237** Calypso
- 273** Pergamon

Dania R27 og R37 kan leveres i de nævnte farver.
Øvrige toiletsæder leveres i hvid.

Forhøjet toiletsæde

At gå på toilettet er noget, vi gør mange gange i døgnet, så det bør ikke være forbundet med uoverstigelige vanskeligheder. Højden på toilettet er i dén forbindelse vigtig. Mange mennesker – ikke mindst ældre – kan have vanskeligt ved at sætte sig og rejse sig ved toiletter i normal højde. Vi kan derfor levere vores toiletsæder i forhøjede udgaver.




Dania – skråtstillet. Med 100 mm's forhøjer bagtil og 50 mm's forhøjer fortil.

Funktioner


- ① **Beslag** – slidstærke, rengøringsvenlige beslag.
- ② **Styrebuffer** – sikrer, at sædet sidder helt fast i toiletskålen – også ved sideværts belastning, fx forflytninger til og fra kørestol. Styrebufferne kan indstilles til at gribe henholdsvis indvendigt og udvendigt, alt efter skålens form.




Montering – beslag, A-position

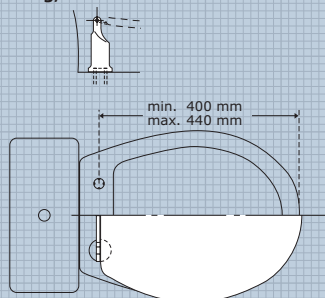

Montering – beslag, B-position

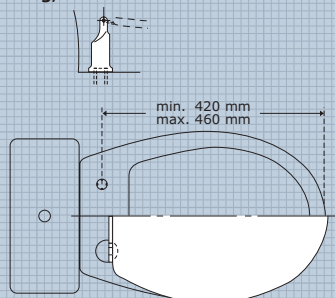

Montering – styrebuffer


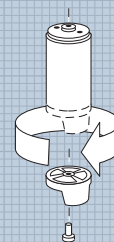


Materialer: Hærdeplast, kunststof, rustfrit stål



Maks. belastning: 150 kg

Toiletsæder, 50 mm forhøjetDania, 50 mm, åben front, u. låg **R21000**Dania, 50 mm, åben front, m. låg **R31000**Dania, 50 mm, u. låg **R23000**Dania, 50 mm, m. låg **R33000**Dania, 50 mm, m. låg, m. stænskærm **R43000**Colani, 50 mm, u. låg **R46000**Colani, 50 mm, m. låg **R56000**Ergosit, 50 mm, u. låg **R19000**Ergosit, 50 mm, m. låg **R20000**



Stænskærm skal bestilles separat (T9516). Dania R43000 undtaget.

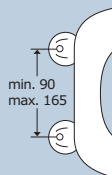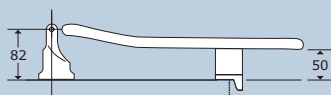**R21000****Toiletsæder, 100 mm forhøjet**Dania, 100 mm, åben front, u. låg **R22000**Dania, 100 mm, åben front, m. låg **R32000**Dania, 100 mm, u. låg **R24000**Dania, 100 mm, m. låg **R34000**

Dania 100 mm leveres inkl. stænskærm (T9515).

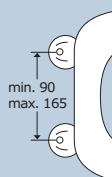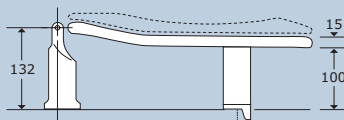**R34000****Toiletsæder, 50/100 mm skråtstillet**Dania, 50/100 mm, skråtstillet u. låg **R25000**Dania, 50/100 mm, skråtstillet m. låg **R35000**


Dania 50/100 mm leveres inkl. stænskærm (T9515).

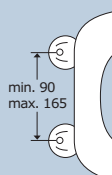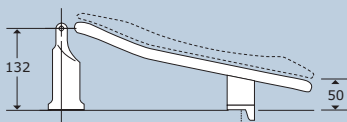**R35000****Tilhørende produkter til forhøjet toiletsæde****T9515**

Stænskærm, 100 mm
– mat transparent kunststof. Nem at tage af, fx ved rengøring og udskiftning.

T9516

Stænskærm, 50 mm
– mat transparent kunststof. Nem at tage af, fx ved rengøring og udskiftning.

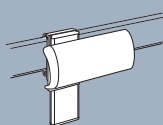R6533xxx

Ryglæn – højdereg. til toilet med 700 mm fra væg til front, hvor cisternen er højthængende eller indbygget i væg. Se side 49.

000 Hvid

Ophæng til toilet el og manuel

Forflytning til og fra toilettet kan virke uoverskuelig for brugere med nedsat funktionsevne, selvhjulpne som ikke-selvhjulpne.

Det er vigtigt, at siddehøjden passer til brugersituationen, og at begge brugerens fødder kan placeres på gulvet. Herved sikres bedre balance og lettere forflytning fra toiletsædet.

Giver gående brugere støtte og hjælp til at sætte og rejse sig.

Gør det muligt at få toiletsæde og kørestolens sæde i samme niveau for lettere forflytning.

Giver hjælperen gode arbejdsbetingelser.

Kan højdereguleres op til 400 mm.

Leveres med toiletskål på 700 eller 550 mm og til afløb enten i gulv eller i væg.

Gør det muligt at få toiletsædet og kørestolens sæde i samme niveau for lettere forflytning.


Kan højdereguleres op til 150 mm.

Leveres med toiletskål på 700 mm eller 550 mm.






Betjening

- ① **Fjernbetjening:** Toiletløfteren kan højdereguleres automatisk via fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen kan fx hænges på toiletstøtten eller vægskinnen. Leveres med vægbeslag.
- ② **Skylknapper:** De store betjeningsvenlige skylknapper giver skyl på hhv. 3 og 6 liter.
- ③ **Håndsving:** Til manuel højdeindstilling. Kan placeres efter behov på højre eller venstre side af løfteenheden.

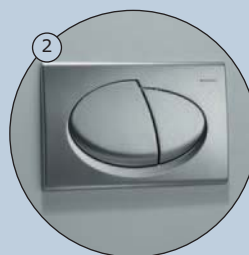

Montering

Monteringsbolte til massiv mur medfølger.

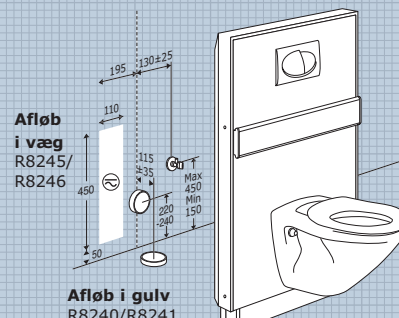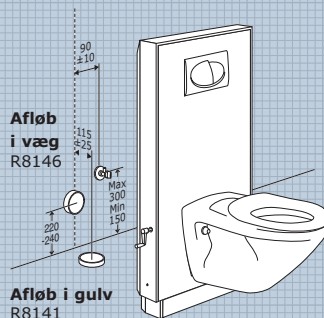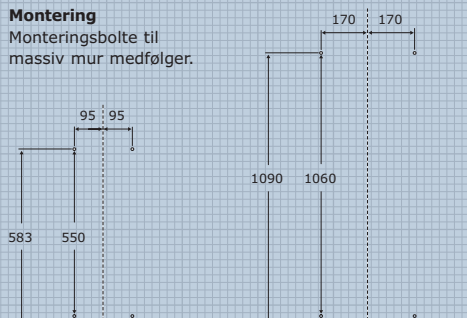

Materialer: Lakeret rustfrit stål, polystyren, aluminium, porcelæn

Maks. belastning: 200 kg


Ophæng til toilet, m. elmotor og fjernbetjening

- 400 mm højdereg., til gulvafløb, A = 700 mm **R8240** ↕
- 400 mm højdereg., til vægafløb, A = 700 mm **R8245** ↕
- 400 mm højdereg., til gulvafløb, A = 550 mm **R8241** ↕
- 400 mm højdereg., til vægafløb, A = 550 mm **R8246** ↕

Leveres inkl. toilet, cisterne med dobbeltskyl 3/6 l, toiletsæde R27 og vægskinne.

Siddehøjde med toiletsæde: 425 - 825 mm

Toiletskål på 700 mm anbefales til kørestolsbrugere. Det giver også bedre plads til hjælperen. Ryglæn anbefales, se s. 49.

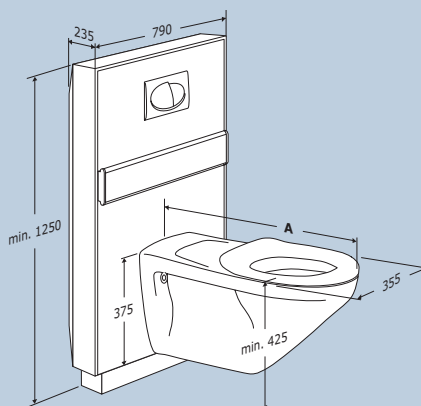

VA-godkendt (Danmark)
For placering af elinstallation, se s. 55


**Ophæng til toilet, manuel**

- 150 mm højdereg., til gulvafløb **R8141** ↕
- 150 mm højdereg., til vægafløb **R8146** ↕


Leveres inkl. toilet, cisterne med dobbeltskyl 3/6 l og toiletsæde R37.

Siddehøjde med toiletsæde: 425 - 575 mm


Ved bestilling af toiletstøtter til R8141 og R8146 bør der bestilles et sæt med låse i hhv. højre og venstre side. Kontakt Pressalit Care.

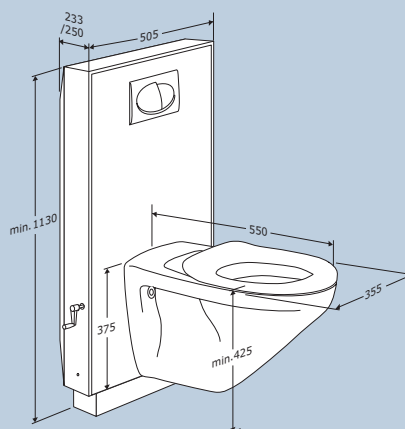


VA-godkendt (Danmark)

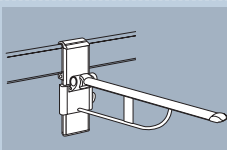**Tilhørende produkter til ophæng til toilet****R3548xxx****RF548xxx****R3546xxx****RF546xxx****R6533xxx****R6513xxx****RT800xxx**


Toiletstøtte 850 mm
– til R8240 og R8245 for maksimal støtte på toilettet. Se side 18

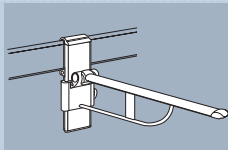

Toiletstøtte 600 mm
– til R8241 og R8246 for maksimal støtte på toilettet. Se side 18

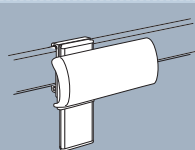

Ryglæn – til R8240 og R8245 for maksimal støtte og komfort. Se side 49

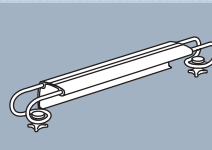

Front- og rygstøtte
– for optimal siddestilling. Se side 49

Papirholder: S. 19
Skyllknapper: S. 19

- 000 Hvid
- 164 Grå
- Alu

Brusebadestol 410

Med sine mange udbygningsmuligheder – rygstøtte, armlæn, sæde med hul mv. – er brusebadestolen et godt eksempel på Pressalit Care-systemets store fleksibilitet. Stolen kan opbygges og indstilles efter nøjagtig de krav, brugeren eller brugersituationen stiller. Brusebadestolen gør dermed brusesituationen til en både tryk og komfortabel oplevelse.

El

Den selvhjulpne bruger kan nemt indstille sædehøjden, fx til samme højde som kørestolens sædehøjde. Gående brugere får samtidig ekstra støtte til at sætte sig og rejse sig – og til at nå ned og vaske fødderne.

Armlænets ovale udformning giver godt greb og god støtte.

Stolen reguleres let op til en god arbejds højde for hjælperen, mens brugeren sidder på stolen.

Blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt.

Sædet fås med afløbsriller eller med hul for at lette intimhygiejnen.

Sædets og ryglænets højde indstilles uafhængigt af hinanden.

Kan højdereguleres op til 620 mm.

Manuel

Blødt og behageligt materiale, der aldrig føles koldt.

Armlænets ovale udformning giver godt greb og god støtte.

Sædet fås med afløbsriller eller med hul for at lette intimhygiejnen.




Sædets og ryglænets højde indstilles uafhængigt af hinanden.

Kan højdereguleres op til 330 mm.




Betjening

- 1 El med fjernbetjening** – brusebadestolen kan højdereguleres automatisk via fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen kan fx hægtes på armlænet eller vægskinnen. Fjernbetjeningen leveres med vægbeslag.
- 2 Manuel** – betjeningsgrebet bag ryglænet/sædet holdes løftet. Ryglænet/sædet løftes samtidig, og der høres et klik. Ryglænet/sædet kan nu indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen falder i hak på skinnen.
- 3 Opklapning** – med opklappet sæde og armlæn optager stolen et minimum af plads. Det giver større rummelighed i badeværelset – til glæde for både bruger og hjælper.

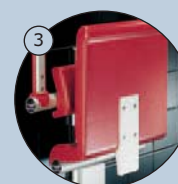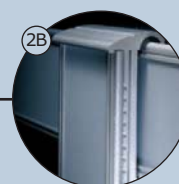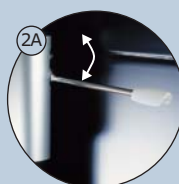


Montering – el til højderegulering

Monteringsæt til massiv mur medfølger.

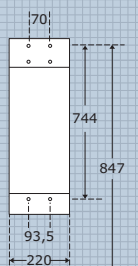


Montering – manuel lodret skinne

Monteringsæt til væg bestilles særskilt. Se side 11.

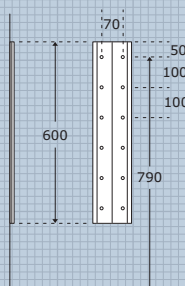

Montering – brusebadesæde lodret skinne

Monteringsæt til væg bestilles særskilt. Se side 11.

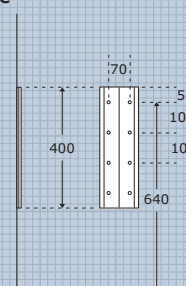

Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne, kunststof, tokomponent plast

Maks. belastning: 150 kg


Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com

Til montering på vandret vægskinne

- 500 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn, elmotor **R7656xxx** ⚙️
- 500 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn, elmotor **R7658xxx** ⚙️
- 330 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn **R7566xxx** ⚙️
- 330 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn **R7568xxx** ⚙️
- 330 mm højdereg. sæde m. ryglæn **R7565xxx** ⚙️
- 330 mm højdereg. sæde m. hul, ryglæn **R7567xxx** ⚙️

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) vil brusebadestolen kunne højdereguleres:
 El: 150-770 mm eller 250-870 mm
 Manuel: 332-662 mm
 - målt fra gulv til sædets overkant.

For placering af elinstallation, se s. 55.

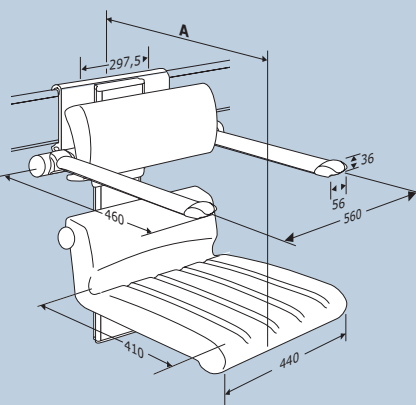

A-mål:
 Manuel: 590 mm
 El: 707 mm

I opklappet stand:
 Manuel: 250 mm
 El: 367 mm

R7566035 ⚙️




Højderegulerbart og montering på lodret skinne

- 500 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn, elmotor **R7256xxx** ⚙️
- 500 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn, elmotor **R7258xxx** ⚙️
- 340 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn **R7166xxx** ⚙️
- 340 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn **R7168xxx** ⚙️
- 340 mm højdereg. sæde m. ryglæn **R7165xxx** ⚙️
- 340 mm højdereg. sæde m. hul, ryglæn **R7167xxx** ⚙️
- Sæde u. lodret skinne **R9700xxx** ⚙️
- Sæde m. hul u. lodret skinne **R9701xxx** ⚙️
- Ryglæn u. lodret skinne **R9600xxx** ⚙️
- Ryglæn m. armlæn u. lodret skinne **R9601xxx** ⚙️

Ved montering i anbefalet højde (847/850 mm) vil brusebadestolen kunne højdereguleres.
 El: 190-810 mm. Manuel: 382-712 mm
 - målt fra gulv til sædets overkant.

For placering af elinstallation, se s. 55.

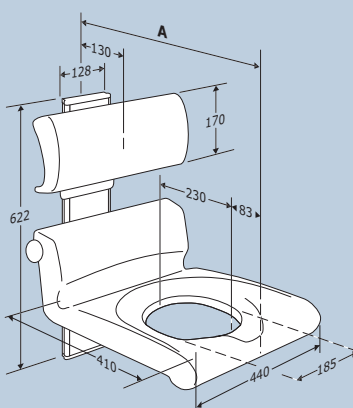

A-mål:
 Manuel: 555 mm
 El: 675 mm

I opklappet stand:
 Manuel: 208 mm
 El: 328 mm


R7167035 ⚙️



Sæde på lodret skinne

- Brusebadesæde 250 mm højdereg. sæde **R7142xxx** ⚙️
- Brusebadesæde 250 mm højdereg. sæde m. hul **R7143xxx** ⚙️

Ved montering i anbefalet højde (640 mm) vil brusebadesædet kunne højdereguleres fra 370 til 620 mm
 - målt fra gulv til sædets overkant.

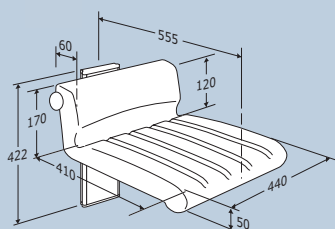


I opklappet stand: 208 mm

R7142035 ⚙️




Tilhørende produkter til brusebadestol

RT801xxx

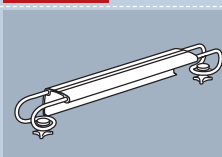

Front- og rygstøtte
 - for optimal siddestilling.
 Se side 49.


R9310000

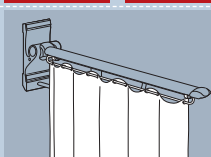

Bruseforhæng - til toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm. Fås mønstret og hvid.
 R9310000: Hvid
 R9310: Mønstret

R9310


RT650

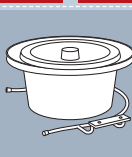

Bøjlebeslag med toiletspand - anvendes i forbindelse med sæde med hul.
 RT650: Bøjlebeslag m. toiletspand
 LA8855: Toiletspand

LA8855

R3548xxx

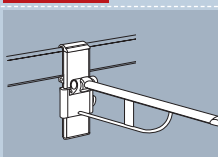

Toiletstøtte - for maksimal støtte ved brusebadestol. Ved frontal forflytning anbefales 2 toiletstøtter i stedet for armlæn på brusebadestolen. Se side 18.

Bøjlesystem: S. 36
Hylde modul: S. 38
Brusearmatur: S. 50
Armaturholder: S. 51
Brusestang med bruseholder: S. 51
Håndbruser: S. 51
Bruseforhængsstang: S. 41

- 000 Hvid
- 035 Rød RAL3003
- 108 Mørkeblå RAL5011
- 164 Grå
- 166 Turkis

Brusebadestol 310

Brusebadestol til børn og små voksne. Udformning og design gør det til en god og komfortabel oplevelse at tage brusebad. Med udbygningsmulighederne – ryglæn og armlæn – er stolen endnu et eksempel på Pressalit Care-systemets fleksibilitet.

Sæde og ryg højdereguleres uafhængigt af hinanden.

Blødt og behageligt materiale, der aldrig føles koldt.



Armlænets ovale udformning giver godt greb og god støtte.

Kan højdereguleres op til 330 mm.




Betjening

- ① **Betjeningsgrebet** bag ryglænet/sædet holdes løftet. Ryglænet/sædet løftes samtidig, og der høres et klik. Ryglænet/sædet kan nu indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen falder i hak på skinnen.
- ② **Opklapning** – med opklappet sæde og armlæn optager stolen et minimum af plads. Det giver større rummelighed i badeværelset – til glæde for både bruger og hjælper.

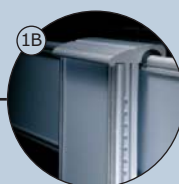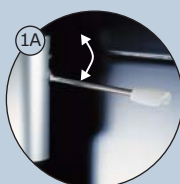


Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg bestilles særskilt. Se side 11.

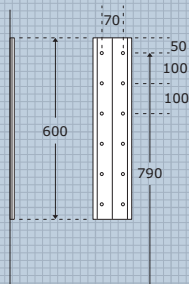

Montering – fast

Monteringssæt til massiv mur medfølger.

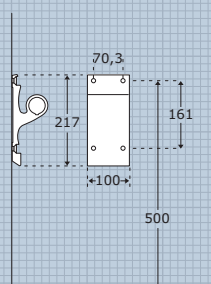


Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne, kunststof, tokomponent plast

Maks. belastning: 150 kg. **Ryglæn R6010:** 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com

Til montering på vandret vægskinne330 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn **R7551xxx** ⚙330 mm højdereg. sæde m. ryglæn **R7550xxx** ⚙


Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) vil brusebadestolen kunne højdereguleres fra 350 til 680 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

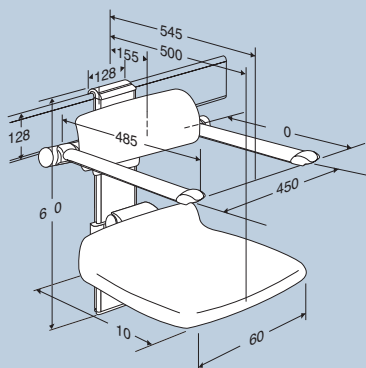

I opklappet stand: 210 mm

R7551035 ⚙**Til montering på lodret vægskinne**340 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn **R7151xxx** ⚙340 mm højdereg. sæde m. ryglæn **R7150xxx** ⚙Sæde u. lodret skinne **R9705xxx** ⚙Ryglæn u. lodret skinne **R9605xxx** ⚙Ryglæn m. armlæn u. lodret skinne **R9606xxx** ⚙


Ved montering i anbefalet højde (790 mm) vil brusebadestolen kunne højdereguleres fra 350 til 690 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

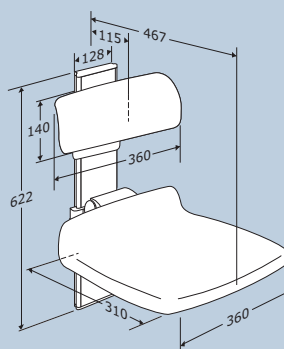


I opklappet stand: 175 mm

R7150035 ⚙**Fastmonteret**Ryglæn 360 mm **R6010xxx** ●Brusebadesæde **R7010xxx** ●


Ved montering i anbefalet højde (500 mm) vil brusebadesædets højde være 400 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

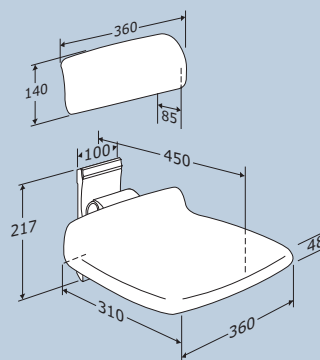


I opklappet stand: 160 mm

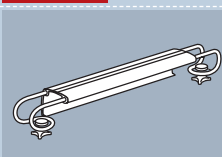R6010035 ●**R7010035** ●**Tilhørende produkter til brusebadestol****RT800xxx**

Front- og rygstøtte
– for optimal siddestilling.
Se side 49.

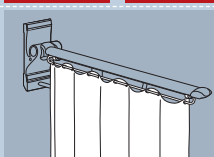R9310000**R9310**

Bruseforhæng – til 850 mm toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm. Fås mønstret og hvid. R9310000: Hvid R9310: Mønstret

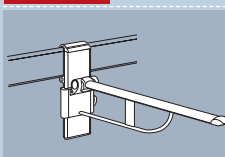R3546xxx

Toiletstøtte – for maksimal støtte ved brusebadestol. Ved frontal forflytning anbefales 2 toiletstøtter i stedet for armlæn på brusebadestolen. Se side 18.

Bøjlesystem: S. 36
Hyldemodul: S. 38
Brusearmatur: S. 50
Armaturoholder: S. 51
Brusestang med bruseholder: S. 51
Håndbruser: S. 51
Bruseforhængsstang: S. 41

- 000 Hvid
- 035 Rød RAL3003
- 108 Mørkeblå RAL5011
- 164 Grå
- 166 Turkis

Klapsæde

Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads – på badeværelset eller andre steder, hvor pladsen er trang eller behovet for hvile stort, fx i køkkener og elevatorer samt på gangarealer og trappeafsætser.



design award
winner
2002


Klapsæde – dybde 320 mm
Optager et minimum af plads.

Kan højdereguleres op til 450 mm.




Betjening

- ① **Betjeningsgrebet** bag sædet holdes løftet. Sædet løftes samtidig, og der høres et klik. Sædet kan nu indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen falder i hak.
- ② **Opklapning** – opklappet fylder klapsædet et minimum. Det giver mere plads – til glæde for alle.

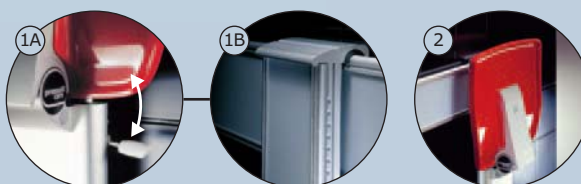


Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg bestilles særskilt. Se side 11.

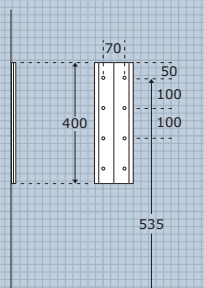

Montering – fast

Monteringssæt til massiv mur medfølger.

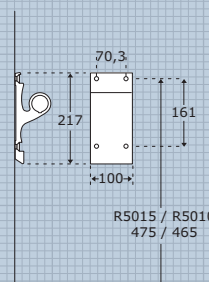


Materialer: Aluminium, hærdeplast, kunststof

Maks. belastning: 135 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalicare.com

Til montering på vandret vægskinneSæde 320 mm, 450 mm højdereg. **R5565xxx** ⬇


Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) vil klapsæderne kunne højdereguleres fra 430 til 880 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

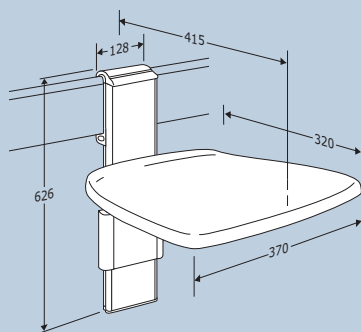

I opklappet stand: 150 mm

R5565035 ⬇**Til montering på lodret vægskinne**Sæde 320 mm, 250 mm højdereg. **R5145xxx** ⬇Sæde 320 mm højdereg., u. lodret skinne **R9505xxx** ⬇


Ved montering i anbefalet højde (535 mm) vil klapsæderne kunne højdereguleres fra 370 til 620 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

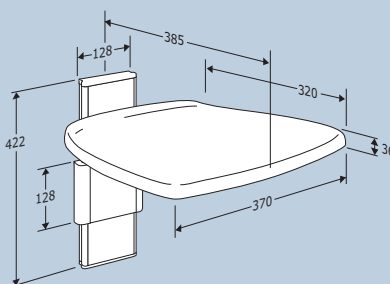


I opklappet stand: 115 mm

R5145035 ⬇**Fastmonteret**Sæde 320 mm **R5015xxx** ●


Ved montering i anbefalet højde (475/465 mm) vil klapsædernes højde være 440 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

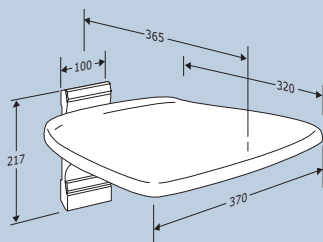



I opklappet stand: 95 mm

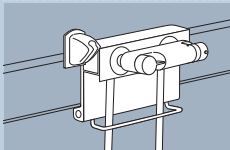R5015035 ●**Tilhørende produkter til klapsæde****RT756****RT640****RT104xxx****RT600xxx****RT610****RT611****RT471****RT470****RT903****Armaturoholder med brusearmatur**

RT756: Armaturoholder s.51
RT640: Brusearmatur s.50
RT641: Brusearmatur s.50

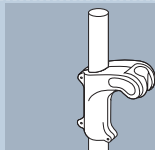**Brusestang med bruseholder.** Se side 51.

RT104: Brusestang
RT600: Bruseholder

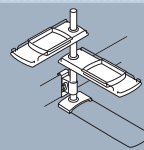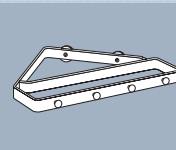**Håndbruser.** Se side 51.**Hyldemodul.** Se side 38.**Trekantbøjle med 4 knopper.** Se side 36.

- **000** Hvid
- **035** Rød RAL3003
- **108** Mørkeblå RAL5011

- **013** Bahama beige
- **052** Manhattan
- **237** Calypso
- **273** Pergamon

Bruseplejebriks

I situationer, hvor en person skal bades liggende, er det vigtigt, at briksen både kan sænkes til en højde, der passer til forflytning fra fx kørestol og hæves til en passende arbejds højde for hjælperen. Det er samtidig vigtigt, at liggekomfort og sikkerhed er i top.


Bruseplejebriksen med elmotor kan højdereguleres 700 mm ved hjælp af fjernbetjeningen.

Ingen kolde overflader - leje, ender og sengehest er beklædt med porsukum.


Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed.

Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv.

Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.

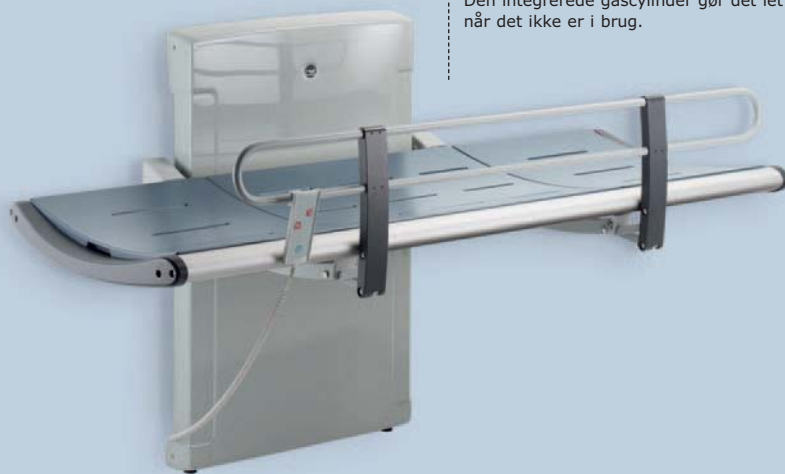


- ① **Indstilleligt ryglæn** i begge ender.
- ② **Slangen** fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.
- ③ **Sengehesten** er enhåndsbetjent og enkel at slå op/ned.

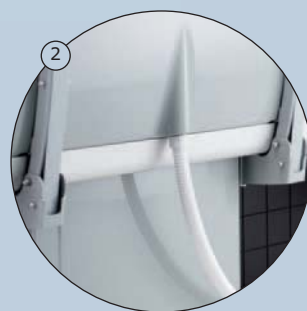


Montering – højderegulerbar model

Monteringskraver til massiv mur medfølger.

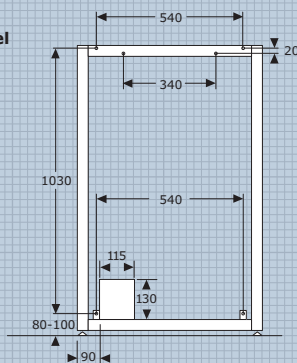

Montering – fastmonteret model

Monteringskraver til massiv mur medfølger.

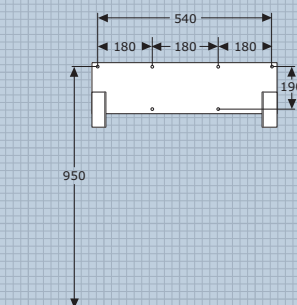


Materialer: Aluminium, porsukum, kunststof, lakeret stål

Maks. belastning: 200 kg

Bruseplejebriks – højderegulerbar1800 mm, 700 mm højdereg., elmotor m/fjernbetjening **R8518**1300 mm, 700 mm højdereg., elmotor m/fjernbetjening **R8513**

Ved montering i anbefalet højde vil lejet kunne højdereguleres fra 300 til 1000 mm

For placering af elinstallation, se s. 55

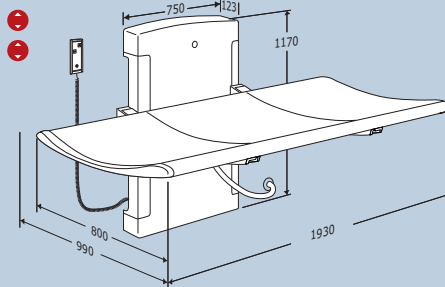


R8518

I opklappet stand: 330 mm


**R8518****Bruseplejebriks – fastmonteret**1800 mm **R8508**1300 mm **R8503**

Ved montering i anbefalet højde vil liggefladen være 865 over gulv.

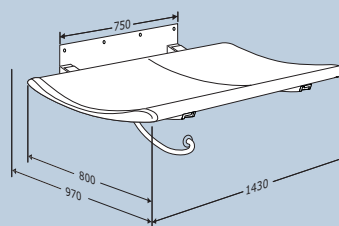


R8503

I opklappet stand: 300 mm

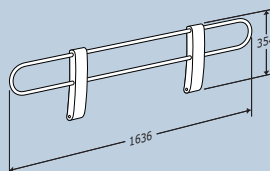**R8508****Sengehest**1636 mm **R8511**1200 mm **R8510**

R8511

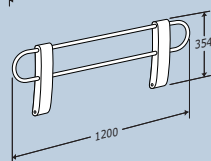

R8510

**R8511**

Opbevaring

I badeværelset er det vigtigt at bevare en høj tilgængelighed. Alle de ting, som hører med til badeværelsets miljø, skal kunne opbevares på en enkel måde.

Pressalit Cares opbevaringsserie opfylder med sit åbne design ønsket om tilgængelighed og overblik.

Opbevaringsmøblerne kan både monteres på væg og monteres på Pressalit Care vægskinne.



Hyldeerne giver optimal pladsudnyttelse i små rum, hvor der ikke er plads til at åbne skabslåger.

Affaldsskuffen er en lukket enhed af hygiejniske årsager.

Affaldsskuffen er forsynet med et betjeningsegnet greb og et selvlukkende udtræk.





Hyldeerne og de perforerede kurve giver godt overblik og direkte adgang til de artikler, som skal opbevares.

Kurvene kan anbringes på kurvebeslag, på vægskinne eller på hylde.



Betjening/detaljer

- ① **Affaldsskuffen** er forsynet med stativ til 1 stor eller 2 små affaldsposer.
- ② **Kurvebeslaget** findes i to udgaver: Til montering på bagplade eller på væg.
- ③ **Kurvene** kan hænge på Pressalit Care vægskinnen.

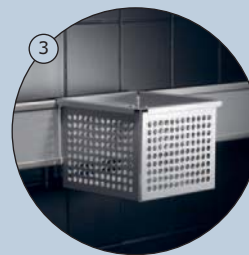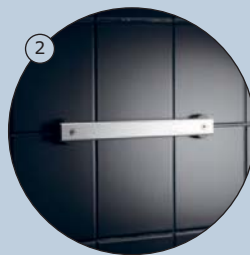


Montering - fast

Monteringskrue til massiv mur medfølger.

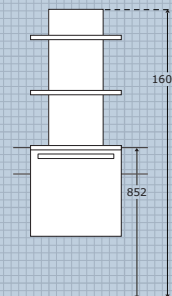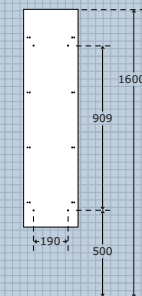

Materialer: Lamineret MDF-plade, pulverlakeret stål, aluminium, kunststof

Maks. belastning: pr. hylde/beslag 30 kg.

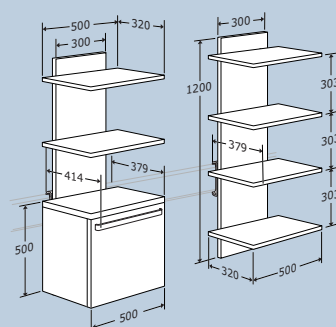
Til montering på vandret vægskinneBagplade med 2 hylder og affaldsskuffe **RT960**Bagplade med 4 hylder **RT962**Bagplade med 4 kurvebeslag **RT964**Bagplade **RT980**

RT960

RT962



RT960

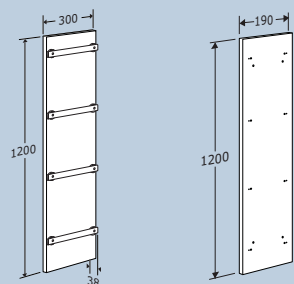
FastmonteretBagplade med 2 hylder og affaldsskuffe **RT961**Bagplade med 4 hylder **RT963**Bagplade med 4 kurvebeslag **RT965**Bagplade **RT981**

RT965

RT981



RT965

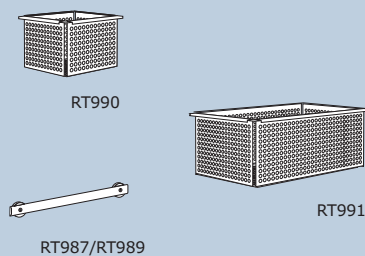Kurve og kurvebeslagPerforeret kurv, 244 x 244 x 176 mm **RT990**Perforeret kurv, 500 x 307 x 200 mm **RT991**Kurvebeslag til bagplade **RT987**Kurvebeslag til væg **RT989**

RT990


RT991

RT987/RT989



RT990


RT991

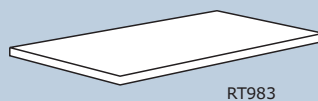HylderHylde, 500 x 320 x 24 mm **RT983**

RT983



RT983

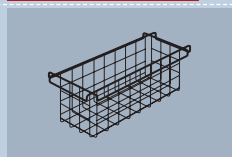Supplerende produkter**RT765/-66/-67/-68**

Trådkurve - til kurvebeslag.
RT768 passer kun til kurvebeslag på væg, RT989.
Se side 39.

■ Grå
■ Alu

Bøjlesystem

Den enkelte brugers behov og ønsker - og den eventuelle hjælpers opgaver i badeværelset - stiller oftest sine egne helt specielle krav til placering af toiletartikler i badeværelset. Bøjlen - som findes i fire varianter - kombineres frit med bokse, hylder og knopper. Bøjlesystemet er velegnet ved brusested og håndvask, hvor systemet kan monteres på væg eller på ophæng til håndvask.

Boksene kan placeres i bøjle, på hylde eller hænges på knopperne.



3 bøjlevarianter er forsynet med 4 knopper, der kan anvendes til håndklæder, eller som man alternativt kan hænge bokse på.

Knopperne kan monteres direkte på væg, og her ligeledes benyttes til håndklæder eller bokse.



① **Bokse og hylder** er forsynet med en krave, så de ligger sikkert i bøjlen. Boksene er forsynet med huller så de kan hænges på knopperne.

② **Knoppens** design gør at håndklædestroppen nemt slipper knoppen ved træk i håndklædet.

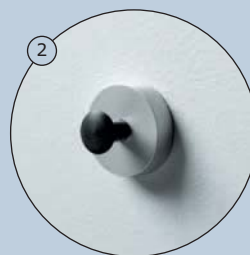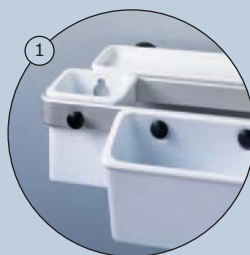


Montering på væg:

Monteringskraver til massiv mur medfølger.

Montering på ophæng til vask:

Kan monteres på begge sider af vasken og i to forskellige højder.

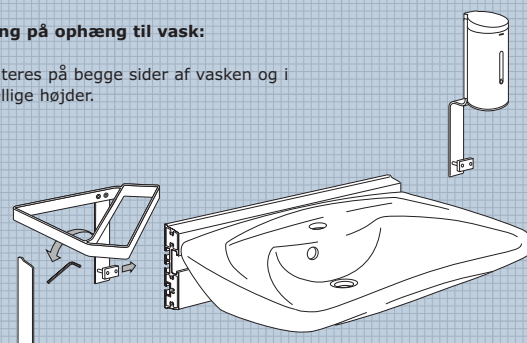


Materialer: Aluminium og kunststof

Maks. belastning, bøjle: 10 kg


Bøjler

- Enkeltbøjle med 4 knopper, 318 x 105 mm **RT900**
 Dobbeltbøjle med 4 knopper, 343 x 182,5 mm **RT901**
 Lang bøjle til håndklæde, 558 x 91,5 mm **RT902**
 Trekantbøjle med 4 knopper, 277,5 x 277,5 mm **RT903**

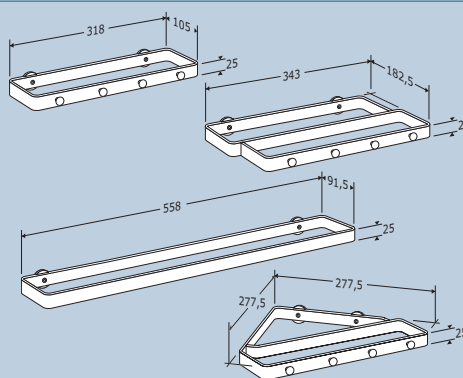
**Bokse og hylde**

- Boks 76 x 76 x 85 mm **RT910000**
 Boks 154 x 76 x 85 mm **RT911000**
 Trekantboks 195 x 195 x 85 mm **RT912000**
 Hylde 309 x 76 x 12 mm **RT915000**
 Trekanthylde 195 x 195 x 12 mm **RT916000**

Alle bokse har afløbshuller.
 Hylde er med forhøjet kant.

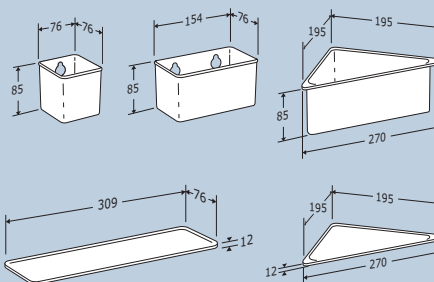
**Knopper og spejlholdere**

- Knop, 2 stk. **RT920**
 Knop, dobbelt **RT921**
 Spejlholdere, 4 stk. **RT922**
 Spejl 1000 x 600 mm **RT923**
 Spejl inkl. 4 spejlholdere **RT924**

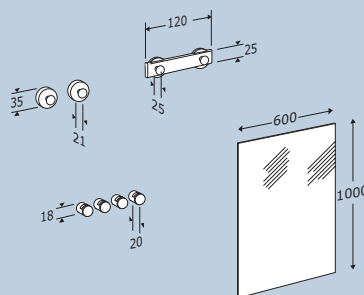
**Tilbehør til håndvask**

- Trekantbøjle til ophæng til håndvask **RT930**
 Trekantbøjle til ophæng til håndvask **RT931**
 Sæbedispenser til ophæng til håndvask **RT935**
 Sæbedispenser til ophæng til håndvask **RT936**
 Håndtørret **RT937**

RT935, RT936 og RT937 har sensor.
 RT930 og RT935 passer til ophængene side 13 og 15.
 RT931 og RT936 passer til ophængene side 17.

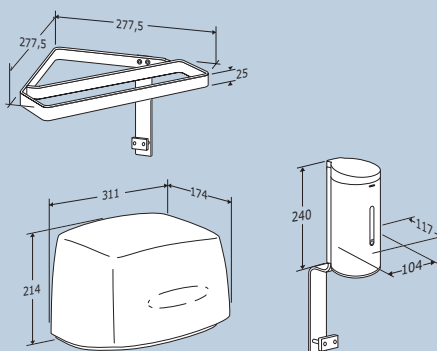**Div. holdere**

- Toiletpapirholder **RT940**
 Reservepapirholder **RT941**
 Toiletbørste med holder **RT942**

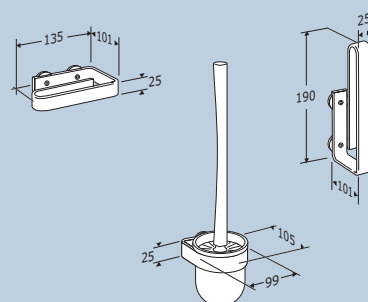

- 000 Hvid matteret plast
 Sort plast
 Aluminium, stål

Hylde modul og trådkurv

Uanset hvem man er, er det altid bekvemt, når de ting, man har brug for, er lige ved hånden – også ting som håndsæbe, shampoo, håndklæder og bodylotion. Derfor har Pressalit Care udviklet et hylde modul og et system af trådkurve, som kan monteres på skinnen.



Hyldemodulet består af søjle med svingbare hylder og håndklædeholder.

Alle dele reguleres trinløst langs søjlen.

Delene kan frit sammensættes til netop den løsning, der er brug for.

Søjlen fås i to forskellige mål: 400 og 600 mm.





Alle hylder har greb. Grebene gør det nemt at få fat i hylderne og forhindrer bakker m.m. i at rutsje af.

Trådkurven er velegnet til opbevaring af større ting. Alle typer trådkurve kan hænges på vægskinnen. Enkelte kan også anvendes som indsats i håndklædeholderen.




Betjening

- ① **Højderegulering af søjle** – låsegrebet skubbes indad, til det griber fat (1). Herefter drejes grebet nedad (2). Hyldemodulet kan nu indstilles i højden. Når højden er fundet, drejes låsegrebet atter opad (3). Søjlen er fastlåst.
- ② **Højderegulering af hylde og håndklædeholder** – beslaget, der befinder sig under hylden, drejes mod venstre (1). Hylden føres nu op eller ned til den ønskede position (2). Fastgør hylden ved igen at dreje på beslaget under hylden – denne gang mod højre (3).
- ③ **Bakker – og visse trådkurvemodeller** – kan placeres i håndklædeholderen.
- ④ **Hylder og håndklædeholder** kan drejes ind mod væggen for at give mere plads i rummet.

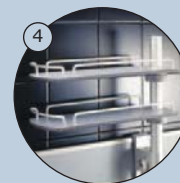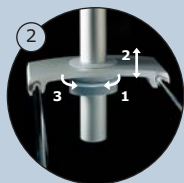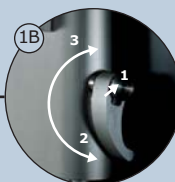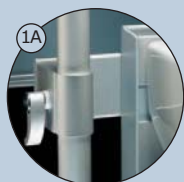


Montering på ophæng

Kan monteres på begge sider af ophænget.

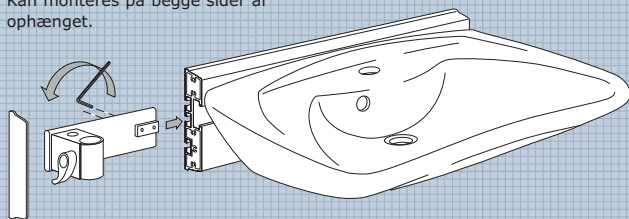

Montering på væg




Monteringskruer til massiv mur medfølger.

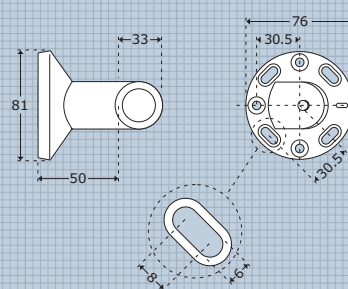

Materialer: Aluminium, kunststoffaminat, rustfrit stål

Maks. belastning, hylde: 4 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalicare.com

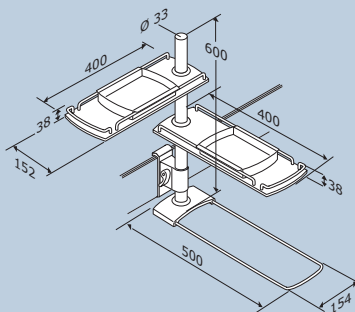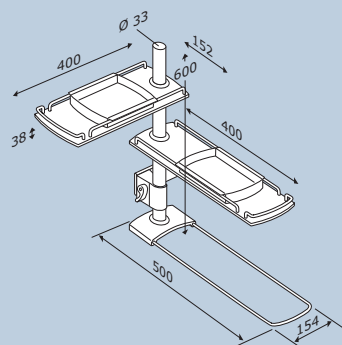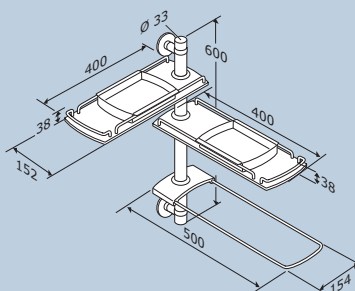
Til montering på vandret vægskinne600 mm søjle, 2 hylde, håndklædeholder, 2 bakker **RT471**400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke **RT470**400 mm søjle **RT400**600 mm søjle **RT401****RT471****Til montering på ophæng til håndvask**600 mm søjle, 2 hylde, håndklædeholder, 2 bakker **RT481**400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke **RT480**400 mm søjle **RT410**600 mm søjle **RT411****RT481****Fastmonteret**600 mm søjle, 2 hylde, håndklædeholder, 2 bakker **RT491xxx**400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke **RT490xxx**400 mm søjle **RT420xxx**600 mm søjle **RT421xxx****RT491000**

xxx: Farve på vægkonsol.




Trådkurve til vandret skinneAffaldskurv, A 297 x B 222 x C 344 mm **RT764**Universalkurv, A 326 x B 116 x C 136 mm t. hylde modul **RT765**Vaskekludskurv, A 212 x B 212 x C 174 mm **RT766**Blekurv, A 402 x B 212 x C 174 mm **RT767**Affaldskurv, A 212 x B 116 x C 344 mm t. hylde modul **RT768**Universalhylde, A 430 x B 148 x C 136 mm **RT769**

RT765 og RT768 passer også i håndklædeholder på hylde modul

RT764/RT765/RT766/RT767/RT768

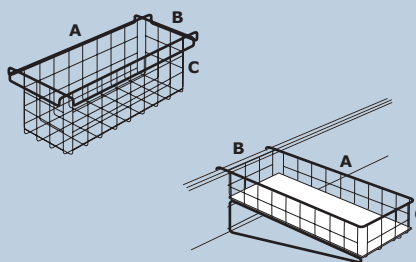

RT769

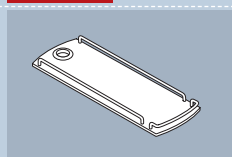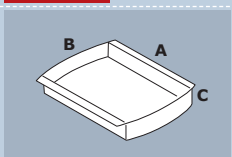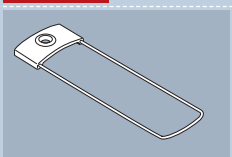**RT769****Tilhørende produkter til hylde modul****RT430****Hylde**
400 x 152 mm.**RT440000****Bakke** – til hylde,
til håndklædeholder og
til universalhylde.
A: 180 mm
B: 130 mm
C: 36 mm**RT435****Håndklædeholder**
– passer til trådkurv RT765
og RT768.
500 x 154 mm.

- 000** Hvid
- 035** Rød RAL3003
- 108** Mørkeblå RAL5011
- 164** Grå
- 166** Turkis

- 000** Hvid: Bakker
- Grå: Hylde og trådkurve

Håndgreb og bruseforhængsstang

Håndgreb fra Pressalit Care er en god hjælp for alle, der har brug for ekstra støtte. Håndgrebene kan desuden benyttes til at hænge håndklæder på, som brusestang m.m.




Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.

Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.


Montering

- 1 Efter montering af vægrosetten på væg trykkes afdækningskappen fast for at skjule skruberne.

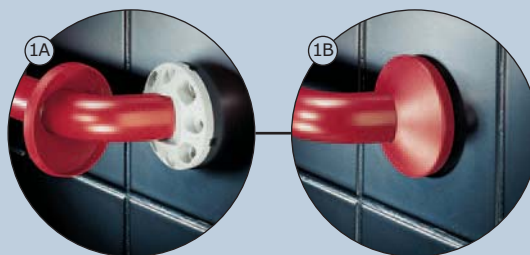

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

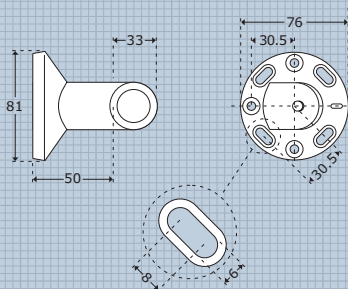



Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg



Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com

Håndgreb

Håndgreb, lige 300 mm	RT100xxx
Håndgreb, lige 450 mm	RT101xxx
Håndgreb, lige 600 mm	RT102xxx
Håndgreb, lige 800 mm	RT103xxx
Håndgreb, lige 1000 mm	RT104xxx
Vinkelhåndgreb 90°, højre, A 400 x B 475 mm	RT114xxx
Vinkelhåndgreb 90°, venstre, A 400 x B 475 mm	RT115xxx
Vinkelhåndgreb 90°, højre, A 400 x B 900 mm	RT118xxx
Vinkelhåndgreb 90°, venstre, A 400 x B 900 mm	RT119xxx
Vinkelhåndgreb 135°, 450 x 450 mm	RT110xxx

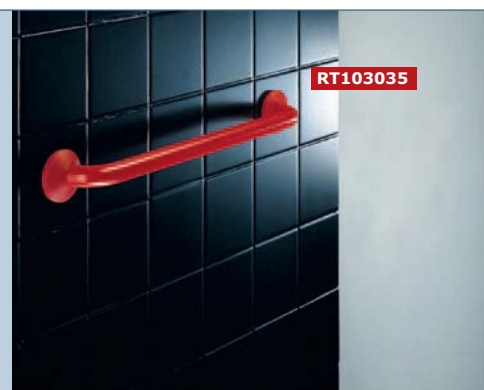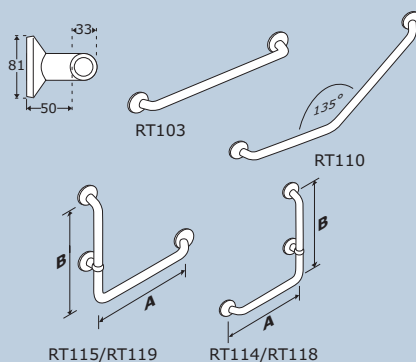
**Håndgrebshjørne**

Højre/venstre vendbar A 762 x B 475 mm	RT124xxx
Højre/venstre vendbar A 762 x B 762 mm	RT126xxx
Højre/venstre vendbar A 762 x B 1200 mm	RT128xxx
Højre/venstre A 762 x B 762 x C 1090 mm	RT136xxx
Højre/venstre A 762 x B 1200 x C 1090 mm	RT138xxx

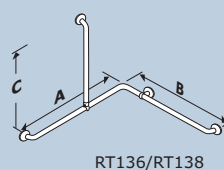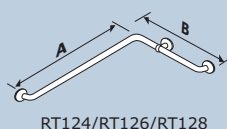**Bruseforhængsstang**

Bruseforhængsstang 1200 x 1200 mm	RT212xxx
Bruseforhængsstang 1500 x 1500 mm	RT215xxx




Inkl. 2 x 12 forhængsringe.

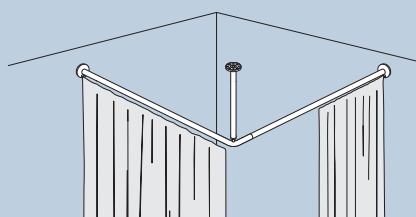**Svingbar bruseforhængsstang**


Svingbar bruseforhængsstang 1500 x 1500 mm **RT225**

Anvendes i rum, hvor der benyttes loftlift. De 2 svingbare stænger kan drejes 90° til begge sider, således at en loftlift kan passere. Kan også anvendes som rundeler.


Inkl. 2 x 12 forhængsringe.

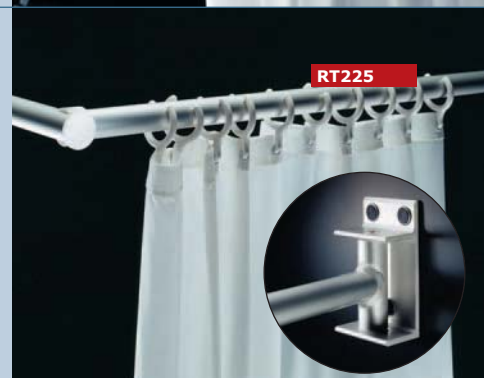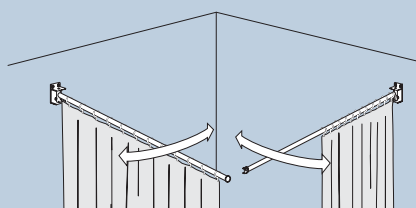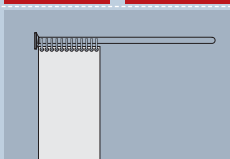**Tilhørende produkter til håndgreb og bruseforhængsstang****RT202****RT205****RT201000****RT600xxx**

Bruseforhæng
RT202000: Str. 1500 x 2000 mm, 2 stk., hvid
RT205000: Str. 1800 x 2000 mm, 2 stk., hvid
RT202: Mønstret
RT205: Mønstret

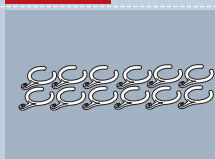

Forhængsringe
12 stk.

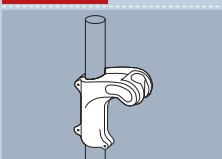

Bruseholder – til lodret greb. Se side 51.

000 Hvid

035 Rød RAL3003

108 Mørkeblå RAL5011

164 Grå

166 Turkis

RT225: Aluminium

Håndgreb elementer


Håndgreb fra Pressalit Care er et system i systemet. Ved hjælp af få elementer er det muligt at skabe et uendeligt antal individuelle løsninger. De enkelte løsninger kan endvidere udbygges til større systemer. Håndgreb fra Pressalit Care kan derfor anvendes både på badeværelser og i gangarealer – alle steder, hvor der er brug for ekstra støtte.



Systemet er så fleksibelt, at montering kan tilpasses eventuelle fuger, monteringsbjælker og væggenes bæreevne. Da stroppen (2A) kan åbnes, kan der til enhver tid bygges videre på eksisterende håndgreb og håndgrebssystemer.


Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Det gør det nemt at komme til grebet og få fat om det.

Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.

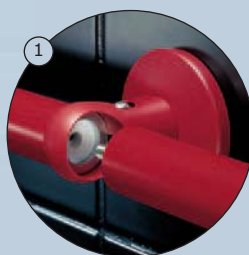


Montering

- ① **Samling** af to rørstykker foretages ved at skrue de enkelte rørstykker sammen. Hertil anvendes en samleenhed, der monteres i rørstykkernes ender.
- ② **Stroppen** åbnes og lukkes ved hjælp af en skrue (2A og 2B). Skruen skjules med den drejelige krave (2C). Roset og konsol skjules med afdækningskappe.

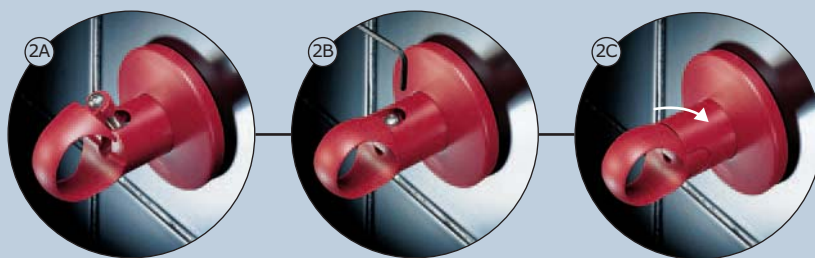

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

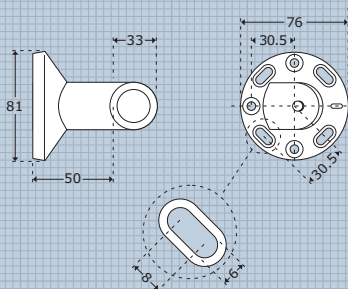


Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressaliticare.com


Rørstykke

300 mm	RT300xxx
1200 mm	RT303xxx
2400 mm	RT307xxx

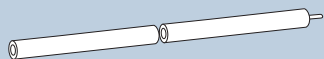**Rørstykke**

321 mm	RT320xxx
608 mm	RT321xxx
746 mm	RT322xxx
1046 mm	RT323xxx

Inkl. vægroset.

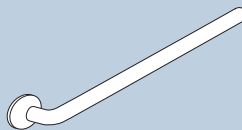**Rørstykke m. strop**

365 mm	RT330xxx
652 mm	RT331xxx
790 mm	RT332xxx
1090 mm	RT333xxx




Inkl. vægroset.

Vinklerørstykke m. lodret vinkel


Højre, 400 x 154 mm	RT340xxx
Venstre, 400 x 154 mm	RT341xxx

Inkl. vægroset.

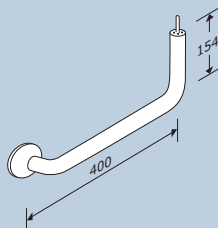
**RT340035****Vinklerørstykke m. vandret vinkel**

762 x 154 mm	RT345xxx
--------------	-----------------


Inkl. vægroset.

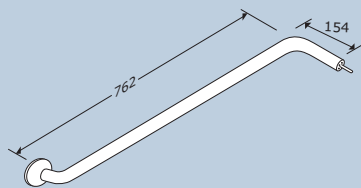**Vinkel 90°**


154 x 154 mm	RT350xxx
--------------	-----------------

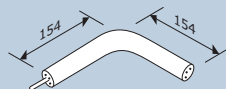**RT350035****Fittings**


Konsol m. strop	RT360xxx
Konsol m. strop og samleenhed	RT361xxx
Endestykke m. strop	RT362xxx
Konsol	RT363xxx

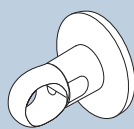


RT360

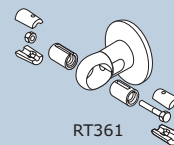


RT361

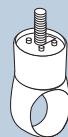

RT362

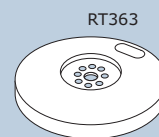

RT363

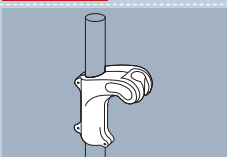**RT362035****Tilhørende produkter til håndgreb****RT600xxx****Bruseholder** – til lodret greb. Se side 51.

000	Hvid
035	Rød RAL3003
108	Mørkeblå RAL5011
164	Grå
166	Turkis

Håndgreb ABS

Pressalit Cares håndgrebssystem i ABS-plast er et godt greb i enhver situation. Det er behageligt at røre ved, og den rillede overflade giver et sikkert greb. Der er også mulighed for at kombinere det greb, der passer til den enkelte bruger. Meget velegnet til både badeværelses-, trappe- og gelændergreb.



Grebsdiameteren er 32 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.

Et monteret greb holder 52 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.

Materialet er gennemfarvet – ridser og almindelig slidage ses ikke.

Kan samles i et utal af kombinationer.


Fordele

- 1 **Håndgreb** – håndgrebet har en gribeafstribet overflade.
- 2 **Afdækningskappe** – til vægrosetten. Efter montering af vægrosetten på væg trykkes afdækningskappen fast for at skjule skrueerne.



Montering af vægroset

Monteringskruer til væg bestilles særskilt undtagen R1451, R1452, R1453 og R1454, hvor monteringskruer til massiv mur medfølger.

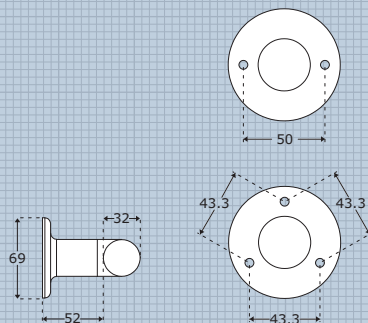

Samling af håndgreb


Rørstykker og fittings limes sammen med ABS-lim. Pressalit Care anbefaler Cyanolit (Pressalit Care nr. T4654).

Materialer: ABS-kunststof


Maks. belastning: Ved spændvidde op til 600 mm: 100 kg

Håndgreb m. afdækningskappe

153 mm	R1351xxx
306 mm	R1352xxx
459 mm	R1353xxx
612 mm	R1354xxx
1 salgseballage, 153 mm	R1451000
1 salgseballage, 306 mm	R1452000
1 salgseballage, 459 mm	R1453000
1 salgseballage, 612 mm	R1454000

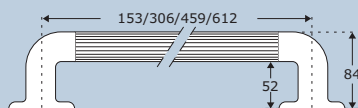**R1354000****Vinkelhåndgreb**


Højre, 90°, 600 x 600 mm	R1364xxx
Venstre, 90°, 600 x 600 mm	R1374xxx
Højre, 135°, 450 x 450 mm	R1365xxx
Venstre, 135°, 450 x 450 mm	R1375xxx

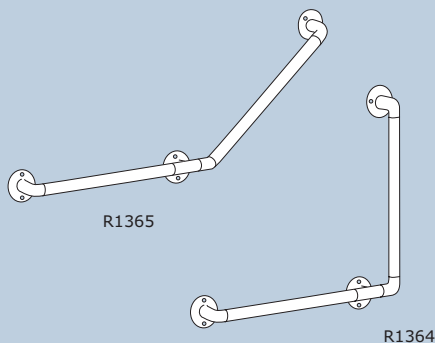**Rørstykke**

81 mm	R1315xxx
234 mm	R1314xxx
387 mm	R1313xxx
540 mm	R1312xxx

**R1313xxx****Fittings**

Vægroset m. T-stykke og tappe*	R1320xxx
Vægroset m. 90° vinkel og tap*	R1321xxx
Vægroset m. 90° vinkel og tap inkl. afdækningskappe	R1324xxx
Tap	R1325000
Endeprop	R1326xxx
Vægroset m. tap*	R1330xxx
45° vinkel m. tap	R1335xxx
T-stykke u. tap	R1340xxx
90° vinkel u. tap	R1345xxx

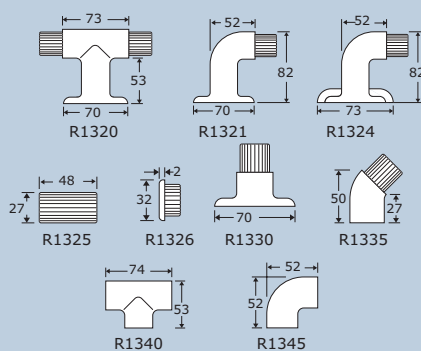

*Leveres uden afdækningskappe.

- 000** Hvid
- 035** Rød RAL3003
- 108** Mørkeblå RAL5011

Håndliste

Håndlisterne fra Pressalit Care fås i samme gedigne udførelse og samme farver som Pressalit Cares håndgreb. De er særligt anvendelige på gangarealer ved ældre- og plejeboliger samt hospitaler, hvor sikkerhed kombineret med æstetik er i højsædet.




Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.

Grebsdiameteren er 44 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.

På grund af vægkonsollens udformning får hånden et uhindret løb i hele håndlistens længde.


Montering

- ① Håndlisten monteres med 90° vægkonsoller
- ② Håndlister kan skrues sammen ved hjælp af en samle-enhed. Samlinger skjules med en plastkrave.
- ③ Afslutning på håndlisten er en endefådkning i kunststof.

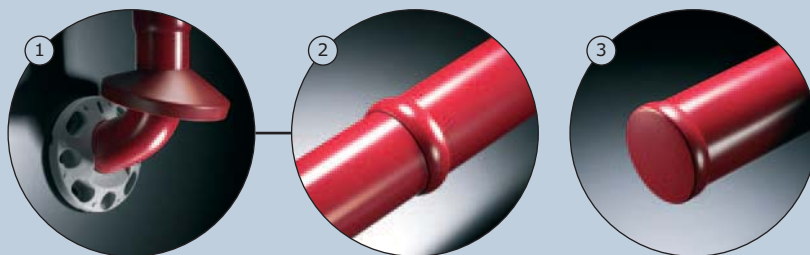

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

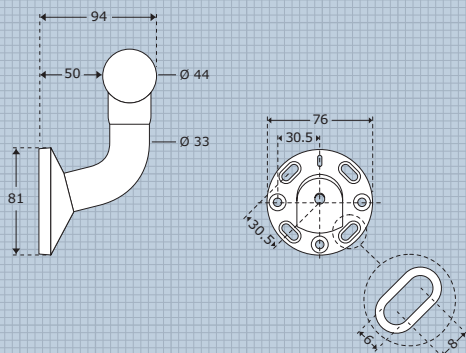



Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg

Håndliste

Håndliste 1000 mm m/2 vægkonsoller	RT850xxx
Håndliste 1500 mm m/2 vægkonsoller	RT851xxx
Håndliste 2000 mm m/3 vægkonsoller	RT852xxx
Håndliste 2500 mm m/3 vægkonsoller	RT853xxx
Håndliste 3000 mm m/3 vægkonsoller	RT854xxx
Håndliste 3500 mm m/4 vægkonsoller	RT855xxx
Håndliste 4000 mm m/4 vægkonsoller	RT856xxx

Leveres også i specialmål.
Ved specialmål og længere håndlisteforløb
kontaktes Pressalit Care.

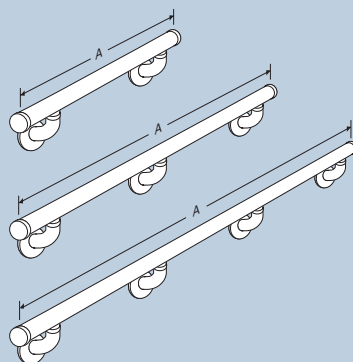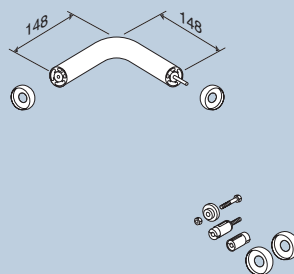**RT851035****Vinkel**90° vinkel **RT870xxx****RT870035**

- 000** Hvid
- 035** Rød RAL3003
- 108** Mørkeblå RAL5011
- 164** Grå
- 166** Turkis

Håndvask og toiletskål

Håndvaskens form og størrelse skal sikre, at både siddende og stående brugere kan komme tæt på vandstrålen og betjene armaturet. Siddehøjden på toiletskålen er afgørende for, at brugeren sidder stabilt. En standardløsning passer ikke alle. Alternativt vælges en ekstra høj toiletskål, eller en væghængt skål monteres i hensigtsmæssig højde.

Ergonomisk håndvask


Håndvask med overløb **R2050000**

Håndvask uden overløb **R2051000**

Hanehul: $\varnothing = 35$ cm

Forkanten - med den indadgående bue - stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte til albuerne i vasken og den flade bund giver plads til benene.

Til- og afløb: Se side 54

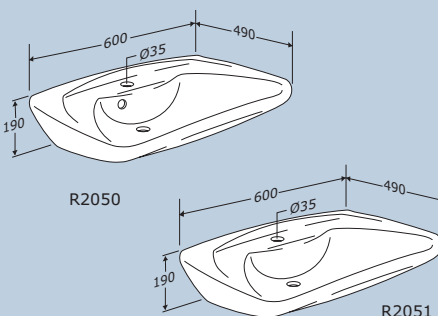

R2050000

Toilet, væghængt


Toilet, A 700 mm **R2090000**

Toilet, A 550 mm **R2091000**

Toilet 700 mm anbefales til kørestolsbrugere - giver også bedre plads til hjælperen. Ryglæn anbefales.

Væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. Nedenunder er der plads til kørestolens fodstøtter, mobiliffens ben og hjælperens fødder. Letter rengøring af gulv.

VA-godkendt (Danmark)

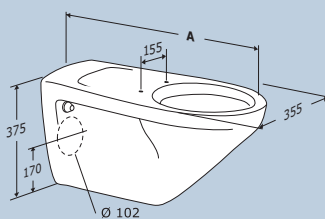

R2090000

Toilet, gulvmodel


Toilet, høj model, A 460, B 875 mm, S-lås **R2092000**

Toilet, standardhøjde, A 400, B 815 mm, S-lås **R2093000**

Toilet, standardhøjde, A 400, B 815 mm, P-lås **R2094000**

Siddehøjde uden toiletsæde: 460/400 mm.
Leveres med dobbeltskyl forindstillet til 3/6 liter.
Kan omstilles til 2/4 liter.


VA-godkendt (Danmark)

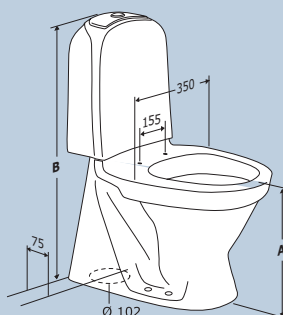

R2093000


Tilhørende produkter til toilet

RXXxxx

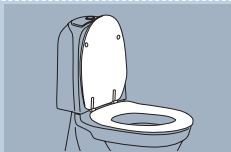


Toiletsæde
Se side 20 og 22.

R3548xxx

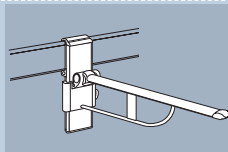


Toiletstøtte - for maksimal støtte. Se side 18.

R6533xxx

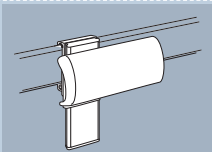

Ryglæn - til toilet med 700 mm fra væg til front, hvor cisternen er højt-hængende eller indbygget i væg. Se side 49.


R9320

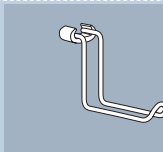

Papirholder
- til montering under toiletstøtten. Se side 19.

RT620

RT621

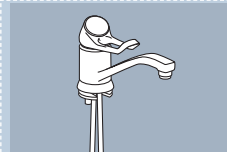

Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Frontstøtte og ryglæn

For personer med nedsat balanceevne er det vigtigt at sidde stabilt. Indstillelig frontstøtte og ryglæn sikrer optimal støtte og komfort på toilet og brusebadestol.

Front- og rygstøtte til brusebadestol og toiletstøtter

Regulerbar: A 450 - 520 mm **RT800xxx**

Regulerbar: A 550 - 620 mm **RT801xxx**

Regulerbar: A 700 - 770 mm **RT802xxx**


Målene angiver støtternes centerafstand.

Anbringes foran eller bag ved brugeren. Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance.

RT800 til brusebadestol 310 og toiletstøtter.

RT801 til brusebadestol 410 og toiletstøtter.


RT802 til toiletstøtter.

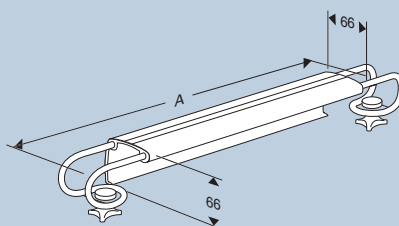

Ryglæn til montering på vandret vægskinne

Ryglæn til toilet u. cisterne 150 mm højdereg. **R6533xxx** ⚙️


Anbefales, hvor toilettets afstand væg-front = 700 mm

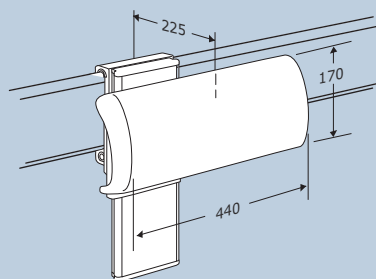

Ryglæn til montering på vandret vægskinne

Ryglæn til toilet u. cisterne **R6513xxx** ⚙️


Anbefales, hvor toilettets afstand væg-front = 700 mm

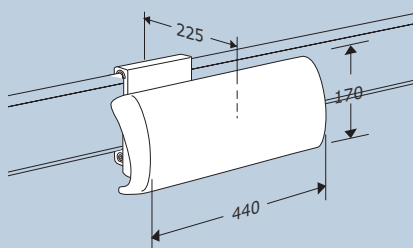

Ryglæn, fastmonteret

Ryglæn til toilet u. cisterne **R6014xxx** ●

Til toiletskåle med højtstående cisterne. Må ikke benyttes ved indbygningcisterne.

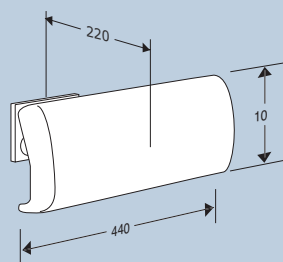

□	000	Hvid
■	035	Rød RAL3003
■	108	Mørkeblå RAL5011
■	164	Grå
■	166	Turkis

Materialer: Aluminium, blødt porsukum med trækerne, kunststof, rustfrit stål, tokomponent plast

Maks. belastning: Front- og rygstøtte: 70 kg
Ryglæn: 100 kg

Armatuer

Armaturet på håndvasken eller ved brusebadet skal være nemt, behageligt og logisk at betjene - uanset om man står eller sidder.

Armatuer til håndvask


Armatuer, kort tud **RT620**

Armatuer, lang svingtud **RT621**

Det ringformede betjeningsgreb er egnet til brugere med nedsat funktionsevne. Den lange svingtud gør det nemmere for siddende brugere at nå vandet. Tuden svinges til siden, hvis den er i vejen. Signaturen for varmt og koldt vand kan ses fra både siddende og stående position.

Skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 40°. Indbygget vandsparefunktion for lille og stor vandmængde. Grebet er - for stor vandmængde - fjederbelastet, hvilket også sikrer mod oversprøjtning.

Grænsen for lille og stor vandmængde kan indstilles.

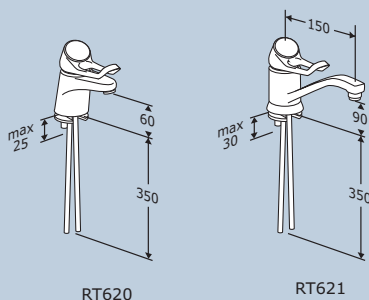

RT620

RT621



RT621


Armatuer til håndvask

Armatuer, med sensor **RT630**

Betjeningsgrebet er erstattet med sensor, så armaturet er berøringsfrit, og bakterier ikke overføres fra person til person. Velegnet for brugere der har vanskeligt ved at betjene greb. Vandmængde og temperatur er forindstillet, men kan ændres.

Vandmængde er forindstillet, temperatur kan reguleres med grebet på højre side af armaturet.

Inkl. 1 stk. 6 V litiumbatteri til strømforsyning.

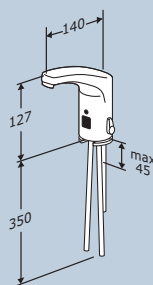

RT630



Brusearmatur


Brusearmatur med termostat **RT640**

Brusearmatur m. termostat og ekstra lange greb **RT641**


Betjeningsvenlige greb i kontrastfarve, som er nemme at se. De ekstra lange greb på RT641 er i røgfarget plast. En skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 38°.

Armaturet er varmeisoleret.

Kan monteres på armaturholder RT756.

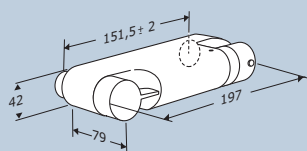

RT640

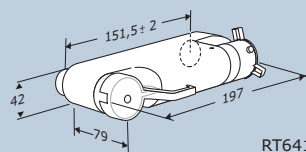

RT641



RT640

Håndbruser og bruseholder


Håndbruseren skal være let og nem at håndtere – også for hænder med nedsat funktion. Samtidig er det vigtigt, at håndbruseren kan placeres præcis der, hvor situationen kræver det. Flexibilitet skabes ved at anbringe armaturholder på skinne.

Armaturholder til montering på vandret vægskinne

Armaturholder **RT756**

1200 mm tilløbsslange medfølger. Holderen til håndbruseren kan monteres på højre eller venstre side efter behov. Foto viser placering til højre hånd. Armaturholder passer til alle blandingsbatterier, der overholder almindelig vvs-standard, 151 mm.

Den flytbare armaturholder giver mulighed for individuel placering af håndbruser og armatur. Ved brusebadestolen, ved håndvasken - hårvask, ved toilettet - bidetfunktion.

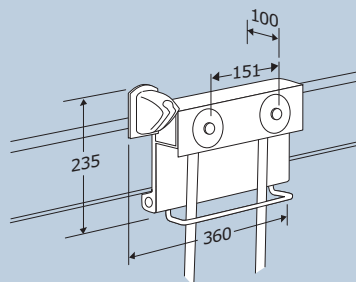


Håndbruser

Håndbruser, 1 stråletype **RT610**

Håndbruser, 3 stråletyper (standard, soft, massage) **RT611**

Vægt RT610/RT611: 155 g/170 g. Grebets buede form samt vægtbalance mellem hoved og greb gør bruseren velegnet for hænder med nedsat funktion. Omstillingsring med tap gør det nemt at skifte stråletype. Stråleformerne i silikone gør dem nemme at holde rene for kalk. Slangens længde på 2000 mm og drejelige omløbere giver stor aktionsradius.

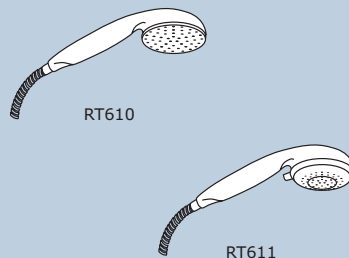

Bruseholder

Bruseholder til lodret greb **RT600xxx**

Bruseholderens udformning og låsesystem gør det enkelt at indstille den i højden – også for svage hænder. Et klik-system gør, at håndbruserens - og dermed strålens - vinkel kan indstilles efter ønske. Monteret på lodret håndgreb med længde 1000 mm bliver bruseholderen velegnet til både siddende og stående bruger. Samtidig får man et godt støttegreb.




Anbefales med håndgreb RT104, RT118/119, RT136/138.



Tilhørende produkter til RT756

RT640

RT641

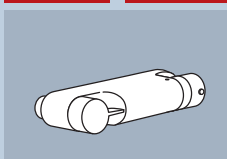

Brusearmatur
Se side 50.


Tilhørende produkter til RT600

RT104xxx

RT136xxx



Håndgreb - 1000 mm
Se side 41.

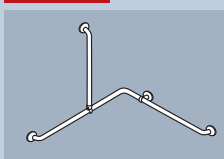


Håndgrebshjørne - til brusebad
Se side 41.

- 000** Hvid
- 035** Rød RAL3003
- 108** Mørkeblå RAL5011
- 164** Grå
- 166** Turkis

Krom


Toiletstøtte – fastmonteretToiletstøtte **R1100000**Toiletstøtte m. ben, brugshøjde 850 mm **R1101000**Toiletstøtte m. ben, brugshøjde 800 mm **R1102000**

En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Den afrundede form giver et sikkert og behageligt greb. Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug – eller for at give plads.

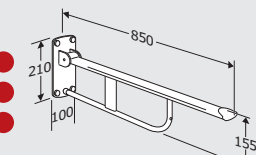

R1100

I opklappet stand: 185 mm

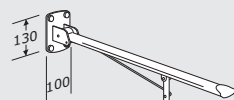


R1101/1102

I opklappet stand: 140 mm

**R1100000**

Montering – R1100: Ved montering i anbefalet højde (890/840 (DK) mm) er toiletstøttens højde 850/800 mm – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.


Monteringskruger til massiv mur medfølger.

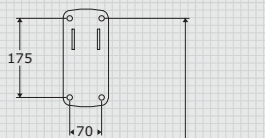

890/840 (DK)

Montering – R1101/1102: Ved (890/840 (DK) mm) er toiletstøttens højde 850/800 mm – målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

Monteringskruger til massiv mur medfølger.

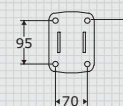



890/840 (DK)

Armstøtte til montering på toiletMed toiletsæde R37 **R1170**Uden toiletsæde **R1171**

Monteres nemt og hurtigt på toilet. Solide greb giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.

Armstøtterne kan slås individuelt op.

Hvidt toiletsæde og koboltblå håndtag.
Leveres med beslag BL1.

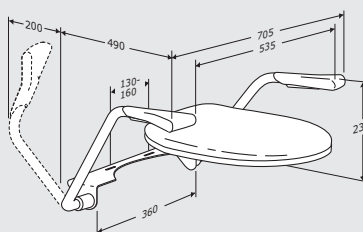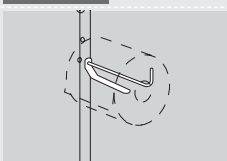**R1170****Tilhørende produkter til R1100/R1101/R1102****R1151**

Papirholder – med fjeder.
Kan betjenes med én hånd.

Tilhørende produkter til R1170/R1171**R1175**

Papirholder – kan monteres på både højre og venstre håndtag.

Rxxxx


Toiletsæde
Se side 20.

000 Hvid

Grå: Grebsafslutninger

Bruseklapsæde og ryglæn

Ryglæn til bruseklapsæde	R1651000	●
Bruseklapsæde	R1600000	●
Bruseklapsæde m. udskæring	R1601000	●

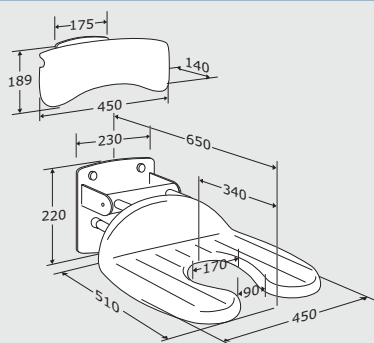


I opklappet stand: 180 mm



Sædet fås i 2 varianter. Med afløbsriller eller med udskæring for at lette intimhygiejnen.

Montering – ved montering i anbefalet højde (525 mm) er bruseklapsædets højde 440 mm – målt fra gulv til sædets overkant.

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

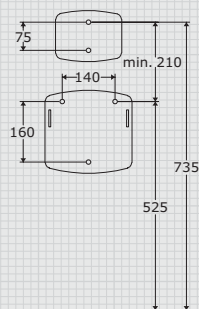

□ 000 Hvid

■ Grå: bruseklapsæde og ryglæn

Fleksible til- og afløbssystemer

De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at gøre indstilling af håndvaske og brusearmatur mulig. For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at vandinstallationerne er placeret rigtigt og fx ikke spærrer for bevægelsen. Udførlig monteringsvejledning følger naturligvis med de enkelte produkter, men kan også rekvireres særskilt til fx projekteringsformål.



<p>R2064: A = T4626 R2074: A = T4633 R2084: A = T4657</p>	<p>El og gas: R4660, R4670 og R4760</p> <p>Disse ophæng kan ikke passere til-/afløbsinstallationen.</p>	<p>Manuel: R4540</p> <p> Ved anbefalet monteringshøjde og vandudtag 340 mm over gulv kan ophænget passere til-/afløbsinstallationen.</p>	<p>Fleksibelt til-/afløbssystem, 1200 mm</p> <p>R2064 Flexibelt til-/afløbssystem, 1200 mm R2074 Flexibelt til-/afløbssystem, 1/2"/1200mm/UK R2084 Flexibelt til-/afløbssystem, VA/1200 mm/DK</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan leveres i specialmål.</p> <p>Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens fodstøtter.</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan suppleres med: Vandlås: R2058 Udluftningskit: R2059</p>
<p>R2065: A = T4627 R2075: A = T4611 R2085: A = T4656</p>	<p>El og gas: R4660, R4670 og R4760</p> <p>Disse ophæng kan ikke passere til-/afløbsinstallationen.</p>	<p>Manuel: R4540</p> <p> Ved anbefalet monteringshøjde og vandudtag 340 mm over gulv kan ophænget passere til-/afløbsinstallationen.</p>	<p>Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm</p> <p>R2065 Flexibelt til-/afløbssystem, 700 mm R2075 Flexibelt til-/afløbssystem, 1/2"/700mm/UK R2085 Flexibelt til-/afløbssystem, VA/700 mm/DK</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan leveres i specialmål.</p> <p>Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens fodstøtter.</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan suppleres med: Vandlås: R2058 Udluftningskit: R2059</p>
<p>R2061: A = T4604 R2071: A = T4610 R2081: A = T4655</p>	<p>El og gas: R4260, R4270 og R4360</p>	<p>Manuel: R4140</p>	<p>Fleksibelt til-/afløbssystem, 500 mm</p> <p>R2061 Flexibelt til-/afløbssystem, 500 mm R2071 Flexibelt til-/afløbssystem, 1/2"/500mm/UK R2081 Flexibelt til-/afløbssystem, VA/500 mm/DK</p> <p>Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens fodstøtter.</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan suppleres med: Vandlås: R2058 Udluftningskit: R2059</p>
<p>R2065: A = T4627 R2075: A = T4611 R2085: A = T4656</p>	<p>El: R4920, R4921, R4930, R4931</p> <p>Til- og afløbsslangerne er skjult bag afdækningspladen.</p>	<p>RT756</p>	<p>Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm</p> <p>R2065 Flexibelt til-/afløbssystem, 700 mm R2075 Flexibelt til-/afløbssystem, 1/2"/700mm/UK R2085 Flexibelt til-/afløbssystem, VA/700 mm/DK</p> <p>Til-/afløbssystemerne kan suppleres med: Vandlås: R2058 Udluftningskit: R2059</p> <p>RT756 Armaturholder leveres med 1200 mm tilløbsslanger</p> <p>Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens fodstøtter.</p>

Der findes, som det fremgår ovenfor, tre varianter af hvert system: 80-serien er VA-godkendt i Danmark og sælges kun her. 70-serien har 1/2" slanger i stedet for 3/8" og sælges primært i UK. 60-serien sælges alle andre steder.



Pressalit Care anbefaler, at til- og afløbstilslutninger på væg er 90° vinkler, der peger nedad.

Einstallationer



Ligesom ved installation af vand er det også ved elinstallationerne vigtigt at få alt projekteret rigtigt fra starten – både af funktionelle og af æstetiske grunde. Installationen foretages af autoriseret elinstallatør og skal følge gældende national lovgivning. Udførlig monteringsvejledning følger naturligvis med de enkelte produkter, men kan også rekvireres særskilt til fx projekteringsformål.

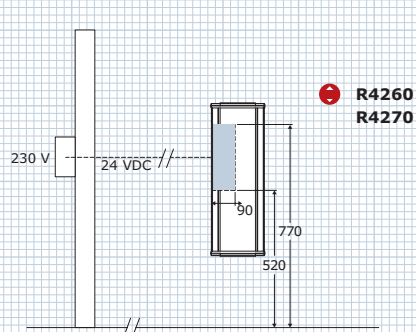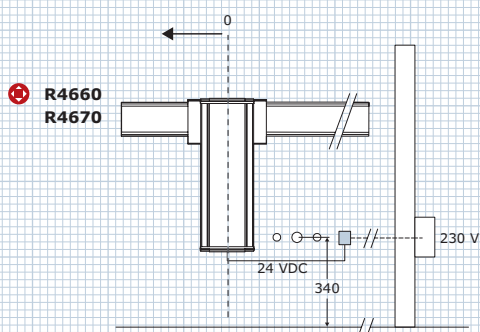


Transformer 230 V/24 VDC jævnstrøm monteres i et tørt rum adskilt fra baderummet eller under loftet. Ved produkter på vandret skinne er det vigtigt, at eludtaget placeres modsat bevægelsesretningen og så tæt på produktets bevægelsesstart – markering 0 – som muligt for ikke at begrænse den vandrette bevægelse.

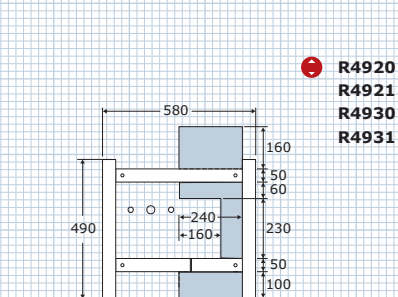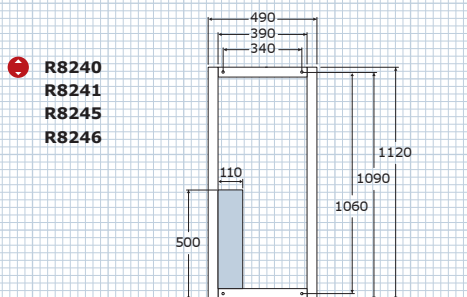

Styreboksen med indbygget transformer skal tilsluttes 230 V. Dette kan ske, ved at der er en vådrums-godkendt vægdåse – eludtag (markeret med blå) – til stede, eller ved at føre en godkendt ledning gennem væggen for tilslutning uden for rummet.

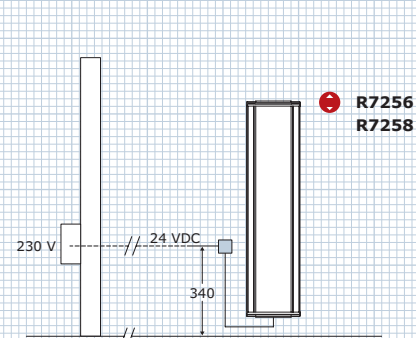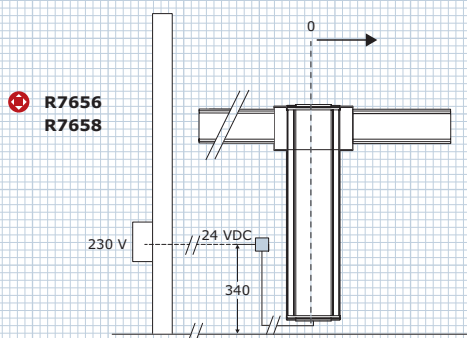

Transformer 230 V/24 VDC jævnstrøm monteres i et tørt rum adskilt fra baderummet eller under loftet. Ved produkter på vandret skinne er det vigtigt, at eludtaget placeres modsat bevægelsesretningen og så tæt på produktets bevægelsesstart – markering 0 – som muligt for ikke at begrænse den vandrette bevægelse.

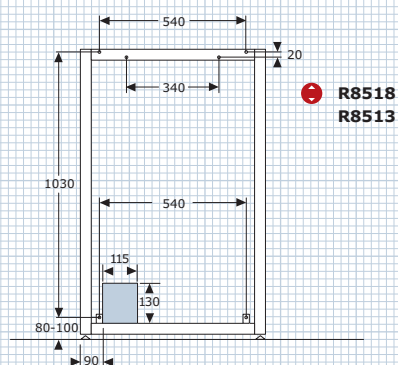


Styreboksen med indbygget transformer skal tilsluttes 230 V. Dette kan ske, ved at der er en vådrums-godkendt vægdåse – eludtag (markeret med blå) – til stede, eller ved at føre en godkendt ledning gennem væggen for tilslutning uden for rummet.

Pressalit Care A/SPressalitvej 1
DK-8680 RyTel. +45 8788 8777
Fax +45 8788 8669
E-mail mail@pressalitcare.com**Dansk Salg**Pressalitvej 1
DK-8680 RyTel. 8788 8989
Fax 8788 8669
E-mail dk@pressalitcare.com

CB0400A 04.06

A division of Pressalit Group A/S

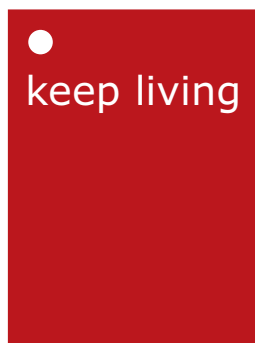

Pressalit Care er førende inden for indretninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Filosofien er, at nedsat funktionsevne ikke behøver at begrænse et menneskes udfoldelse. Vores design af løsninger til køkken og bad er i alle detaljer båret af denne grundtanke.

Vi tilbyder 30 års erfaring inden for Health Care branchen og opererer i dag over hele verden.

Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.

www.pressalitcare.dk



Pressalit Care A/S, Denmark

