

Laid C.1 fingervibrator



Fingervibratoren C.1 har en ergonomisk utforming som gjør at både kvinner og menn kan bruke den på de mest sensitive områdene i underlivet. Fingervibratoren egner seg også for stimulering av andre deler av kroppen og samspillet ved seksuell tilnærming.

Benyttes av kvinner ved:

- Nedsatt sensibilitet i hele eller deler av vulva f.eks etter operasjoner i underlivet, stråleskader etter underlivskreft, Multippel Sklerose (MS) eller diabetes
- Nedsatt lyst
- Smerter
- Manglende orgasme
- Nedsatt blodsirkulasjon
- Stram bekkenmuskulatur

Brukes i vulva som omfatter klitoris, kjønnslepper og det følsomme området fra urinrør til skjedeinngang.

Benyttes av menn ved:

- Nedsatt seksuell funksjon
- MS eller diabetes
- Etter stråleterapi eller operative inngrep
- Smerter

Brukes blant annet ved stimulering på selve penis, perineum eller mot anus. Fingervibratorens kraftige stimulering benyttes også i kombinasjon med penispumpe for å øke blodtilstrømning i områder med nedsatt sensibilitet.

C.1 er vanntett og oppladbar, har to vibrasjonshastigheter og en pulseringsfunksjon. Den finnes i fargene dyp rosa og svart.

Spesifikasjoner

Materialer: 100 % Body-safe silikon og ABS

Vekt: 70 gram

Vanntett: Ja (ved 1 meter)

Oppladbar: Ja

Batteri: Lithium-ion

Lading: 120 minutter


Brukstid: Opptil 110 minutter

Standby-tid: 90 dager når fulladet

Hertzstyrke:

- Nivå 1/start: 57 Hz
- Nivå 2: 100 Hz
- Pulsering: 43 Hz

C.1 har vidt spenn av muligheter for variasjoner, her er det kun fantasien som begrenser. Nedenfor finner du en illustrasjon på noen av mulighetene, samt ulike måter å holde fingervibratoren på under stimulering. Legg merke til at det er fullt mulig å penetrere samtidig som du stimulerer. Dette kan gjøres ved å føre fingre eller en dildo gjennom ringen.

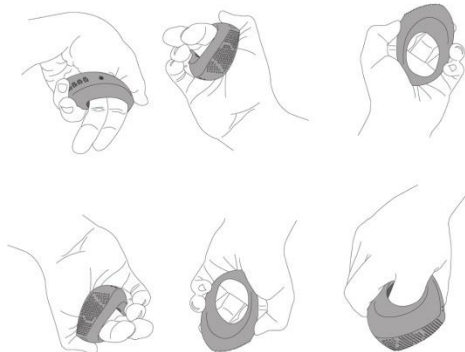

Laid

Om du ønsker å stimulere hele området samtidig kan C.1 i tillegg legges flatt i hånden og holdes mot vulva/perineum.