

PEDIATRIC CONTOURED SITTEPUTE FOR BARN

VASKBAR OG LETT KONTURERT BARNPUTE MED MAXIMAL KOMFORT



StimuLITE® Honeycomb barn pute Pediatric Contoured er en kjølig, tørt og behagelig – og vaskbar – en pute med konturert sitteflate som både foreldre og barn elsker. Denne lette og nyttig pute er ideelt for rekreasjon og daglig bruk, og både puten og trekket kan lett vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. StimuLITE® Pediatric Contoured barn pute er designet for ytelse og komfort og gir maksimal trykkavlastning for brukere opp til 50 kg. Den er basert på velprøvde egenskaper av mykt og fleksibelt materiale som tilpasser seg kroppens form. Honeycombs naturlige evne til å gi enda vektfordeling, gjenvinne

sin opprinnelige form og demping gir maksimal trykkavlastning og bidrar til å hindre skade på vev. Innovative StimuLITE® Pediatric Contoured barn pute ikke bare redusere trykk og skjærkraft til et minimum, men også fuktighet, noe som ellers kan føre til hud skjørhet. Putens unike ventilasjonssystem – perforert "honeycomb" (honeycomb) og luft gjennomtrengelig trekk med sidenet – gjør at luften kan sirkulere og fuktigheten fordampe og holder barna kjølig og tørt selv i varmt og fuktig klima. Puten veier 1/2 – 1 kg, avhengig av størrelse, og er laget av termoplastisk uretan – et medisinsk materiale som hindrer forekomst av sopp, bakterier og lukt. Ren hud er sunn hud og med puten antibakterielle egenskaper sammen med behagelig vaskemaskinen er lett å holde godt hud hygiene. For barn med inkontinens medfølger en fuktoppsamlare som plasseres under puten på innsiden av trekket. Væsken dreneres gjennom puten og huden holdes tørt. StimuLITE® Pediatric Contoured barn pute beskytter barn mot trykksår, skjør og hud skjørhet og gir maksimal trykkavlastning.

Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikak-estruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørt. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørt.





Puster og fordamp fuktighet



Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Pediatric Contoured består av to lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdelene. StimuLITE® Pediatric Contoured sitteputen fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes kan anvendes som et forebyggende tiltak mot trykksår og fuktskader. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

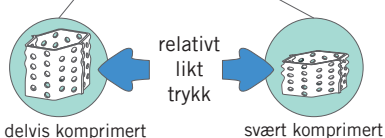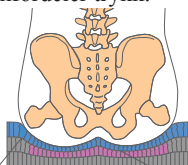

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

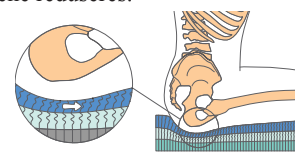

minimal skjærkraft mot venene
Diffus lateral skyvekraft



Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® Pediatric Contoured sitteputen tilverkes ikke med rund bunn for rullestol med hengekøye sete

StimuLITE® Pediatric Contoured Sittepute for Barn

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker. Maks størrelse som kan tillverkes er PDCD1416 (b36 d41 h5). IKKE TILJENGELIG MED AVRUNDET BUNN

Størrelse	Pute med flat bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS.nr
b26 d26 h5	PDCD1010	(\$)	COVPDCD1010	(\$)	WCOVPDCD1010	(\$)	IN1010	207496
b26 d31 h5	PDCD1012	(\$)	COVPDCD1012	(\$)	WCOVPDCD1012	(\$)	IN1010	207496
b31 d31 h5	PDCD1212	(\$)	COVPDCD1212	(\$)	WCOVPDCD1212	(\$)	IN1212	207497
b31 d33 h5	PDCD1213	(\$)	COVPDCD1213	(\$)	WCOVPDCD1213	(\$)	IN1212	207497
b31 d36 h5	PDCD1214	(\$)	COVPDCD1214	(\$)	WCOVPDCD1214	(\$)	IN1212	207497
b31 d41 h5	PDCD1216	(\$)	COVPDCD1216	(\$)	WCOVPDCD1216	(\$)	IN1414	207498
b36 d36 h5	PDCD1414	(\$)	COVPDCD1414	(\$)	WCOVPDCD1414	(\$)	IN1414	207498
b36 d41 h5	PDCD1416	(\$)	COVPDCD1416	(\$)	WCOVPDCD1416	(\$)	IN1414	207498


(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

(\$) Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkelen er ikke prisforhandlet med NAV

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vannrett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)

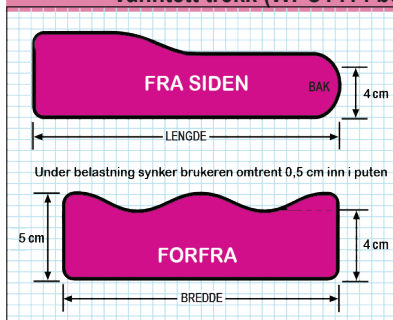

Trekk med luftgjennomtrengelige side og net på forsiden for fullstendig ventilasjon og muligheten for å forkorte puten.



Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.

