



StimuLITE® 3-SONE Madrass

Optimal trykkavlastning for akutt og langsiktig omsorg



Stimulite® 3-sone madrass: Optimal i hjemmet eller i omsorgen av trykksår opp til grad 3.



StimuLITE® 3-SONE Madrass er konstruert i to lag: Overmadrassen i vaskbart StimuLITE® Honeycomb materiale fra 100% termoplastisk polyuretan (TPU) og madrassbasen bygget av samme materiale. Begge lag er latex- og allergenfri. Hele madrassen leveres i et dampgjennomtrengelig, vanntett hygienetrekk av vaskbare Oekotex materialer. Ideell for brukere som ønsker å overføre fra seng til stol uten hødskillnader. Hele madrassen har en høyde av 12 cm. Overmadrassen og madrassbasen i StimuLITE® materiale er bygget av pustende og selfregulerende cellene i bikubestruktur. Sekskantede celler vil ikke kollapse under vekt slik at madrass kjernen beholder sin fulle ventilasjon når brukeren ligger på den, og under brukerens bevegelse oppstår en luftstrøm å hjelpe til med å styre varme og fuktighet (mikroklima) av huden, tilsvarende definisjonen for Low Air Loss funksjon av dynamiske madrasser. Materialet kan vaskes og er anti-bakteriell og mugg-fri.

Overmadrassen har tre sømløse sammenhengende seksjoner med forskjellige grader av fasthet tilpasset behovene til ulike kroppsdeler (hode, midtre delen, fot). Madrassbasen består av fastere bikubeceller. Hele madrassen består av 93% luftvolum, og bare 7% materialer. Brukerens kropp har således minimal kontakt med en fast overflate, og er for det meste ikke noe mottrykk. Kroppen opplever mindre nummenhet og smerte som ofte oppstår ved sengliggende i lange perioder. Cellerne er anisotropisk, dvs. de beveger seg like godt i alle retninger. Dermed følge cellene kroppens alle bevegelser og minimere skjær, hudirritasjon og smerte.

Stimulite madrassen er statisk og ikke i behov av motorer eller kabler og krever minimalt med service. Lett å flytte, om nødvendig. Overmadrassen kan enkelt ruller opp og takket være sin lave vekt (7kg), er det godt å fly med. På reise eller medeltidig forflytning å brukere kan den brukes som en overmadrass opppe på av en vanlig seng madrass. Veldig trygt i sin bruk i miljøer uten konstant tilsyn, der brukeren har nedsatt kognitiv evne, eller mange er involvert i omsorgen. Madrassen er praktisk å ha hjemme som det er lett å flytte og lett å vedlikeholde. Madrassens alle deler er vaskbar. Videre må du ingen strømforsyning eller vedlikehold av elektriske komponenter og batterier.

Overmadrassen i StimuLITE® materiale er bygget av pustende og selfregulerende cellene i bikubestruktur med tre sømløse sammenhengende seksjoner med forskjellige grader av fasthet tilpasset behovene til ulike kroppsdeler (hode, midtre delen, fot). Madrassbasen er laget av fastere sekskantceller i StimuLITE® materiale. Madrassbasens konstruksjon gjør at madrassen former seg etter kroppen hvor trykkavlastningsbehov er størst slik at brukerens kroppsvekt fordeles og kroppen opplever den fulle trykkavlastning. Rekommanderes for brukere med akutt behov for trykkavlastning og smertelindring samtidig som sårt tiltrengt stabilitet, for eksempel brukere i rullestol som forlater sengen i løpet av dagen.

StimuLITE® 3-SONE Madrass har mye å tilby brukere med behov for differensiert trykkavlastning og/eller smertelindring: en sentral sone som støtter og avlaste torso, sete og hofter med minimal mottrykk når du ligger eller sitter samtidig som det letter at brukeren kan utføre stillningsendringer. En myk og behagelig hodesone som støtter hoder samtidig som det bidrar til å hindre sår på hodet eller ørene. En myk fotsone som avlaste hælen og malleolus.

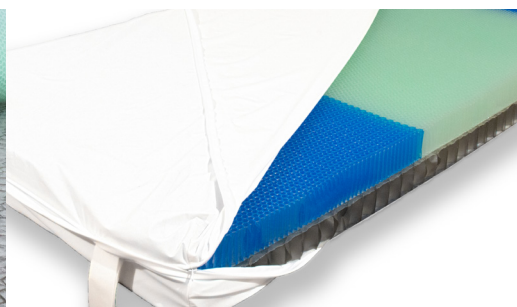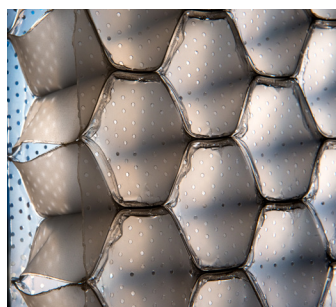



Artikkelnr	HMS Nr	Størrelse	Bekrivning
------------	--------	-----------	------------

StimuLITE® 3-SONE Madrass Brukervekt 25-180 kg

3ZON82BF	Artikkelen er ikke prisforhandlet med NAV	= 82,5 x 200 x 12 cm	GSR00056, FOUNDATION33F, COVIN33B, BAG
3ZON85BF		= 85 x 200 x 12 cm	GSR00067, FOUNDATION34F, COVIN3480B, BAG
3ZON90BF		= 90 x 200 x 12 cm	SRC00024, FOUNDATION36F, COVIN3680B, BAG

Reservdelar:

GSR00056	Må etterspørres ved hjelpemiddelsentralen	= 82,5 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 82 cm, vikt 7 kg
GSR00067		= 85 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 85 cm, vikt 7 kg
SRC00024		= 90 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 90 cm, vikt 7 kg
FOUNDATION33F		= 82,5 x 200 x 5 cm	StimuLITE® Madrass basen 82 cm
FOUNDATION34F		= 85 x 200 x 5 cm	StimuLITE® Madrass basen 85 cm
FOUNDATION36F		= 90 x 200 x 5 cm	StimuLITE® Madrass basen 90 cm
COVIN3380B		passer 3ZON82BF	Inkotrekk, passer rundt hele madrassen 82 cm
COVIN3480B		passer 3ZON85BF	Inkotrekk, passer rundt hele madrassen 85 cm
COVIN3680B		passer 3ZON90BF	Inkotrekk, passer rundt hele madrassen 90 cm
LDBAGBED			Vaskepose till overmadrasse, passer alle bredder
BAG			Bærkasse till overmadrasse, passer alle bredder

Tillbehør:

COVST4080	230167	80-90 x 200 x 19 cm	Komforttrekk till StimuLITE® 3-SONE madrass bomull, 82 - 90 cm
HEEL-S	230168	10 x 22 x 27 cm	Hælbeskyttelse StimuLITE® Heelboot, Small, skostørrelse 35-41
HEEL-M	230169	11 x 24 x 33 cm	Hælbeskyttelse StimuLITE® Heelboot, Medium, skostørrelse 35-45
HEEL-L	230170	12 x 26 x 36 cm	Hælbeskyttelse StimuLITE® Heelboot, Large, skostørrelse 40-48
PILLOW	230171	49 x 38 x 9 cm	Ventilerende og trykkavlastande StimuLITE® sengpute
SBS-1 90/60	230172	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-1 60 x 90 cm, åpne celler
SBS-1/48	230173	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-1 60 x 120 cm, åpne celler
SBS-2 90/60	230174	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-2 60 x 90 cm, film ene side
SBS-2/48	230175	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-2 60 x 120 cm, film ene side
SBS-3 90/60	230176	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-3 60 x 90 cm, stoff ene side
SBS-3/48	230177	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-3 60 x 120 cm, stoff ene side
SBS-4 90/60	230178	60 x 90 x 1,7 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-4 60 x 90 cm, film ene side
SBS-4/48	230179	60 x 120 x 1,7 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-4 60 x 120 cm, film ene side
SBS-5 90/60	230180	60 x 90 x 2,5 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-5 60 x 90 cm, film ene side
SBS-5/48	230181	60 x 120 x 2,5 cm	Trykkavlastande teppe StimuLITE® SBS-5 60 x 120 cm, film ene side
INMATT3227	230182	80 x 185 cm	Inko-/fuktoppsamlare, legges under overmadrasse
COVIN3380	230183	82,5 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer rundt StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 82 cm
COVIN3480	230184	85 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer rundt StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 85 cm
COVIN3680	230185	90 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer rundt StimuLITE® 3-SONE Overmadrasse 90 cm



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: +(47) 48 50 32 97
email: ordre@rehabshop.no
www.rehabshop.as