


Audinor DUO

Hurtigguide

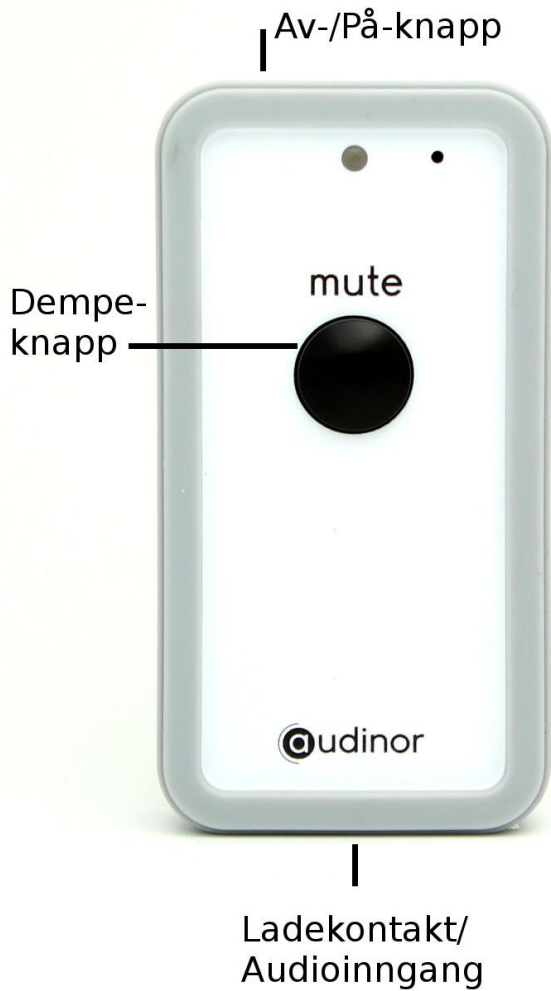

Mikrofon



Mottaker

Audinor DUO

Hurtigguide

Lade

Sett den magnetiske strømkontakten på plass i bunnen av enheten. Når enheten lades opp, lyser lampen oransje, og når den er fullt oppladet, lyser lampen grønt.

Slå på/av

- På: Trykk og hold av/på-knappen inne i 1 sekund for å slå på enheten. Lampen lyser grønt når enheten slås på.
- Av: Tryk og hold av/på-knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten. Lampen lyser oransje når enheten slås av.

Lytte

Når du bruker halsslyngen skal høreapparatene settes til et teleslynge program. Hvis man ikke har høreapparater er det mulig å koble et par vanlige hodetelefoner til mottakerens lydutgang.

Lydjustering

Beveg volumkontrollen opp for å justere lydnivået opp ett trinn, og ned for å regulere lydnivået ett trinn ned.

Trykk volumkontrollen "rett inn" for å aktivere Direkte Demping. Lampen lyser konstant rødt når enheten er dempet. Mottakeren forblir dempet til volumkontrollen aktiveres igjen.

Tilkobling av ekstern lydkilde

Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og mottaker (iPad, mobiltelefon mm). Den medfølgende lydkabelen kobles til lydkildens hodetelefon/lydudgang i den ene enden, og til ladekontakt/ audioinngang i den andre.

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad opp enheten når lampen for lavt batteri lyser.