


Hurtigguide - Brukerveiledning

- Aerolet toalettløfter betjenes enkelt med to lettvekts trykkbrytere. Trykkbryterne er plassert på innsiden av armlenet/støtتهåndtaket.
 - **FREMSTE TRYKKBRYTER (KNAPP) = OPP**
(kontrollerer bevegelsen oppover på toalettløfteren)
 - **BAKERSTE TRYKKBRYTER (KNAPP) = NED**
(kontrollerer bevegelsen nedover på toalettløfteren)
 - Aerolet stopper automatisk i den posisjonen som er forhåndsprogramert / innstilt.
 - Aerolet stopper når betjeningstrykkbryter (knapp) slippes.
 - Bevegelsen vil stoppe når man når det forhåndsinnstilte stoppunkt. Aerolet toalettløfterens elektroniske styringssystem vil rekalkibrere seg selv hver gang løfteren kjøres til laveste posisjon.
 - Når Aerolet blir installert på en Geberit eller Closomat modell, vil spyle og tørkesystemet kunne benyttes når Aerolet er i laveste posisjon.
- ! Hvis begge betjeningsknappene trykkes inn vil løfteren stoppe. Begge knappene må slippes for å bruke løfteren igjen.

Standard håndbetjening

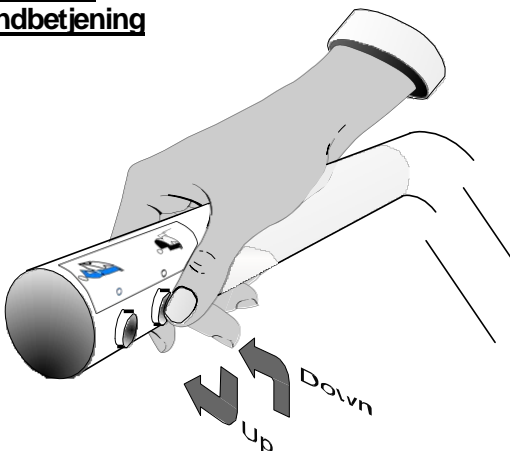

ADVARSEL!

Klemfare for hender.
Når toalettløfteren er i bevegelse må hendene **alltid** holdes på håndtakene / armlene eller i fanget.

Viktig informasjon!



Forsøk aldri å endre løfteinnstillinger på egenhånd, overlat det til kvalifisert personell.

Reparasjoner må kun utføres med strøm frakoblet.



Deres Aerolet toalettløfter er absolutt ikke et leketøy.



Vær spesielt oppmerksom på advarsler og faresymbol i veiledningen.

- Feil bruk kan føre til skade på bruker !
- Feil bruk kan føre til skade på toalettløfteren



ADVARSEL ! Klemfare for hånd.

Rengjøring og vedlikehold Aerolet



- Aerolet er designet for enkelt renhold.

ADVARSEL !

Trekk ut støpselet fra stikkontakten når løfteren vaskes.
Aerolet bør vaskes rutinemessig sammen med resten av badet.

- Ikke bruk vaskemidler med klor blekemidler eller saltsyreholdige produkter til rengjøring av løfteren.



ADVARSEL !

Det må aldri tømmes vann over løfteren og den må ikke spyles med høyt vanntrykk.

- Ikke vask under dekslene med flytende væsker.
- Dekslene kan rengjøres med en fuktig myk klut på utsiden.

