

# Calexotics vibrasjonspute



Calexotics vibrasjonspute benyttes ved nedsatt seksuell funksjon, ved sykdom som MS eller diabetes, etter overgangsalder, stråleterapi eller ulike operative inngrep. Vibratoren hjelper med å øke blodgjennomstrømming i vulva området som igjen er med på å bedre sensitiviteten. For menn benyttes vibratoren for å øke blodtilstrømming i området rundt penisroten, penis og perineum.

Vibratorsett består av en vibrasjonspute, en fjernkontroll og en USB lader. Vibratoren fullades på ca. 70 min. Det er viktig at ladeledning settes helt inn i selve vibratoren.

**Lading:** Sett inn ladekabelen i inngangen på vibratoren og i inngangen på fjernkontrollen. Inngangene finner du nederst slik som vist på baksiden av esken. Ladekabelen er en USB-kabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapter i stikkkontakten.

Merk: Bruker du PC-en kan ladetiden være betydelig lenger. Husk å lade vibratoren når den er tørr. Ladeledning må settes helt inn i vibratoren slik som vist på bildet.



Vibratoren har en utforming som gjør at den passer for både kvinner og menn.

## Spesifikasjoner:

Materialer: Body-safe silikon, ABS plast, polyuretan

Størrelse: 10,25 cm x 2 cm (vibratoren)

Batteri: USB lader inkludert

Lading: 70 min

Brukstid: Opptil 100 min

Vanntett: Ja

**PÅ/AV:** Slå på vibratoren ved å trykke på ON/OFF knappen. Den vibrerer et kort øyeblikk for å indikere at den er på. Trykk på «XO»-tegnet på fjernkontrollen. Slå av vibratoren på samme måte, enten ved å holde inne ON/OFF på selve vibratoren eller ved å holde inne «XO»-knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. Vibratoren skruer seg automatisk av etter 30 minutter med inaktivitet.

**Bruk:** Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på vibratoren. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren og endre frekvens og styrke. Vibratoren kan plasseres i stramt undertøy slik at den holdes på plass.

**Endre innstilling:** Vibratoren har 12 ulike innstillinger, f.eks. intens, eskalerende og pulserende vibrasjon. Vibratoren vil «huske» hvilken innstilling du sist brukte neste gang du slår den på.

**Etter bruk:** Vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibrasjoner.

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse • [quintet.no](http://quintet.no) • 55 98 15 55 • [post@quintet.no](mailto:post@quintet.no)

# QUINTET