

Ferticare 2.0



Design og ergonomi: Ferticare 2.0 er en håndholdt vibrator for menn med ryggmargsskade som ønsker hjelp til utløsning.

Ferticare 2.0 er en ny og mer strømlinjeformet utgave av den populære Ferticare.

AV/PÅ og frekvenskontroll: Ferticare 2.0 slås på og av ved å vri på hjulet for frekvenskontroll. Hvert trinn på hjulet øker frekvensen med 10 Hz. Frekvensen kan stilles inn mellom 70 og 110 Hz. Når vibratoren er på vil den lyse.

Amplituderegulator: Amplituden stilles ved å vri på hjulet. Bruk amplitudeindikatoren for å se amplituden.

Bruk: Vibrasjonsplaten settes inntil oversiden (dorsum) eller undersiden (frenulum) av penishodet (glans penis).

Rekvirering: Ferticare 2.0 kan søkes om via dispensasjon. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dispensasjonssøknad.

Spesifikasjoner:

Materialer:

Størrelse:

Batteri: Lithium-ion batteri, ladekabel inkludert

Brukstid: min. 20 min (ved 2,5 mm og 100 Hz)

Ladetid:

Frekvensområde: 70 – 100 Hz

Amplitude: 0,5 – 4,0 mm (variabel)

