

Fyllbar penisprotese

For personer med bl.a kjønnsinkongruens

Denne penisprotesen er laget i medisinsk silikon og er utviklet for personer med bl.a. kjønnsinkongruens (ikke utelukkende). Den har et naturlig utseende og følelse som sikrer maksimal komfort under bruk. Protesen pumpes opp og man kan dermed justere størrelsen og fastheten i henhold til sine personlige preferanser. Protesen kommer i to størrelser: **12 og 15 cm**.

Farger

Lys beige/beige, sandbeige, lys brun, brun, mørkebrun

Til samleie


Protesen er laget for å benyttes i erigert tilstand og er derfor velegnet til bruk under samleie. Det er anbefalt å øve på å pumpe opp protesen før den tas i bruk. På høyre side av skrotum ligger pumpen samt et lite hull for luftinntak/utslipp. Se bilde «A». Dette hullet må dekkes over med en finger for å fylle/pumpe protesen. Protesen kan ikke benyttes ved urinering.

Sele

Sammen med protesen medfølger en sele og plastklips for å kunne feste protesen. Se bilde «B». Selen kan justeres fra **66-127 cm**. Etter at protesen og selen er festet, kan posisjonen til protesen justeres slik at den sitter godt i lysken.

Lett å rengjøre

Protesen rengjøres med mild såpe og vann. Før rengjøring av protesen, er det viktig at hullet for luftinntaket dekkes med en medfølgende propp. Dette for å forhindre at vann trenger inn i protesen. Rengjør protesen etter hver gang den brukes. Protesen må rengjøres forsiktig, unngå skrubbing eller skraping.

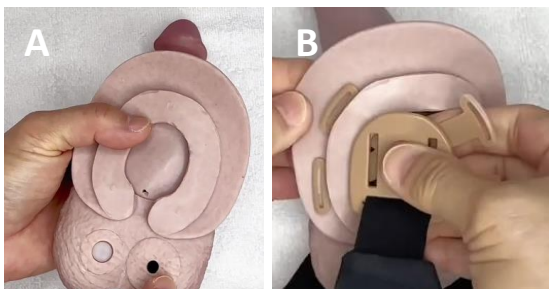

Tilbehør

Det finnes en del tilbehør til protesen som ikke leveres som standard. Dette er bl.a. en **vibrator** (bilde «C») med medfølgende fjernkontroll og ladekabel. Denne kan plasseres i en lomme i protesens sele for å stimulere brukeren av protesen. Med fjernkontrollen kan vibratoren styres uten at man trenger å trykke på selve vibratoren. Vibratoren er vanntett og rengjøres med såpe og vann. I tillegg finnes ulike **innlegg** (bilde «D») - «breaker» eller «stroker», som kan legges inn i selen og gi ekstra nytelse under bruk av protesen.

